

SWP ONVISION DezALERG

SWP ONVISION DEZALERG este un dispozitiv medical pentru uz oftalmic. Este o soluție sterilă, fără conservanți, de vâscozitate medie, fiziologică și izo-osmotică, care conține acid hialuronic, acid rozmarinic și vitamina B12.

SWP ONVISION DEZALERG are, în principal, o acțiune hidratantă și lubrifiantă.

Acidul hialuronic este un polimer biocompatibil și se găsește în mod natural în multe țesuturi umane. Acesta conferă produsului o acțiune lubrifiantă datorită proprietăților sale vâscoelastice și de reținere a apei. În plus, reface volumul filmului lacrimal.

Acidul rozmarinic și vitamina B12 sunt substanțe antioxidante care reacționează cu radicalii liberi și îi neutralizează. Acțiunea antioxidantă are loc la nivelul suprafeței corneene.

SWP ONVISION DEZALERG susține mecanismele antioxidante fiziologice și integrative și crește componenta apoasă a filmului lacrimal, cu efectul final de menținere sau de restabilire a trofismului țesutului ocular. Prin urmare, este potrivit pentru sindromul de ochi uscat, alergia oculară sau alt disconfort ocular cauzat de stresul ambiental sau mecanic. De asemenea, este indicat pentru a apăra și a proteja împotriva radiațiilor UV și a luminii albastre.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

CONJUNCTIVITĂ ALERGICĂ SEZONIERĂ, SINDROM DE OCHI USCAT ȘI DISCONFORT OCULAR

Atenuază simptomele conjunctivitei alergice sezoniere, chiar și atunci când este asociată cu sindromul de ochi uscat. De fapt, restabilește volumul filmului lacrimal, elimină alergenul din filmul lacrimal prin inducerea clipitului datorat introducerii picăturilor, contracarează fenomenele oxidative prin intensificarea mecanismelor fiziologice antioxidante;

Reduce simptomele de ochi uscat, ușoare până la moderate, însoțite de mâncărime, arsură, senzație de corp străin, roșeață cauzate de:

- factorii de mediu, cum ar fi: schimbările climatice, poluarea atmosferică, praful, expunerea la radiațiile solare, aerul uscat sau foarte cald, aerul condiționat;
- stresul mecanic, cum ar fi clipitul ineficient cauzat de utilizarea prelungită a computerului sau condus prelungit, studiu, purtarea lentilelor de contact;
- vârstă, menopauză sau starea de post-menopauză; scădere fiziologică a absorbției vitaminei B12 generată de alimentație;
- deficiențe nutriționale, cum ar fi un aport scăzut sau insuficient de vitamine;
- blefarite. În acest caz, clipitul după introducerea picăturilor oftalmice facilitează și eliberarea eventualelor secreții prezente la nivelul pleoapelor.

ACTIVITATE ANTIOXIDANTĂ

SWP ONVISION DEZALERG, prin asocierea Acidului Rozmarinic și a Vitaminei B12, realizează o activitate antioxidantă pentru a contracara acțiunea radicalilor liberi (generați la suprafața oculară după expunerea la soare) care, cu timpul, deteriorează atât epitelul pigmentar cât și fotoreceptorii, inducând degenerescența maculară și determinând opacifierea cristalinului și apariția cataractei.

În plus, datorită acțiunii sale antioxidante, **SWP ONVISION DEZALERG** apără și protejează ochii de efectele negative cauzate de radiațiile UV și de LUMINA ALBĂSTRĂ, atât de origine naturală (solară), cât și artificială, cum ar fi ecranele de PC, tabletă, smartphone și TV.

UTILIZAREA PRELUNGITĂ ȘI PURTĂTORII DE LENTILE DE CONTACT

SWP ONVISION DEZALERG este, de asemenea, indicat pentru utilizare frecventă și prelungită.

SWP ONVISION DEZALERG poate fi utilizat cu lentile de contact zilnice: o mică variație de culoare a lentilelor, atunci când acestea sunt îndepărtate, nu afectează proprietățile optice.

COMPOZIȚIE

Hialuronat de sodiu 0,12%, Acid rozmarinic (extras din Coleus forskohlii) 0,020%, Alantoină, Hidroxipropilmetilceluloză, Glicerină, Vitamina B12 0,010%, Fosfat de sodiu monobazic monohidrat, Fosfat de sodiu dibazic dodecahidrat, Clorură de sodiu, Apă pentru preparate injectabile.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Spălați-vă și uscați-vă bine mâinile înainte de utilizare;
- Rupeți sigiliul de siguranță înainte de prima administrare;
- Îndepărtați capacul de protecție;
- Apăsăți recipientul și introduceți 2 picături în fiecare ochi, dacă nu s-a prescris altfel;
- Așteptați câteva secunde după fiecare picătură fără a stoarce flaconul. Acest lucru va permite ca suficient aer să revină în sistem, altfel este mai dificil să cadă picăturile;
- Golierea tratată a flaconului poate fi asociată cu necesitatea de a exercita o presiune mai mare pentru a permite eliberarea produsului. Acest lucru se datorează faptului că proprietățile sistemului de închidere acționează pentru a păstra sterilitatea și caracteristicile chimice și fizice ale soluțiilor fără conservanți. De asemenea, în flacon rămâne întotdeauna o cantitate mică de soluție;
- Scurtați picătura rămasă pe vârf după utilizare;
- După utilizare, închideți imediat flaconul cu capacul;
- Nu puneți la loc capacul de protecție atunci când recipientul este încă stors;
- Nu atingeți vârful aplicatorului cu nimic, inclusiv cu ochiul sau cu degetele;
- Produsul poate fi utilizat până la 3 luni de la prima deschidere.

SWP
ONVISION
DezALERG

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII

- Produsul este destinat exclusiv utilizării oftalmice;
- Produsul este destinat utilizării de către un singur pacient;
- Nu utilizați produsul dacă recipientul este deteriorat sau nu este perfect închis atunci când îl deschideți pentru prima dată;
- Nu utilizați dacă sunt vizibile particule și/sau modificări ale culorii soluției;
- În timpul aplicării, nu atingeți ochiul sau orice altă suprafață cu marginea de distribuire a recipientului;
- Nu utilizați produsul după data de expirare indicată pe ambalaj;
- Nu utilizați în caz de incompatibilitate cunoscută față de oricare dintre ingrediente;
- Dacă suferiți de leziuni severe ale stratului transparent din fața ochiului (corneea), fosfații pot provoca, în cazuri foarte rare, pete tulburi pe cornee din cauza acumulării de calciu în timpul tratamentului;
- Nu sunt raportate interacțiuni cu medicamente sau alte picături pentru ochi; totuși, lăsați cel puțin 15 minute între administrările oricăror alte picături pentru ochi;
- În caz de reacții adverse în timpul utilizării, întrerupeți tratamentul și consultați un medic;
- Eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor;
- Nu lăsați la îndemână și la vederea copiilor;
- Consultați medicul înainte de a utiliza acest produs dacă sunteți însărcinată sau dacă alăptați;
- Pentru uz extern, nu înghițiți;
- Nu încercați să forțați sau să dezasamblați duza din flacon;
- Este necesar să raportați orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul la producător și la autoritatea competentă din statul membru în care sunteți stabilit.

EFFECTE SECUNDARE

Până în prezent nu se cunosc efecte secundare nedorite.

CONDIȚII DE PĂSTRARE


Depozitați între 2 și 25°C într-un loc uscat, departe de sursele de căldură și de expunerea directă la lumina soarelui.
Conținutul trebuie utilizat în termen de 3 luni de la prima deschidere.


AMBALARE

Un flacon cu 10 ml soluție sterilă, fără conservanți.


VALABILITATE

A se vedea data de expirare raportată pe cutie și pe recipient.

 C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

 Sun Wave Pharma SRL
Șoseaua Pipera, nr. 43
Florașca Park, Clădirea A, etaj 3
Sector 2, București, România
office@sunwavepharma.com

Ultima revizuire: 02.01 din 10.2022

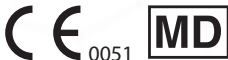

STERILE A

DT/01/DT/007