

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ser fiziologic



Soluție izotonică sterilă de clorură de sodiu 0,9% în flacon monodoză pentru curățare nazală și oculară, clătirea conductului auditiv extern, curățarea rănilor și inhalare.

Indicații de utilizare:

SER FIZIOLOGIC este adecvat pentru utilizare la sugari, copii și adulți:

- Pentru igienă nazală: prin instilare sau curățare (spălare) a mucoasei nazale uscate sau congestionate,
- Pentru igienă oculară: prin instilare, curățare sau spălare,
- Pentru igienă auriculară,
- Pentru curățarea rănilor,
- Pentru inhalare în terapia cu aerosoli.

Formă și prezentare:

Cutie cu 40 flacoane monodoză a câte 5 ml fiecare

Compoziție:

Clorură de sodiu 0,9 g

Apă purificată q.s. ad 100 ml

Fără conservanți.

Instrucțiuni de utilizare:

Spălați-vă cu atenție mâinile înainte de a utiliza produsul.

Desprindeți un flacon monodoză și răsușiți vârful acestuia pentru a îl deschide.

Pentru igiena nazală și oculară

Produsul poate fi utilizat zilnic pentru igiena nazală și oculară, între 1 și 6 curățări pe zi, în funcție de necesități.

- Pentru igiena nazală: prin instilare sau curățare (spălare) a mucoasei nazale uscate sau congestionate.

Înclinați capul în lateral. Introduceți cu atenție vârful flaconului în nară și apăsați ușor pe flaconul monodoză. Repetați procesul la cealaltă nară.

Aduceți capul înapoi în poziție verticală pentru a permite mucusului să se scurgă, apoi ștergeți excesul.

Nu suflați energic nasul timp de 10 minute după administrarea produsului.

În cazul sugarilor, instilați produsul aplicând o presiune minimă, pentru a evita orice risc de contaminare a urechii medii.

- Pentru utilizare oculară: prin instilare, curățare sau spălare.

Administrați câteva picături de soluție în fiecare ochi. Ștergeți excesul de lichid cu o compresă sterilă. Aveți grijă ca flaconul monodoză să nu intre în contact cu suprafața oculară.

Dacă se utilizează și un alt produs cu administrare oculară, începeți prin a administra SER FIZIOLOGIC și așteptați 15 minute înainte de a instila celălalt produs.

Soluția poate fi utilizată cu lentile de contact.

Pentru igienă auriculară

Prin clătire. Pentru o igienă auriculară corespunzătoare, după utilizarea unei soluții de tip surfactant pentru urechi, utilizați produsul pentru a îndepărta depunerile de cerumen solubilizate și pentru a clăti conductul auditiv extern.

Puteți utiliza un singur flacon monodoză pentru ambele urechi. Ștergeți excesul de lichid cu o compresă.

Pentru curățarea rănilor

Clătiți rana folosind toată soluția dintr-un flacon monodoză.

Ștergeți excesul de lichid numai de pe pielea sănătoasă.

Aveți grijă ca flaconul monodoză să nu intre în contact cu suprafața rănilor.

Pentru inhalare în terapia cu aerosoli

Dacă se va utiliza soluția ca solvent pentru inhalare în terapia cu aerosoli, consultați instrucțiunile furnizate pe produsul care urmează să fie inhalat.

Dacă se va utiliza numai soluția, consultați instrucțiunile furnizate pe dispozitivul de terapie cu aerosoli.

Solicitați sfatul medicului dumneavoastră dacă utilizați produsul pentru prima dată sau în cazul unei hipersensibilități respiratorii.

Precauții pentru utilizare:

Utilizare unică și personală.

După deschidere: utilizați imediat și aruncați flaconul monodoză după utilizare. Nu utilizați același flacon monodoză în scopuri diferite.

A nu se injecta.

A nu se utiliza după data de expirare.

Aveți grijă ca flaconul monodoză să nu intre în contact cu suprafața oculară sau cu suprafața rănilor.

A nu se utiliza dacă flaconul monodoză este deteriorat.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu reutilizați un flacon monodoză deschis: deoarece soluția nu conține conservanți, reutilizarea flaconului poate determina apariția riscului de administrare a unei soluții contaminate.

SER FIZIOLOGIC este un dispozitiv medical din Clasa IIa

Data marcajului CE: 16.09.2016.

Data revizuirii instrucțiunilor de utilizare: 09.2017.

Pentru orice informații referitoare la acest produs, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a distribuitorului:

Labormed Pharma Trading SRL

Tel: +4 021.304.72.00

e-mail: office@labormedpharma.ro

Producător: Laboratoire Unither

151 Rue André Durouchez

Espace Industriel Nord CS 28028 80084 Amiens Cedex 2 FRANȚA

Distribuitor: Labormed Pharma Trading SRL

Bd. Theodor Pallady nr. 44B, Etaj.2, Sector 3,

București, România

Fabricat în Franța

A NU SE INJECTA

STERILE

CE 0459



1065040672