

LYSELLE HA gel vaginal lipozomal, tub 40 ml cu aplicator

LYSELLE HA gel vaginal este un gel intim non-hormonal cu proprietati de hidratare intensa, cu acid hialuronic lipozomal. Formula sa speciala combate uscaciunea vulvo-vaginala si disconfortul creat de aceasta. Actioneaza ca lubrifiant si hidratant, restabilind fermitatea si elasticitatea naturala a zonei intime.

Acidul hialuronic este responsabil de mentinerea hidratarii normale a tesuturilor si joaca un rol important in procesele de refacere. Structura lipozomala fosfolipidica imbunatateste capacitatea gelului de a forma film la suprafata tesuturilor si de a le proteja. In plus, permite eliberarea controlata a acidului hialuronic in zona vulvo-vaginala pentru o eficacitate de lunga durata.

Vitamina E are rol sinergic cu acidul hialuronic: imbunatateste elasticitatea si incetineste procesul de imbatranire a zonei vulvo-vaginale.

LYSELLE HA este usor de aplicat. Textura sa placuta si non-grasa asigura confort optim in timpul utilizarii. **LYSELLE HA** respecta pH-ul intim fiziologic. **Compatibil cu prezervativele.**

LYSELLE HA gel vaginal este indicat in:

- Tratamentul mucoasei iritate sau ca tratament postchirurgical - ACTIUNE REGENERANTA.
- Tratamentul uscaciunii vulvo-vaginale indiferent de cauza (stres, menopauza) - ACTIUNE HIDRATANTA.
- Tratamentul durerii in timpul contactului sexual (dispareunie) - ACTIUNE LUBRIFIANTA.

CONDITII DE UTILIZARE

- **AGENT HIDRATANT – REGENERANT:** aplicati intern de 2 sau 3 ori pe saptamana, pana la disparitia simptomelor. Se poate aplica extern o cantitate mica, daca este nevoie.
- **LUBRIFIANT:** 1 aplicare, in momentul contactului sexual sau chiar inainte. Compatibil cu prezervativele.

CUM SE UTILIZEAZA

Desurubati capacul, apoi folositi varful sau pentru a strapunge sigiliul de siguranta de pe tub.

- Insurubati aplicatorul pe orificiul tubului.
- Apasati usor tubul, tragand in acelasi timp de piston pana se blocheaza, pentru a obtine o doza de gel. Desurubati aplicatorul de pe tub.
- Introduceti aplicatorul profund in vagin. Impingeti apoi usor pistonul pentru a administra toata doza de gel. Daca este nevoie, gelul poate fi aplicat cu degetul pe zona intima externa.
- Dupa fiecare utilizare, asigurati-va ca tubul este bine inchis si ca aplicatorul este curat, astfel: demontati pistonul din aplicator.
- Curatati cu apa calda si lasati sa se usuce.



ATENȚIONARI

Nu utilizați în caz de hipersensibilitate cunoscută la unul sau mai multe componente.

Nu sunt disponibile date privind utilizarea **LYSELLE HA gel vaginal** în timpul sarcinii sau alăptării sau în asociere cu alte tratamente ginecologice.

Doar pentru utilizare personală și individuală. Evitați contactul cu ochii.

Nu lăsați la îndemână copiilor.

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat. Nu utilizați după data de expirare.

A se păstra la temperatura camerei.

Închideți cu grijă tubul după fiecare utilizare.

LYSELLE HA nu este un contraceptiv.

EFECTE NEDORITE

În timpul utilizării, este posibil să apară senzații ocazionale de înțepături sau căldură intensă la nivelul mucoasei afectate. Aceste senzații sunt reversibile.

COMPOZITIE

Hialuronat de sodiu, fosfolipide, acetat de vitamina E, agenți gelatinizanti și stabilizatori, apă purificată qs ad 100, conservanți.