

REVEASOL

cremă

Dispozitiv medical

Instructiuni de utilizare - Vă rugăm citiți cu atenție

Citiți cu atenție aceste informații înainte de a începe să utilizați Reveasol cremă.

NU ARUNCAȚI ACEST PLIANT! El conține informații importante. Dacă aveți orice întrebări despre Reveasol, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau Egis Pharmaceuticals PLC.

1. Ce este Reveasol și pentru ce se utilizează

Reveasol este un dispozitiv medical. Se prezintă sub formă de cremă de culoare albă, fără steroizi, destinată tratamentului și prevenirii simptomelor psoriazisului și dermatitei.

Reveasol conține Ectoin®, o moleculă naturală de protecție a celulelor, cu proprietăți de reducere a inflamației și de stabilizare a membranei.

Reveasol susține eliminarea naturală a celulelor moarte de pe suprafața pielii și, prin aceasta, reduce rugozitatea și rigidizarea plăcilor de psoriazis. În plus, reduce descuamarea, senzația de mâncărime și înroșirea pielii.

Reveasol stabilizează funcția de barieră a pielii și ajută la normalizarea producției de celule și a timpului de supurare la nivelul pielii.

Crema hidratează pielea și previne deshidratarea ulterioară.

Reveasol ameliorează și calmează pielea iritată și deteriorată prin reducerea reacțiilor inflamatorii și susținerea procesului de regenerare.

2. Atenționări și precauții

- A nu se utiliza pe pielea infectată.
- **Nu lăsați la vederea și îndemâna copiilor.**

- A nu se utiliza mai mult de 6 luni după deschidere.
- Crema nu trebuie utilizată în caz de hipersensibilitate la Ectoin® sau la oricare dintre celelalte componente ale cremei. Dacă apar reacții alergice, intrerupeți imediat utilizarea.
- Produsul trebuie utilizat individual, numai de către o singură persoană.
- Produsul trebuie utilizat numai pentru aplicare locală pe piele.

3. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza Reveasol

Nu există date disponibile cu privire la interacțiunile dintre Reveasol și alte creme, prin urmare nu se recomandă utilizarea concomitentă cu alte creme.

4. Cum se utilizează Reveasol

Utilizați întotdeauna Reveasol conform acestor instrucțiuni de utilizare. Dacă medicul dumneavoastră nu vă prescrie altfel, Reveasol trebuie aplicat prin masare ușoară pe zonele afectate ale pielii, de trei ori pe zi sau în funcție de necesitate.

Dacă starea pielii se agravează în timpul tratamentului sau dacă nu se îmbunătățește chiar și după un tratament de lungă durată, intrerupeți tratamentul și consultați medicul dumneavoastră.

5. Posibile reacții adverse ale Reveasol

Reveasol este bine tolerat. Până în prezent, nu se cunosc reacții adverse trecătoare sau persistente. În cazuri izolate, pot apărea unele senzații locale de scurtă durată, de arsură, roșeață sau mâncărime. Vă rugăm să informați medicul dumneavoastră, farmacistul sau distribuitorul dacă observați orice reacții adverse asociate cu utilizarea Reveasol.

Dacă acestea persistă sau se agravează, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

6. Cum se păstrează Reveasol

Data de expirare a Reveasol este indicată pe cutie și tub. Reveasol nu trebuie utilizat după data de expirare. Reveasol se păstrează la temperaturi cuprinse între 2°C și 25°C.

7. Informatii suplimentare

În prezent, nu există date privind utilizarea Reveasol în timpul sarcinii și alăptării.

Consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul pentru sfaturi înainte de a utiliza acest dispozitiv medical, dacă:

- sunteți gravidă sau alăptați
- nu sunteți sigură dacă sunteți gravidă sau nu

Reveasol este adekvat pentru tratamentul zilnic, de lungă durată chiar și pentru pielea sensibilă.

Nu conține coloranți, parfumuri și conservanți.

Reveasol este adekvat utilizării la sugari și copii.

Copiii și adulții care nu pot utiliza Reveasol singuri trebuie să fie ajutați în timpul aplicării Reveasol.

8. Conținutul ambalajului Reveasol

Tub de aluminiu de 30 ml

Ingrediente

Ectoin®, Apă, Alcool cetearilic, Uree, Izononanoat de cetearil, Glicerină, Ulei de semințe de *Simmondsia Chinensis*, Polidecen hidrogenat, Pentilenglicol, Hidroxietil Uree, Pantenol, Glucozid cetearilic, Lecitină, Alantoină, Gumă de xantan, Etilhexilglicerină, Lactat de sodiu, Cetearil sulfat de sodiu, Triacetină.

9. Deținătorul Autorizației de punere pe piață / Producătorul

 bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Germania

Distribuitor

Egis Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38,
1106 Budapesta, Ungaria

Raportați orice incident asociat cu utilizarea produsului la adresa de e-mail help@egis.hu

10. Data informației:

15/04/2021

	Marcaj CE cu numărul organismului notificat
	Producător
	Numărul lotului
	Până la data (Data expirării) sau EXP
	Vă rugăm să luați în considerare instrucțiunile de utilizare
	Temperatura limită de păstrare
	Perioada de utilizare după deschidere