

Flamozil®

Gel hidrocoloidal pentru răni
Fără parabeni

Indicații

Flamozil® este un gel hidrocoloidal fără parabeni indicat în tratamentul rănilor locale, uscate sau umede. Flamozil® este un dispozitiv medical care facilitează în mod indirect vindecarea ranilor prin reglarea micromediului răni. A se folosi în cazul rănilor acute sau cronice de tipul:
arsuri superficiale | zgârieturi ale pielii | răni chirurgicale | Escare (decubitus) | răni deschise la picioare (ulcere). Flamozil® poate fi utilizat și în ulceratii și răni ale picioarelor apărute ca urmare a diabetului. Diabeticii cu probleme ale picioarelor trebuie să consulte medicul înainte de a începe să utilizeze Flamozil®.

Proprietăți și compoziție

Flamozil® este compus dintr-un carbomer acid stabilizat de carnozină, o peptidă bazică prezentă în mod natural în piele. Aplicat pe rănille închise (zgârieturi, plăgi chirurgicale) acest carbomer are un efect de ocluziune: împiedică evaporarea apei și micșorează pierderea de lichid din epidermă. Carnozina protejează acidul polimeric și acționează ca și antioxidant. Carbomerul absoarbe excesul de lichid din răni umede, exudative. Flamozil® răcorește și alină contactul cu plasturi și / sau bandaje și este non-adeziv. **Compoziție:** carbomer acidico coloidal, carnozină, apă, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu.

Instructiuni de folosire

- Răni închise:*
- Curățați și dezinfectați zona care trebuie tratată
 - Se aplică Flamozil® pe rană, fără a atinge rana cu tubul
 - Se aplică un bandaj sau plasture, dacă este necesar.
- Răni deschise:*
- Curățați și dezinfectați rana
 - Tamponați ușor până la uscare
 - Se aplică un strat gros (0,5-0,75 cm), pe rană, fără a atinge rana cu tubul
 - Se aplică un bandaj sau plasture
 - Se reaplică gel și/ sau bandaj /plasture cel puțin zilnic
 - Se reduce aplicarea Flamozil® odată ce apare o crustă pe rană.

Atenție - Arsuri: în primul rând se curăță cu apă, apoi se urmează ceilalți pași.

Flamozil® nu este prima măsură în caz de arsuri! Se răcește **imediat** rana pentru cca. douăzeci de minute sub jet de apă caldută. Acest lucru trebuie să se facă cât mai repede posibil, deoarece efectul benefic al apei scade și dispare după 30 de minute. Pentru a se evita pericolul de hipotermie, utilizarea apei reci, mai ales atunci când arsura acoperă o suprafață mare, nu este recomandată. Utilizați numai Flamozil® mai târziu, odată ce gravitatea arsurii a fost evaluată în mod corespunzător. Flamozil® poate fi folosit pe arsuri superficiale: arsuri implicând epiderma și / sau derma, de obicei caracterizate prin umflarea, înroșirea pielii și bășici.

Precauții speciale

Nu folosiți dacă sunteți hipersensibil sau alergic la oricare dintre ingrediente. În cazuri foarte rare, a fost raportată iritație. În cazul în care apar iritații sau o reacție alergică, opriți imediat tratamentul. Nu utilizați Flamozil® pe fata, ochi, pleoape sau mucoase. Consultați întotdeauna un medic

- Pentru răni mai mari, extinse sau foarte profunde
- răni mici, foarte infectate
- În cazuri de vindecare lentă sau risc de complicații.

În astfel de cazuri, Flamozil® poate fi, de asemenea, de ajutor, dar nu este de ajuns ca singurul tratament. Doar pentru uz extern. Nu utilizați produsul după data de expirare (a se vedea pachetul).

Condiții de depozitare

A se păstra între 5 și 25° C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaje

Flamozil® este disponibil la spray, dispenser sau tub. Este posibil ca nu toate tipurile de ambalaj să fie disponibile pe piață.

[Specific pentru Flamozil® spray:]



La prima utilizare, jetul poate fi prea puternic. Mai întâi, încercați spray-ul (de exemplu, în palmă deschisă pe jumătate) înainte de a îndrepta spre rană.

înseamnă că dispenserul îndeplinește cerințele Directivei pentru dispenseri de aerosoli 75/324 / CEE și pe cele din anexa acesteia.



Oystershell NV

Nijverheidsweg 10

9820 Merelbeke

BELGIUM

Laatste wijziging van deze bijsluiter: **maart 2019**

Last modification of this information leaflet: **March 2019**

Dernière modification de cette notice: **Mars 2019**

Ultima modificare a acestui prospect: **martie 2019**

50 / 75g e CE

1574/620377/19C/07020387/0

Verklaring symbolen - Explanation of the symbols - Explication des symboles - Semnificația simbolurilor			
	Temperatuurgrens Temperature limit Limite de température Limită de temperatură		Houdbaarheidsdatum Use-by date Date de péremption A se utiliza până la data de
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik Consult instructions for use Consulter le mode d'emploi A se citi prospectul înainte de utilizare		Fabrikant Manufacturer Fabricant Producător
	Opgelet Caution Attention Atenție	Alleen voor de spray - For spray only Pour les sprays uniquement - Doar pentru spray	
			Droog houden Keep dry Tenir au sec A se ține la loc uscat
			Uit de zon houden Keep away from sunlight Conserver à l'abri du soleil A se feri de lumina soarelui
	Batchcode Batch code Numéro de lot Lotul de fabricație		