



Ocean

BIO-ACTIF

Protect +

- Ameliorează simptomele în 1 zi
- Previne infecțiile secundare
- Îmbunătățește respirația nazală

Mucoasa nazală reprezintă prima linie de apărare împotriva virusurilor și bacteriilor responsabile de afecțiunile obișnuite de iarnă (răceală, rinită, sinuzită).

DOVEDIT CLINIC

Efficient încă din prima zi de utilizare.

89%
dintre
participanți

**confirmă îmbunătățirea
simptomelor de răceală**

*Evaluare cu 53 de participanți
după 3 zile de tratament.*



Pulverizarea delicată a acestui produs asigură o umidificare sigură și eficientă.

100% naturală și fără conservanți, formula brevetată Protect+ combină beneficiile recunoscute ale apei de mare hipertonică* cu extractul de alge brune, pentru a reduce simptomele în doar o zi și a preveni infecțiile secundare.

Apa de mare

utilizată în formula Protect+ provine de pe coasta Breteniei, din Franța, dintr-o zonă naturală protejată.



COMPOZIȚIE

Apă de mare ușor hipertonică* (99,9%): Soluție de apă de mare care conține oligoelemente și minerale marine prezente în mod natural (clorură, sodiu, magneziu, sulf, calciu, potasiu).

Extract de *Ascophyllum nodosum* (0,1%): o algă brună cu proprietăți hidratante.

Formulă brevetată, fără conservanți

**soluție diluată cu apă purificată, concentrație de NaCl mai mare decât cea din celulele umane (15 g/L)*

CÂND SE UTILIZEAZĂ SPRAY-UL PROTECT+

Pentru un plus de confort, utilizați la temperatura camerei.

Prevenire: 1–2 pulverizări pe zi în fiecare nară.

Tratament: 1–2 pulverizări în fiecare nară, de 3-4 ori pe zi, până la dispariția simptomelor.

Începând cu vârsta de 3 ani

Calea de administrare: nazală.
Dispozitiv medical de clasa I.

CUM SE UTILIZEAZĂ SPRAY-UL PROTECT+?

- Scoateți capacul de protecție.
- Înainte de prima utilizare, apăsați pompa de câteva ori pentru a o amorsa în poziție verticală.
- Introduceți vârful duzei în nară.
- Apăsați pe pompă.
- Repetați procedura cu cealaltă nară.
- Suflați-vă nasul pentru a îndepărta excesul de lichid, dacă este necesar.
- Pentru a evita orice risc de contaminare, curățați vârful duzei cu apă caldă și săpun, clătiți și uscați înainte de a depozita produsul.

PRECAUȚII DE UTILIZARE

- Un spray pe persoană.
- Utilizarea spray-ului poate provoca o ușoară senzație de furnicătură sau chiar o sângerare nazală foarte ușoară. Aceste efecte sunt inofensive și vor dispărea rapid.

- A nu se utiliza după data de expirare.
- Copiii cu vârsta sub 10 ani trebuie supravegheați de un adult.
- Dacă aveți îndoieli sau dacă simptomele persistă, adresați-vă farmacistului sau medicului.
- În cazul unui incident asociat cu utilizarea dispozitivului medical, contactați un profesionist din domeniul sănătății, precum și autoritatea competentă locală.
- A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se păstra la temperaturi cuprinse între 8 °C și 35 °C. Vă rugăm să eliminați acest produs în conformitate cu normele locale de sortare a deșeurilor și să respectați mediul înconjurător.



YSLAB
2 rue Félix le Dantec
29000 Quimper - FRANCE
Produs în Franța
www.oceanbioactif.com



Distribuitor: EUROMEDEX
24, rue des Tuileries
67460 Souffelweyersheim, Franța
Pentru informații în România vă rugăm să contactați: Telefon : 0745 038 006
Email: medinfo_romania@euromedex.com

Data aplicării
marcajului CE: 2016

