

XYMINAL®

Ovule vaginale cu MIO-INOZITOL și pH 6

COMPOZIȚIE

Fiecare ovul vaginal de 1 g conține: mio-inozitol 2,00 mg; gliceride de semisinteză 998,00 mg.

CLASIFICARE

Fiecare ovul este un dispozitiv medical de unică utilizare.

AMBALAJ

3 ovule vaginale a 1 g fiecare.



INFORMAȚII CLINICE

PROCESUL DE CONCEPȚIE

Caracteristicile lichidului seminal și ale ecosistemului cervico-vaginal sunt printre factorii determinanți ai procesului de fertilizare. În particular, faza ciclului menstrual, aspectul mucusului cervical, temperatura bazală și utilizarea dispozitivelor electronice de monitorizare a hormonilor sunt indicatori folosiți pentru a identifica cele mai fertile zile ale femeii. Mucusul cervical apare la începutul fazei ovulatorii a ciclului menstrual (între zilele 9-11 ale ciclului). Mucusul își schimbă aspectul, devenind din ce în ce mai abundent, fluid și gelatinos, până la ovulație (zilele 13-15), iar apoi scade treptat. La ovulație, mucusul fluid, transparent și abundent ajută spermatozoizii să ajungă la ovul. Lichidul seminal este astfel mai bine protejat de pH-ul acid din vagin: pH-ul relativ alcalin al mucusului vaginal protejează sperma și vitalitatea spermatozoizilor.

PROPRIETĂȚI

XYMINAL® conține mio-inozitol, a cărui utilizare locală creează condițiile optime pentru fertilizarea ovulului. Mio-inozitolul contribuie la fluidizarea mucusului cervical și a lichidului seminal, facilitând migrarea spermatozoizilor spre ovul. Mio-inozitolul protejează spermatozoizii de acțiunea speciilor reactive de oxigen (SRO) prezente în mod natural în mediul vaginal, datorită proprietăților sale antioxidante. XYMINAL® asigură un pH optim pentru vitalitatea spermatozoizilor, reducând aciditatea vaginală responsabilă de inactivarea spermatozoizilor.

INDICAȚII

XYMINAL® crește șansele de fertilizare și de sarcină în cicluri spontane sau induse, prin crearea condițiilor favorabile motilității spermatozoizilor. Utilizarea XYMINAL® de către femei, împreună cu planificarea atentă a contactului sexual, ajută cuplurile să conceapă un copil.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate cunoscută la componente.

EFECTE SECUNDARE

În unele cazuri, poate apărea intoleranță (senzație de arsură sau iritație), care nu are totuși alte consecințe și nu necesită modificarea tratamentului. Spuneți medicului sau farmacistului despre orice efecte nedorite pe care le suspectați ca urmare a utilizării produsului.

INCOMPATIBILITĂȚI/INTERACȚIUNI

Până în prezent, nu există interacțiuni cunoscute cu alte dispozitive, substanțe sau medicamente.

EFECTE ASUPRA CAPACITĂȚII DE A CONDUCE VEHICULE SAU DE A FOLOSI UTILAJE

Nu au fost raportate efecte asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Spălați-vă bine pe mâini înainte de a utiliza produsul.

Introduceți cu grijă un ovul în vagin, o dată la 2 zile, preferabil seara înainte de culcare, în timpul fazei periovulatorii (din ziua 11 până în ziua 16 a unui ciclu obișnuit de 28 de zile), care poate fi identificată utilizând dispozitive electronice de monitorizare a hormonilor și/sau evaluarea directă a mucusului cervical. Programați contactul sexual la minimum 6 ore după introducerea ovulului vaginal.

SUPRADOZAJ

Până în prezent, nu au fost raportate simptome de supradozaj.



ATENȚIONĂRI

Utilizarea vaginală a produsului, în special prelungită, poate determina sensibilizare. Produsul trebuie administrat doar vaginal. Nu utilizați produsul dacă sunteți alergică la oricare dintre componentele sale. Nu utilizați produsul după data de expirare. Nu utilizați produsul dacă cutia și/sau blisterul nu sunt intacte. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se înghiți. Orice incident grav apărut în legătură cu acest dispozitiv medical trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru unde vă aflați.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PĂSTRARE

A se păstra la temperatura camerei (≤ 25 °C), ferit de lumină, în loc răcoros și uscat.

ELIMINARE

Nu există cerințe speciale de eliminare a produsului. Verificați reglementările locale în vigoare.

Producator: Lo.Li. Pharma S.r.l., Via Sabatino Gianni, 14 - 00156 Roma – Italia