

DUREX ORIGINALS



durex

ACUM TOATE PREZERVATIVELE DUREX **AU ACEEAȘI DISPUNERE**



PENTRU MAI PUȚINĂ PRESIUNE & **MAI MULTĂ PLĂCERE**

Prezervativ Durex Originals


Durex Originals oferă aceeași încredere și protecție din 1929, într-o formă netedă, cu lubrifianț din silicon pentru o experiență mai plăcută în timpul actului sexual.



- Forma anatomică Easy-On cu rezervor pentru confort
- Prezervative transparente din cauciuc natural (latex)
- Diametru nominal: 56 mm
- Lubrifiere: lubrifianț silionic standard
- Testate dermatologic*;
- 100% testat electronic**;

*potrivit unui studiu de toleranță cutanată realizat în 2018

** Toate prezervativele Durex sunt testate pentru a depista defectele de fabricație

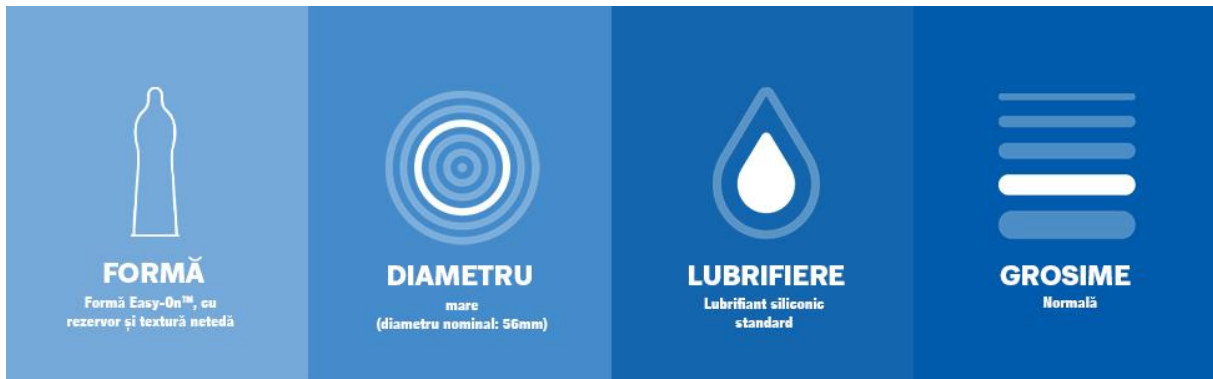

CU FORMA



EASY-ON™



Calitate Durex

Durex întrunește standardele internaționale de calitate***, lăsându-ți posibilitatea de a te bucura de experiențe sexuale, fără bătaie de cap.
***EN ISO 15233-1: 2016; EN 1041: 2008 + A1:2013; EN ISO 10993-1: October 2009; EN ISO 13485: 2016; EN ISO 14971: 2012; EN ISO 4074: 2015.

Pleasure fit

Concepute special pentru tine, proiectate pentru a-ți urma forma, pentru o experiență mai confortabilă și mai plăcută.

Miros mai bine

Prezervativele Durex miros mai bine datorită modului în care sunt fabricate, respectând cerințele și standardele internaționale

Utilizare:



Pasul 1

Rupe ambalajul pornind de la o latură zimțată și scoate cu grijă prezervativul, deoarece poate fi deteriorat de unghii sau obiecte ascuțite (bijuterii sau piercing-uri). A se verifica data de expirare de pe ambalajul individual înainte de utilizare.



Pasul 2

Verifică dacă prezervativul este rulat spre exterior. Dacă este rulat spre interior, înseamnă că este pe dos. Strânge capătul închis al prezervativului pentru a te asigura că nu rămâne aer în interior.



Pasul 3

Continuând să strângi capătul închis, așază prezervativul pe vârful penisului și rulează-l în jos cu cealaltă mână. Dacă începe să se ruleze înapoi în timpul actului sexual, rulează-l la loc imediat. Dacă iese cu totul, oprește-te și pune alt prezervativ. Imediat după ejaculare, cât timp penisul este încă în erecție, prezervativul trebuie ținut ferm la baza penisului, înainte de retragere, pentru a preveni alunecarea. Prezervativele prea largi sau prea strâmte se pot rupe.



Pasul 4

Dupa retragerea penisului, scoate pur și simplu prezervativul, împachetează-l într-un șervețel și aruncă-l în coșul de gunoi. Nu îl arunca în toaletă.

Citește cu atenție informațiile despre produs, inscripționate pe partea interioară a pachetului, mai ales dacă folosești prezervativele pentru sex anal sau oral. Folosește un prezervativ o singură dată. Nicio metodă contraceptivă nu oferă protecție 100% împotriva sarcinii, HIV, sau a infecțiilor cu transmitere sexuală.

Prezervativele Durex sunt dispozitive medicale. Referitor la riscuri, citește precauțiile și instrucțiunile de utilizare sau întreabă-ți medicul!

Consultați medicul sau farmacistul dacă: utilizați unguente medicinale, aplicate pe penis sau vagin; senzația de iritare/disconfort persistă după utilizare; nu sunteți sigur dacă sunteți alergic la latex; un prezervativ prezintă scurgeri sau se rupe în timpul utilizării (acest lucru se face cât mai curând posibil, în termen de maxim 72 de ore); tu sau partenera ta experimentați dificultăți respiratorii sau aveți buzele albastre.

Alege prezervativul Durex potrivit tine:

	 Prezervative Durex Originals	 Prezervative Durex Feel Intimate	 Prezervative Durex Reel Feel	 Prezervative Durex Invisible	 Prezervative Durex Pleasure Me	 Prezervative Durex Intense
Ambalare	3/18 buc	12/18 buc	3/10/16 buc	10 buc	3/12 buc	3/10/16 buc
Lubrifiere		 extra lubrifiat				 extra lubrifiat
Formă						
Fără latex	x	x	✓	x	x	x
Circumferință	 56 mm	 56 mm	 56 mm	 54 mm	 56 mm	 56 mm
Grosime (micron)	 normală ≥65<75	 subtire ≥55<65	 normală ≥65<75	 extra subtire ≥45<55	 mare ≥75	 normală ≥65<75

Despre Durex:

Cu peste 90 de ani de experiență, Durex reprezintă o marcă de încredere pentru milioane de oameni din întreaga lume, în fiecare zi. Durex întrunește toate standardele de calitate pentru prezervative la nivel mondial, oferindu-ți încredere pentru o viață sexuală fără griji. Fiecare prezervativ este testat electronic pentru eliminarea defecțiunilor și a fisurilor. Toate prezervativele Durex sunt fabricate prin tehnologia „Easy on”, datorită căreia prezervativul poate fi aplicat ușor și repede, fiind totodată mai confortabil.

