

**Durex Extra Safe**



ACUM TOATE PREZERVATIVELE DUREX AU ACEEAȘI DISPUNERE



PENTRU MAI PUȚINĂ PRESIUNE & MAI MULTĂ PLĂCERE

### Prezervativele Durex Extra Safe


Rămâi protejat și concentrează-te pe senzațiile din timpul actului sexual. Disponând de lubrifiere suplimentară și un material puțin mai gros, prezervativele Durex Extra Safe sunt menite să te ferească de griji, pentru a rămâne concentrat pe plăcere.



- Forma anatomică Easy-On cu rezervor pentru confort
- Prezervative transparente din cauciuc natural (latex)
- Diametru nominal: 56 mm
- Lubrifiere: lubrifiant silionic suplimentar
- Prezervative mai groase
- Testate dermatologic;\*
- 100% testat electronic\*\*

\*Potrivit unui studiu de toleranță cutanată realizat în 2018

\*\*Toate prezervativele Durex sunt testate pentru a depista defectele de fabricație

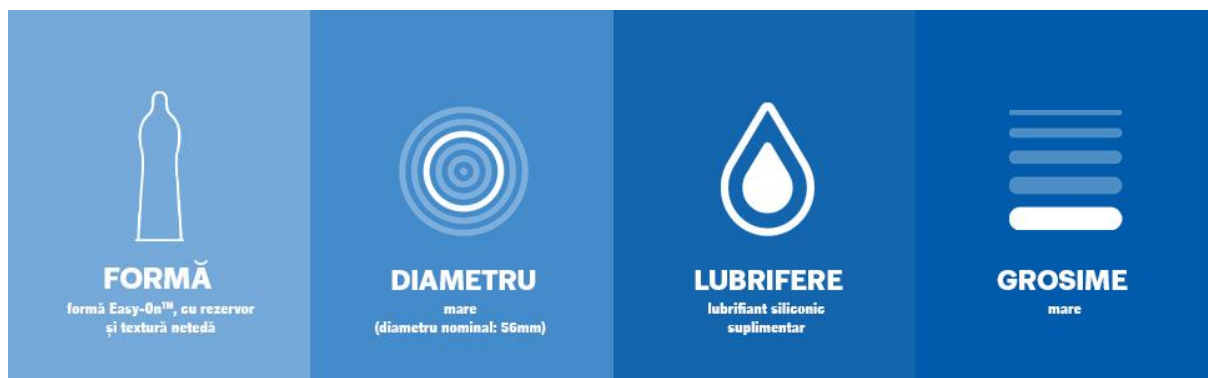

CU FORMA



EASY-ON™



### Extra Safe

Prezervative puțin mai groase pentru a-ți oferi încrederea și protecția de care ai nevoie.

### Calitate Durex

Durex întrunește standardele internaționale de calitate\*\*\*, lăsându-ți posibilitatea de a savura experiențe sexuale excelente, fără bătaie de cap.  
 \*\*\*EN ISO 15223-1:2016; EN 1041: 2008 +A1: 2013; EN ISO 10993-1:October 2009; EN ISO 13485:2016; EN ISO 9001:2008; EN ISO 14971:2012; EN ISO 4074:2015

### Pleasure fit

Concepute special pentru tine și proiectate pentru a-ți urma forma, pentru o experiență mai confortabilă și mai plăcută.

### Miros mai bine

Prezervativele Durex miros mai bine datorită modului în care sunt fabricate, respectând cerințele și standardele internaționale.

Utilizare:



### **Pasul 1**

Rupe ambalajul pornind de la o latură zimțată și scoate cu grijă prezervativul, deoarece poate fi deteriorat de unghii sau obiecte ascuțite (bijuterii sau piercing-uri). A se verifica data de expirare de pe ambalajul individual înaintea utilizării.



### **Pasul 2**

Verifică dacă prezervativul este rulat spre exterior. Dacă este rulat spre interior, înseamnă că este pe dos. Strânge capătul închis al prezervativului pentru a te asigura că nu rămâne aer în interior.



### **Pasul 3**

Continuând să strângi capătul închis, așază prezervativul pe vârful penisului și rulează-l în jos cu cealaltă mână. Dacă începe să se ruleze înapoi în timpul actului sexual, rulează-l la loc imediat. Dacă iese cu totul, oprește-te și pune alt prezervativ. Imediat după ejaculare, cât timp penisul este încă în erecție, prezervativul trebuie ținut ferm la baza penisului, înaintea retragerii acestuia, pentru a preveni alunecarea. Prezervativele prea largi sau prea strâmte se pot rupe.



### **Pasul 4**

Dupa retragerea penisului, scoate pur și simplu prezervativul, împachetează-l într-un șervețel și aruncă-l în coșul de gunoi. Nu îl arunca în toaletă

## Alege prezervativul Durex potrivit tine:

						
	Prezervative Durex Originals	Prezervative Durex Feel Intimate	Prezervative Durex Reel Feel	Prezervative Durex Invisible	Prezervative Durex Pleasure Me	Prezervative Durex Intense
Ambalare	3/18 buc	12/18 buc	3/10/16 buc	10 buc	3/12 buc	3/10/16 buc
Lubrifiere		 extra lubrifiat				 extra lubrifiat
Formă						
Fără latex	X	X	✓	X	X	X
Circumferință	 56 mm	 56 mm	 56 mm	 54 mm	 56 mm	 56 mm
Grosime (micron)	 normală ≥65<75	 subțire ≥55<65	 normală ≥65<75	 extra subțire ≥45<55	 mare ≥75	 normală ≥65<75

## Despre Durex:

Cu peste 90 de ani de experiență, Durex reprezintă o marcă de încredere pentru milioane de oameni din întreaga lume, în fiecare zi. Durex întrunește toate standardele de calitate pentru prezervative la nivel mondial, oferindu-ți încredere pentru o viață sexuală fără griji. Fiecare prezervativ este testat electronic pentru eliminarea defecțiunilor și a fisurilor. Toate prezervativele Durex sunt fabricate prin tehnologia „Easy on”, datorită căreia prezervativul poate fi aplicat ușor și repede, fiind totodată mai confortabil.

