

Feel Intimate



ACUM TOATE PREZERVATIVELE DUREX AU ACEEAȘI DISPUNERE



PENTRU MAI PUȚINĂ PRESIUNE & MAI MULTĂ PLĂCERE

Prezervativ Durex Feel Intimate


Durex Feel Intimate este un prezervativ de calitate superioară, foarte subțire și vine cu o doză suplimentară de lubrifiant, pentru un confort maxim în timpul actului sexual.



- Forma anatomică Easy-On cu rezervor pentru confort
- Prezervative transparente din cauciuc natural (latex)
- Diametru nominal: 56 mm
- Lubrifiere: lubrifiant siliconic suplimentar
- Testate dermatologic;*
- 100% testat electronic;**

*Potrivit unui studiu de toleranță cutanată realizat în 2018

** Toate prezervativele Durex sunt testate pentru a depista defectele de fabricație

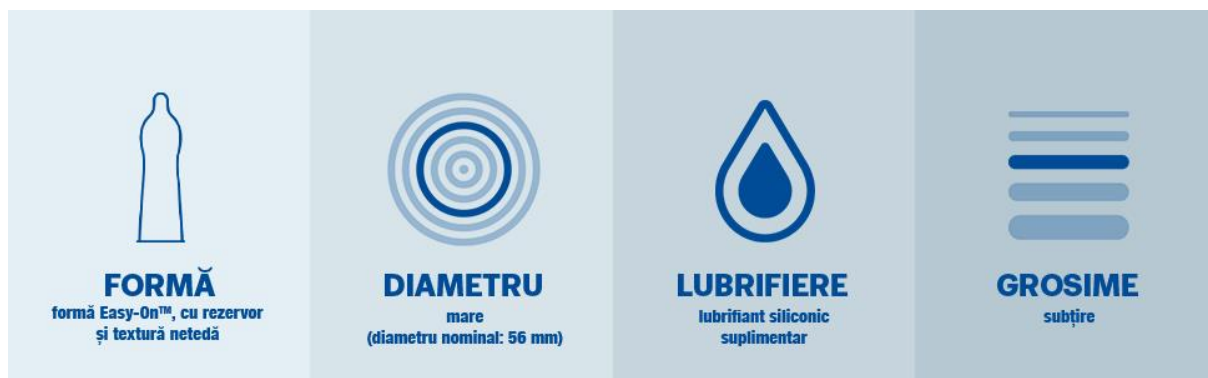

Subțire, cu lubrifiere suplimentară pentru o senzație naturală

Prezervativele Feel Intimate sunt subțiri, cu lubrifiere suplimentară, oferind astfel o senzație naturală și crescând plăcerea. Ultra fine, lubrifiere suplimentară, pentru plăcere sporită.



Calitate Durex

Durex întrunește standardele internaționale de calitate***, lăsându-ți posibilitatea de a savura experiențe sexuale excelente, fără bătaie de cap. ***EN ISO 15223-1: 2012; EN 1041: 2008; EN ISO 10993-1: Oct 2009; EN ISO 13485: 2012; EN ISO 9001:2008; EN ISO 14971: 2012; EN ISO 4074:2015



EASY-ON™

Pleasure fit

Concepute special pentru tine, proiectate pentru a-ți urma forma, pentru o experiență mai confortabilă și mai plăcută.



Miros mai bine

Prezervativele Durex miros mai bine datorită modului în care sunt fabricate, respectând cerințele și standardele internaționale.

Utilizare:



Pasul 1

Rupe ambalajul pornind de la o latură zimțată și scoate cu grijă prezervativul, deoarece poate fi deteriorat de unghii sau obiecte ascuțite (bijuterii sau piercing-uri). A se verifica data de expirare de pe ambalajul individual înaintea utilizării.

Pasul 2

Verifică dacă prezervativul este rulat spre exterior. Dacă este rulat spre interior, înseamnă că este pe dos. Strânge capătul închis al prezervativului pentru a te asigura că nu rămâne aer în interior.

Pasul 3

Continuând să strângi capătul închis, așază prezervativul pe vârful penisului și rulează-l în jos cu cealaltă mână. Dacă începe să se ruleze înapoi în timpul actului sexual, rulează-l la loc imediat. Dacă iese cu totul, oprește-te și pune alt prezervativ. Imediat după ejaculare, cât timp penisul este încă în erecție, prezervativul trebuie ținut ferm la baza penisului, înaintea retragerii acestuia, pentru a preveni alunecarea. Prezervativele prea largi sau prea strâmte se pot rupe.

Pasul 4

Dupa retragerea penisului, scoate pur și simplu prezervativul, împachetează-l într-un șervețel și aruncă-l în coșul de gunoi. Nu îl arunca în toaletă.

Citește cu atenție informațiile despre produs, inscripționate pe partea interioară a pachetului, mai ales dacă folosești prezervativele pentru sex anal sau oral. Folosește un prezervativ o singură dată. Nicio metodă contraceptivă nu oferă protecție 100% împotriva sarcinii, HIV, sau a infecțiilor cu transmitere sexuală.

Prezervativele Durex sunt dispozitive medicale. Referitor la riscuri, citește precauțiile și instrucțiunile de utilizare sau întreabă-ți medicul!

Consultați medicul sau farmacistul dacă: utilizați unguente medicinale, aplicate pe penis sau vagin; senzația de iritare/disconfort persistă după utilizare; nu sunteți sigur dacă sunteți alergic la latex; un prezervativ prezintă scurgeri sau se rupe în timpul utilizării (acest lucru se face cât mai curând posibil, în termen de maxim 72 de ore); tu sau partenera ta experimentați dificultăți respiratorii sau aveți buzele albastre.

Alege prezervativul Durex potrivit tine:

	 Prezervative Durex Originals	 Prezervative Durex Feel Intimate	 Prezervative Durex Real Feel	 Prezervative Durex Invisible	 Prezervative Durex Pleasure Me	 Prezervative Durex Intense
Ambalare	3/18 buc	12/18 buc	3/10/16 buc	10 buc	3/12 buc	3/10/16 buc
Lubrifiere		 extra lubrifiat				 extra lubrifiat
Formă						
Fără latex	X	X	✓	X	X	X
Circumferință	 56 mm	 56 mm	 56 mm	 54 mm	 56 mm	 56 mm
Grosime (micron)	 normală ≥65<75	 subțire ≥55<65	 normală ≥65<75	 extra subțire ≥45<55	 mare ≥75	 normală ≥65<75

Despre Durex:

Cu peste 90 de ani de experiență, Durex reprezintă o marcă de încredere pentru milioane de oameni din întreaga lume, în fiecare zi. Durex întrunește toate standardele de calitate pentru prezervative la nivel mondial, oferindu-ți încredere pentru o viață sexuală fără griji. Fiecare prezervativ este testat electronic pentru eliminarea defecțiunilor și a fisurilor. Toate prezervativele Durex sunt fabricate prin tehnologia „Easy on”, datorită căreia prezervativul poate fi aplicat ușor și repede, fiind totodată mai confortabil.

