

Dermatess Ideal - Bandaj elastic

Caracteristici: bandaj elastic „ideal” pentru fixare și susținere. Se blochează cu ajutorul carligelor de prindere. Lavabil. Extensibilitate aproximativ 75%. **Indicații:** pentru fixarea pansamentelor și pentru susținere în caz de entorse și vânătași ușoare. **Compoziție:** Bumbac 65%, Poliamida 35%.

Atenție!

A nu se utiliza în caz de tulburări de circulație arterială, insuficiență cardiacă decompensată, flebită septică sau boală arterială obliterantă a membrelor inferioare (stadiul III și IV). Nu utilizați bandajul peste noapte sau în condiții de repaus absolut, dacă nu este indicat altfel de către medic. Nu utilizați bandajul pe răni deschise sau în apropierea rănilor deschise.

Sugestii de bandajare

Tehnica de bandajare ilustrată în prospect este doar o recomandare. Se recomandă ca bandajul să fie aplicat pentru prima dată de către un cadru medical sau paramedical de specialitate, sau sub supravegherea acestor profesioniști. Lățimea bandajului trebuie aleasă în funcție de regiunea corpului care urmează să fie tratată.

Va rugăm să raportați producătorului, distribuitorului și autorității competente din România orice incident grav care are loc în legătură cu acest dispozitiv medical.