

GHIACCIO SPRAY® ICE SPRAY - EFECT DE RĂCIRE PENTRU CONTUZII

Utilizare: Terapie acută pentru leziuni externe, cum ar fi contuzii și entorse. Sprayul de gheață are un efect de răcire și ameliorează rapid durerea. **Instrucțiuni:** Stropul de gheață poate fi pulverizat direct în piele și nu în îmbrăcăminte, de la cel puțin 15 cm distanță, cu exploziile scurte și intermitente. Aparatul de gheață poate fi utilizat în mod repetat.

ATENȚIE!!! Extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: se poate sparge dacă este încălzit. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Păstrați departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Nu fumați. Evitați contactul cu ochii. Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu spargeți sau ardeți, chiar și după utilizare. Protejați de razele soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F. Nu aplicați la leziuni în cazul în care pielea este rănită. Utilizarea excesivă poate duce la înghețarea suprafeței pielii. Utilizați în conformitate cu instrucțiunile.

Ingrediente: Butan, Propan, Izobutan, Alcool Izopropilic, Izopropil Miristat, Mentol.

Vă rugăm să raportați producătorului, distribuitorului și autorității competente din România orice incident grav care are loc în legătură cu acest dispozitiv medical.

Distribuitor: Origo Medical DE Srl - Cluj Napoca, Str. Fântânele 18, T: 0264.416.565, M.: 0769.217.065

www.origomedical.ro