

# cerumina

## CERUMINA PICĂTURI AURICULARE

Picături pentru dizolvarea dopului de cerumen care se poate forma în canalul auditiv. Pentru refacerea și menținerea condițiilor fiziologice ale canalului auditiv. La persoanele predispuse, poate fi utilizat pentru prevenirea formării dopului de cerumen. **Instrucțiuni de utilizare:**

1. Introduceți picurătorul flaconului la intrarea canalului auditiv, evitând să-l împingeți prea adânc în ureche. 2. Apăsăți flaconul introducând 4 - 5 picături în fiecare ureche. 3. Pentru a împiedica scurgerea lichidului, introduceți în ureche un tampon de tifon sau bumbac. 4. Dacă după tratament cerumenul nu este complet îndepărtat, se recomandă repetarea operațiunii după câteva ore. 5. Pentru prevenirea formării dopului de cerumen, se recomandă utilizarea picăturilor Cerumina conform instrucțiunilor de mai sus cel puțin de două ori pe lună. **Avertizări:**

Picăturile Cerumina nu sunt un medicament și nu poate înlocui niciun tratament medical. Dacă cerumenul capătă caracteristica unei mase dure, este necesar să consultați medicul. Utilizați doar pe pielea intactă, nu utilizați în cazul unui timpan compromis sau perforat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru uz extern. **Ingrediente:** Ulei Olus, Dicapryyl carbonate, Diethylhexyl sodium sulfosuccinate, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl acetate, Ulei de mușețel (Chamomilla recutita). Raportați orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul producătorului și autorității competente din statul membru de referință.

**Distribuitor:** Origo Medical DE Srl - Cluj-Napoca, Str.

Fântânele 18, T: 0264.416.565, M: 0769.217.065

[www.origomedical.ro](http://www.origomedical.ro)