

## **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Această broșură cu instrucțiunile de utilizare (IU) conține informații importante referitoare la utilizarea și siguranța produsului. Citiți cu atenție și păstrați broșura pentru utilizare viitoare.

### **DENUMIREA PRODUSULUI:**

**Picături oftalmice lubrifiante TEARS NATURALE™II**

### **DESCRIERE:**

Picăturile oftalmice lubrifiante **TEARS NATURALE™II** sunt o soluție sterilă care conține Dextran 70, hidroxipropil metilceluloză, clorură de sodiu, clorură de potasiu, borat de sodiu și POLYQUAD™ (polyquaternium-1) 0,0011% conservant și apă purificată. Poate conține acid clorhidric și/sau hidroxid de sodiu pentru reglarea pH-ului.

### **BENEFICII CLINICE:**

Când se utilizează conform instrucțiunilor, picăturile oftalmice lubrifiante **TEARS NATURALE™II**:

- Ameliorează simptomele de uscăciune ușoară până la moderată a ochilor.

### **INDICAȚII (Utilizări):**

Picăturile oftalmice lubrifiante **TEARS NATURALE™II** sunt indicate pentru ameliorarea temporară a senzațiilor de arsură și iritație cauzate de simptomele de uscăciune a ochilor.

### **SCOPUL UTILIZĂRII/DOMENIUL DE UTILIZARE ȘI UTILIZATORII VIZAȚI:**

Picăturile oftalmice lubrifiante **TEARS NATURALE™II** sunt indicate pentru utilizare de către utilizatori pentru ameliorarea simptomelor de ochi uscat.

### **CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ:**

În baza tuturor dovezilor din cadrul studiilor clinice, literaturii clinice publicate și experienței de pe piață (monitorizare post-comercializare), picăturile oftalmice lubrifiante **TEARS NATURALE™II** au performanțele indicate pentru ameliorarea temporară a senzațiilor de arsură și iritație cauzate de uscăciunea ochiului.

### **INDICAȚII:**

- Picăturile oftalmice lubrifiante **TEARS NATURALE™II** pot fi utilizate, după caz, pe parcursul întregii zile pentru ameliorarea simptomelor de ochi uscat.
- Aplicați 1 sau 2 picături în ochiul/ochii afectat/afecțați, după caz, și clipiți.





### **CONTRAINDICAȚII (Motive pentru neutilizare):**

Persoanele alergice la oricare ingredient din picăturile oftalmice lubrifiante **TEARS NATURALE™II** nu trebuie să utilizeze acest produs.

### **AVERTISMENTE:**

Este esențial să respectați instrucțiunile profesionistului din domeniul oftalmologiei și toate indicațiile de pe etichetă pentru utilizarea corespunzătoare a produsului. Dacă resimțiți disconfort ocular persistent, epiforă, modificări ale vederii sau înroșirea ochiului, nu mai utilizați picăturile oftalmice lubrifiante **TEARS NATURALE™II** și contactați profesionistul dvs. din domeniul oftalmologiei deoarece problema ar putea deveni mai gravă.

### **MĂSURI DE PRECAUȚIE:**

- GARNITURA CE DOVEDEȘTE INTERVENȚIA NEAUTORIZATĂ: Nu utilizați dacă sigiliul de siguranță este deteriorat sau lipsește sau dacă garnitura ce dovedește intervenția neautorizată este deteriorată.
- Nu utilizați dacă ambalajul sau flaconul (ambalajul steril) este deteriorat sau deschis. 
- Pentru a evita contaminarea, nu atingeți niciodată vârful picurătorului de alte suprafețe.
- Așezați capacul la loc după utilizare.
- Păstrați flaconul bine închis când nu este utilizat.
- Acest produs conține un nivel de borat de sodiu care este sigur când este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă.
- A se utiliza înainte de data expirării marcată pe produs. 
- După deschiderea flaconului, eliminați soluția rămasă după șase luni. 
- A se păstra la temperaturi sub 25°C.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

### **REACTII ADVERSE (Potențiale probleme și măsurile ce trebuie luate):**

Dacă resimțiți disconfort ocular persistent, epiforă, modificări ale vederii sau înroșirea ochiului, nu mai utilizați picăturile oftalmice lubrifiante **TEARS NATURALE™II** și contactați profesionistul dvs. din domeniul oftalmologiei, deoarece problema s-ar putea agrava.

### **Raportarea incidentelor grave:**

Orice incident grav referitor la utilizarea acestui dispozitiv medical trebuie să fie raportat către Alcon Laboratories, Inc.:

Contactați biroul local de la nivel de țară sau distribuitorul Alcon local

E-mail: [qa.complaints@alcon.com](mailto:qa.complaints@alcon.com)

Website: <https://www.alcon.com/contact-us>

Aceste incidente grave trebuie să fie, de asemenea, raportate autorității competente pentru dispozitive medicale din statul dvs.









**MOD DE PREZENTARE:**

Picăturile oftalmice lubrifiante **TEARS NATURALE™II** sunt furnizate în flacoane din plastic cu volum cuprins între 5 ml și 15 ml.



Sterilizate folosind tehnici de procesare aseptice.

**TABEL EXPLICATIV AL SIMBOLURILOR**

Simbol	Definiții
	Atenționare
	Consultați instrucțiunile de utilizare sau instrucțiunile de utilizare electronice
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat și consultați instrucțiunile de utilizare
	Data fabricației
	Conține substanțe periculoase
	Sistem de barieră sterilă unică
	Dispozitiv medical
	Simbolul autorizației pentru eliminarea (aruncarea) ambalajului



Producător  
Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, TX 76134-2099, SUA



Reprezentant autorizat pentru Comunitatea Europeană / Uniunea Europeană

Alcon Laboratories Belgium  
Lichterveld 3  
2870 Puurs-Sint-Amands  
Belgia



Distribuitor



[www.ifu.alcon.com](http://www.ifu.alcon.com)

2025 Alcon Inc.