

Distribuitor / Forgalmasz: Adekittis SRL, Calea Mosilor 199 / 25, Bucuresti, Romania /
Adekkittis Hungary Kft., 1093, Budapest, Bortos t6r 2, 4/19a

EFFIK BENELUX S.A. The Crescent, Lemniksebaan,
451 Route de Lemnik, 1070 Anderlecht – Bruxelles (Belgium)

EAN CODE

UTILIZARE / HASZNALAT: Introduceți ovulul/dănc în vagin, de preferință seara înainte de culcare / A hüvelykúpport helyezni mélyen a hüvelybe, lehetőleg este, lefekvés előtt.

Vagina Bacteriană / Bakteriális vaginózis: După tratamentul adecvat al vaginozii bacteriene acute, utilizați POLYBACTUM® după cum urmează/ Az akut bakteriális vaginózis megféléli kezelésén után az alábbiak szerint használja a POLYBACTUM®-ot:

- 3 ovule pe săptămână (1 la 3 zile), după ce a început să vă simțiți mai bine, până când menstruația s-a încheiat, dacă este necesar / Heti 3 hüvelykúp (3 naponta 1), Haszükséges, várja meg, amíg a menstruációja véget ér, aztán kezdje el használni a POLYBACTUM®-ot.
- Repetări acest tratament timp de 2 cicluri lunare consecutive (3 cicluri de tratament în total) / Ismételtje a POLYBACTUM®-ot.

meg și a kezelést 2 egymást követő havi ciklusban (összesen 3 kezelési ciklus) In az de sarcinā, incepeți să utilizați POLYBACTUM® imediat după tratamentul fazei acute / Amennyiben Ön terhes, a POLYBACTUM® hasznalātāt az akut fázis kezelése után azonnal kezdje el.

POLYBACTUM® respecta echilibrul florei naturale vaginale / A POLYBACTUM® nincis befolyással a hüvelyflóra természetes egyensúlyára.

Află mai multe despre POLYBACTUM® aici!
Tudj meg többet a POLYBACTUM®-oltt



Compoziție: C12-C18 gliceride, policarbofil, lauril glucozid (0.04%)

Összetétel: C12-C18 gliceridek, policarbofil, lauril-glükozid (0.04%)

Citiți prospectul. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați blisterul în cutia originală împreună cu prospectul / Hasznalāt előtt, kérjűk, olvassa el a tájékoztatót. Gyermekek elöl elzárva tartandó. Tartsa a terméket az eredeti dobozában a betegtájékoztatóval együtt.



Dispozitiv medical (Clasa II a)
În ambalajul original este inclus dispozitivul de sterilizare



DIAMONDLILY

Polybactum®

OVULE VAGINALE / HÜVELYKÚP

Reduce și protejează împotriva infecțiilor vaginale, în special a celor cu *Gardnerella vaginalis* / Csökkenti a hüvelyi fertőzések kialakulásának lehetőségét és véd azok esetleges kiújulásától, különösen a *Gardnerella vaginalis* esetében.

Previne recurența la femeile cu Vaginoză Bacteriană / Megakadályozza a bakteriális vaginózis kiújulását.

Poate fi utilizat în timpul sarcinii / Terhesség alatt is használható

3 OVULE / HÜVELYKÚP