

# RectoLAX®

## MICROCLISME

MICROCLISME CU ALTELAX MIERE DE ALBINE  
ȘI EXTRACTE DE PLANTE

## TRIPLA ACȚIUNE

- EVACUARE
- EMOLIENT
- PROTECȚIE

DISPOZITIV MEDICAL CE



POLISAHARIDĂ  
COMPLEX DE  
NALBĂ ȘI NALBĂ MARE

EURO  
CROAZA





RECTOLAX ADULTI este un dispozitiv medical CE pe bază de Altelax, un complex polizaharidic de nalbă mare și nalbă, cu acțiuni evacuatoare, emoliente și protectoare asupra mucoasei rectale. Înmoaie materiile fecale, facilitează evacuarea și ameliorează disconfortul, iritațiile și inflamațiile asociate cu constipația. RECTOLAX® conține, de asemenea, miere și extracte de plante precum lămâie și lavandă.

De asemenea, este util în cazurile în care este necesară curățarea părții terminale a rectului și a anusului.

COMPOZIȚIE: glicerol, apă demineralizată, miere, Altelax (complex polizaharidic de nalbă mare și nalbă), extract hidroglicerol de lămâie, extract hidroglicerol de lavandă, conservanți: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu.

MOD DE UTILIZARE: de la 12ani: utilizați 1 microclismă de 9 g, după cum este necesar. În caz de constipație persistentă, utilizați 2 doze simultan. Fiecare recipient unidoză este sigilat individual până în momentul utilizării pentru a asigura igiena. Deschideți microclisma prin îndepărtarea capacului canulei (A). Lubrifiați canula cu câteva picături de produs, introduceți canula în rect și apăsați complet burduful (B). La sfârșitul aplicării, mențineți burduful apăsat până când canula este complet extrasă pentru a preveni aspirarea produsului înapoi. După utilizarea produsului, evitați contactul cu ochii și spălați-vă bine pe mâini.

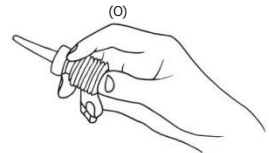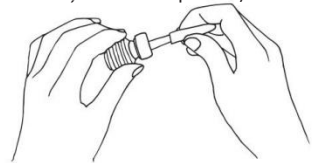

(B)

**ATENȚIONĂRI:** doar pentru administrare rectală. Nu ingerați. Nu utilizați dacă există hipersensibilitate sau alergii la unul sau mai multe ingrediente. În caz de constipație persistentă, este important să consultați un medic pentru a exclude alte afecțiuni. Microclismele nu trebuie utilizate în cazuri de durere abdominală acută sau de origine necunoscută. A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor. Nu utilizați după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau plănuți o sarcină, consultați un medic sau farmacist înainte de utilizare. Nu utilizați la copii sub 12 ani.

**CONTRA INDICAȚII ȘI EFECTE ADVERSE:** Nu utilizați produsul în caz de hipersensibilitate sau alergii la una sau mai multe componente. Nu utilizați împreună cu alte dispozitive medicale sau medicamente fără a consulta în prealabil un medic sau farmacist.

**DEPOZITARE:** A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumină și surse de căldură.

**AMBALAJ:** 6 microclisme a câte 9g fiecare. Recipientul unidoză permite depozitarea corectă a produsului.

**DATAEXPIRĂRII:** Consultați data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la produsul nedeschis și depozitat corespunzător.

**DATA ULTIMEI REVIZUIRI:** ianuarie2021

#### LEGENDĂ

Conformitate CE cu standardele Comunității  
Europene



Producător



Cod produs



Atenție: consultați instrucțiunile de utilizare



Numărul lotului

Nu reutilizați



A se păstra departe de lumină



Data de expirare



Nu utilizați în cazul unui ambalaj deteriorat



Evitați eliberarea în mediu.



sa Paradiso 2/A

23846

GarbagnateMonastero(LC)Italia

CUTIE PAP21 HĂRTIE  
STICLĂ PE-LD 4 PLASTIC  
PROSPECT PAP22 HĂRTIE