


Puncte de măsurare pentru alegerea mărimii

Pentru alegerea corectă a ciorapilor compresivi, măsurătorile se efectuează în punctele indicate în schema producătorului. Circumferințele și lungimile trebuie măsurate cât mai precis, fără a strânge excesiv centimetrul.

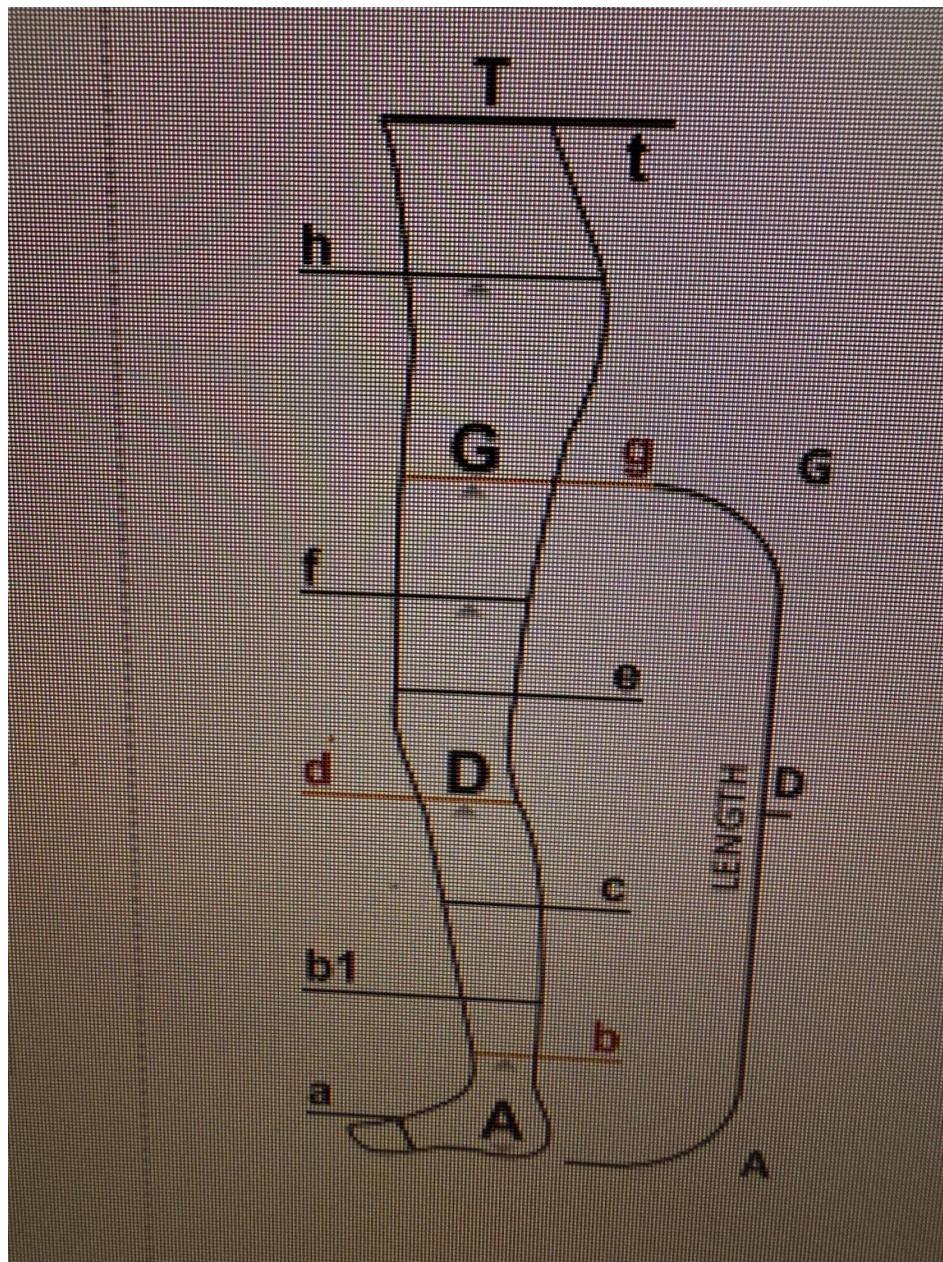

Schema producătorului – puncte de măsurare ale membrului inferior

Semnificația punctelor de măsurare

Punct	Măsurătoare
a	Circumferința piciorului
b	Circumferința deasupra gleznei
b1	Circumferința la 10 cm deasupra gleznei
c	Circumferința gambei

d	Circumferința imediat sub genunchi
e	Circumferința deasupra genunchiului
f	Circumferința coapsei, măsurată la mijlocul coapsei
g	Circumferința coapsei, măsurată la 5 cm sub zona inghinală
h	Circumferința șoldurilor
t	Circumferința taliei

Măsurarea lungimii

- A–D: lungimea pentru ciorapii până sub genunchi.
- A–G: lungimea pentru ciorapii până la coapsă și pentru dresurile compresive.

Pentru modelul Avicenum PHLEBO 140 FINE AD prezentat în acest document sunt esențiale în special măsurătorile b (circumferința deasupra gleznei), d (circumferința sub genunchi) și lungimea A–D. Aceste valori se compară cu tabelul de mărimi al producătorului pentru selectarea variantei potrivite.