

DISPOZITIV MEDICAL

10 OVULE VAGINALE

SWP

MENOVERT HA

SWP MENOVERT HA ovule vaginale este indicat pentru ameliorarea simptomelor asociate atrofiei vaginale, femeilor adulte care prezintă dezechilibre hormonale, care se confruntă cu menopauza sau celor care urmează chimioterapie. De asemenea, este indicat pentru femeile adulte pentru îmbunătățirea lubrifierii vaginale.

SWP MENOVERT HA ovule vaginale este un dispozitiv medical util în tratamentul și prevenirea tulburărilor vaginale caracterizate prin pierderea elasticității și subțierea țesuturilor genitale interne, care provoacă în principal uscăciune, iritație și arsură. Datorită prezenței acidului hialuronic cu greutate moleculară mică, a vitaminei A și a vitaminei E, **SWP MENOVERT HA** favorizează lubrifierea și menținerea nivelului adecvat de hidratare a mucoasei vaginale, ameliorând senzațiile neplăcute de uscăciune și disconfort intim feminin.

Ingrediente: gliceride semisintetice; polisorbat 80; dioxid de siliciu; acid linoleic conjugat (1 mg); hialuronat de sodiu (0,3 mg), ulei de ricin, ulei de ricin hidrogenat, tocoferol; ulei de migdale; vitamina A palmitat (1 mg); vitamina E acetat (1 mg).

Mod de utilizare:

Se recomandă utilizarea unui ovul pe zi timp de 10 zile consecutive, care se introduce în vagin înainte de culcare. Tratamentul poate fi repetat la nevoie sau la indicația medicului.

Administrați produsul după cum urmează:


- Spălați bine părțile intime
- Spălați-vă bine pe mâini înainte de a scoate folia din ambalaj
- Detașați un singur ovul de pe folie, având grijă să nu deteriorați ovulele rămase
- Scoateți ovulul și introduceți-l ușor în vagin, împingându-l adânc pentru a preveni scurgerea accidentală

Atenționări: Produsul este destinat exclusiv utilizării vaginale. Nu utilizați în alte scopuri decât cele indicate. A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor sub 3 ani. În caz de înghițire accidentală, vă rugăm să consultați un medic. A se utiliza numai pe mucoasa vaginală fără leziuni. Nu utilizați dacă mucoasa este deteriorată sau dacă sunt prezente leziuni vaginale. Nu utilizați în caz de infecție vaginală acută sau de tratament medicamentos concomitent fără sfatul medicului. În cazul apariției senzației de iritație, arsură sau alte reacții adverse cauzate de hipersensibilitatea la unul sau mai multe ingrediente, întrerupeți utilizarea și consultați un medic. Nu utilizați produsul pentru perioade îndelungate fără sfatul medicului. Femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să ceară sfatul medicului înainte de a utiliza produsul. Nu utilizați produsul după data de expirare. Utilizați numai dacă ambalajul este intact. Data de expirare se referă la produsul nedeteriorat și depozitat corect.

Prezentare: 2 blistere cu câte 5 ovule vaginale de 2 g fiecare.

Condiții de păstrare: A se păstra la o temperatură între 5°C și 25°C, departe de lumina directă și de sursele de căldură.

 PHARMA BIOMATECK srl
Consorzio Fracta Labor L25
80027 Frattamaggiore (NA) - Italia

 Sun Wave Pharma SRL
Șoseaua Pipera, nr. 43
Floreașca Park, Ciadirea A, etaj 3
Sector 2, București, România
office@sunwavepharma.com

Rev.00 - 05/2025



Pentru mai multe informații accesați
www.sunwavepharma.com

RO.25.04.1