

**5 mg** ➤ **hialuronat de sodiu per supozitor**



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a începe să utilizați GYNIE L® Supozitoarele Vaginale. Păstrați prospectul, în caz că este necesar să-l citiți din nou.

Dispozitiv medical – Instrucțiuni de utilizare

#### Scopul utilizării:

**Supozitoarele vaginale GYNIE L®** sunt destinate menținerii umidității naturale a mucoasei vaginale.

Se utilizează pentru a susține regenerarea și restabilirea statusului natural al mucoasei vaginale în cazul problemelor cauzate de:

- **uscăciune vaginală** asociată cu modificări hormonale în orice etapă a vieții unei femei, în special în timpul menopauzei, după naștere, în timpul alăptării, după chimioterapie, radioterapie sau intervenții chirurgicale ginecologice;
- **atrofie vaginală** manifestată prin prurit (mâncărime), arsuri, roșeață.

Dispozitivul este destinat utilizării de către femei adulte, fără pregătire medicală.

**Ingrediente:** hialuronat de sodiu (min. 0,25 %), tocoferol, *Centella asiatica*, *Malva sylvestris*, *Chamomilla recutita*, *Melaleuca alternifolia*, silica, trigliceride C12-18 hidrogenate.

**Mod de acțiune:** Principalul beneficiu al GYNIE L® Supozitoare Vaginale asupra mucoasei vaginale nu este obținut prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, ci datorită proprietăților sale fizice, în special higroscopicității acidului hialuronic, asigurând hidratarea și elasticitatea țesutului. Proprietățile și mecanismul său de acțiune sunt exclusiv de natură fizică, nu acționează prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice.

#### Beneficii clinice:

- Hidratarea mucoasei vaginale;
- Eliminarea pruritului (mâncărimei) de la nivelul mucoasei vaginale;
- Reducerea eritemului de la nivelul mucoasei vaginale;
- Ameliorarea disconfortului vaginal;
- Îmbunătățirea calității generale a vieții.

#### Indicații de utilizare:

- Uscăciune vaginală;
- Atrofie vaginală manifestată prin prurit (mâncărime), senzație de arsură, roșeață.

**Cum se utilizează:** Spălați-vă bine mâinile înainte de utilizare. Scoateți supozitorul din folia de aluminiu rupând folia deasupra vârfului

**10** utilizări  
**Supozitoare Vaginale**  
**GYNIEL**®

O cutie conține 10 supozitoare vaginale cu acid hialuronic.

supozitorului și introduceți-l intravaginal cât mai adânc posibil, în timp ce stați întinsă pe spate. Rămâneți întinsă pe spate câteva minute după utilizare. Supozitorul vaginal se va înmuia din cauza temperaturii corpului și va acoperi uniform întreaga suprafață a mucoasei vaginale. În timpul folosirii se recomandă utilizarea de absorbante zilnice. Utilizați supozitoarele, de preferință, seara, înainte de culcare.

**Durata de utilizare:** Utilizați un supozitor pe zi în primele zece zile de la apariția disconfortului vaginal sau conform recomandărilor medicului dumneavoastră.

Pentru tratamentul uscăciunii vaginale cauzate de menopauză, aplicați câte un supozitor în primele 10-20 de zile, urmat de un tratament pe termen lung cu câte un supozitor vaginal de 2 ori pe săptămână.

**Contraindicații:** A nu se utiliza în timpul menstruației sau în cazul în care secreția vaginală devine mai abundentă. A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre ingredientele produsului.

**Reacții adverse:** Reacții alergice.

**Atenționări:** GYNIE L® Supozitoare Vaginale sunt destinate exclusiv utilizării vaginale.

În timpul sarcinii sau utilizării concomitentă a altor preparate vaginale (inclusiv contracepția vaginală), consultați medicul asupra utilizării GYNIE L® Supozitoare Vaginale.

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat. A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**Precauții:** Orice reacție adversă gravă care poate avea loc în timpul utilizării dispozitivului medical trebuie raportată producătorului și autorității naționale competente. În acest caz, produsul nu trebuie utilizat din nou.

#### Depozitare:

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A se păstra la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C.

#### Eliminarea și reciclarea dispozitivului:

Aruncați folia de aluminiu în containerul pentru deșeuri mixte și celelalte părți ale ambalajului în containerul corespunzător pentru deșeuri reciclabile (hârtie).

#### Data ultimei revizuirii a instrucțiunilor de utilizare:

30.09.2024

CE 2265

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare		Nu poluați mediul înconjurător – aruncați ambalajele uzate în containerul corespunzător	
Numărul lotului		A nu se reutiliza	
A se folosi înainte de		Producător	
Limite de temperatură		Identificator unic al dispozitivului	

SI8810\_007\_00

**Dr. Müller Pharma s.r.o.**  
U Mostku 182,  
50341 Hradec Králové, Republica Cehă  
www.muller-pharma.com

Distribuitor: **Hyllan Pharma**  
Turturelelor 11A, București, Romania  
www.hyllanpharma.ro



**hyllan**  
PHARMA