

AMMICCO

BE YOURSELF

Cod. FAMB17



Detalii produs	Product Details
> Model: Be Yourself	> Model: Be Yourself
> Tip produs: Dopuri anale	> Product Type: Anal Plug
> Dimensiuni: ✓ S: 80*24mm ✓ M: 93*28mm ✓ L: 125,7*33mm	> Dimension: ✓ S: 80*24mm ✓ M: 93*28mm ✓ L: 125,7*33mm
> Material: Silicon	> Material: Silicone
> Culoare: Albastru deschis	> Color: Light Blue
Conținutul pachetului: 3 x Be Yourself Cod. FAMB17 1 x Pliante cu instrucțiuni de utilizare, incluzând condițiile de garanție de 24 luni, emise de Ferrari Hub s.r.l.	Package contents: > n. 3 Be Yourself Cod. FAMB17 > n. 1 Instructions for use leaflet including 24-month warranty conditions issued by Ferrari Hub s.r.l.

Produs certificat




Info smaltimento:



Produsul NU conține: Plumb (Pb), Cadmiu (Cd), Mercur (Hg), Crom hexavalent (Cr6+), Bifenili polibromurați (PBB), Eteri de difenil polibromurat (PBDE), Ortobenzen

The product does NOT contain: Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg) Hexavalent Chromium (Cr6+), Polybrominated biphenyls (PBB), Polybrominated diphenyl ethers (PBDE), Orthobenzene

RO - Instrucțiuni de utilizare (Fig. 1)		ENG - Instructions for use
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Be Yourself este un dilatator progresiv care, datorită formei sale, odată introdus, menține sfîcterul într-o poziție stabilă, inclusiv în timpul mersului sau altor activități cotidiene. ▶ Pachetul conține trei modele de dimensiuni diferite pentru a permite o utilizare progresivă. Se recomandă începerea utilizării cu dopul de mărime mică Size S (fig.1). ▶ Utilizarea acestuia presupune folosirea unui lubrifiant intim. Nu se recomandă utilizarea salivei sau a apei simple, deoarece pot provoca iritații ale mucoasei delicate a rectului, în special în interior. Este indicată utilizarea unui lubrifiant special, cum ar fi cel inclus în pachet, care, spre deosebire de cele menționate anterior, nu se usucă rapid. 	<p>Fig.1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Be Yourself is a progressive dilator which, shaped so that once inserted, the sphincter keeps it in a stable position even when walking or performing normal activities ▶ The package contains three models of different sizes to allow gradual use, it is therefore advisable to start using it starting from the Size S anal plug (fig.1) ▶ Their use always involves the use of an intimate lubricant. The use of saliva or simple water is not recommended, as it creates a risk of irritation to the delicate internal mucosa of the rectum, after wearing they do not offer the same comfort provided by specific products which, unlike the former, do not tend to dry out.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Produsul cu codul FAMB17 este garantat timp de 24 de luni de la data achiziției pentru defecte de fabricație. 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ The product ref. Code FAMB17 is guaranteed for 24 months from the date of purchase against manufacturing defects
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Curățare: Se spală cu apă și detergent sau săpun antibacterian și se clătește cu apă curentă. 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cleaning: Clean with water and mild detergent or antibacterial soap. Rinse with running water.
<p>Produsele Ammicco sunt dedicate unui public adult. Ammicco promovează un consum responsabil, conștient și consimțit. Ammicco products are dedicated to an adult user. Ammicco promotes responsible, aware and consensual use.</p>		