



## **CE ESTE MARIMER CURATAREA NASULUI SI PENTRU CE SE UTILIZEAZA?**

### **INDICATII**

In caz de infectie a cailor respiratorii superioare: raceala, sinuzita sau rinita alergica. In caz de conditii de mediu iritante: aer rece, uscat sau umed.

### **PERFORMANTE**

Curatare nazala:

- Curatarea mucoasei nazale
- Faciliteaza evacuarea secretiilor nazale
- Elimina impuritatile.

### **BENEFICII**

Ameliorarea simptomelor nazale, in caz de:

- nas infundat,
- nas uscat,
- secretii nazale abundente,
- mancarime.

Imbunatatirea calitatii vietii: confort respirator si calitatea somnului.

## **CE TREBUIE SA STITI INAINTE DE A UTILIZA MARIMER CURATAREA NASULUI?**

### **CONTRAINDICATII**

Nu utilizati in caz de hipersensibilitate la apa de mare.

Nu utilizati la nou-nascutii prematuri.

### **ATENTIONARI**

UZ EXTERN. A NU SE INJECTA. A NU SE INGHITI. DE UNICA FOLOSINTA.

Nu utilizati o unidoza deteriorata (scurgere de lichid, deformare etc.) sau o unidoza deja deschisa, din cauza riscului de contaminare bacteriana rapida. Daca simptomele persista sau se agraveaza, consultati medicul. Raportati orice incident grav aparut in legatura cu acest dispozitiv catre producator

- contact: [www.labogilbert.fr](http://www.labogilbert.fr) si/sau Autoritatea nationala competenta.

## **CUM SE UTILIZEAZA MARIMER CURATAREA NASULUI? INSTRUCIUNI DE UTILIZARE**

Posologie: 1 pana la 6 spalari pe zi la nevoie sau pana la disparitia simptomelor.

Utilizare: Spalarea trebuie efectuata de un adult.

· Inclinati capul intr-o parte pentru a evita riscul de aspiratie. Se recomanda ca bebelusul sub 6 luni sa stea culcat. Daca o singura persoana efectueaza spalarea nazala, pentru a evita ranirea bebelusului cu varful unidozei, il puteti imobiliza infasurandu-l intrun prosop.

- Introduceti usor varful unidozei in nara superioara si apasati usor pe unidoza. In acelasi timp, inchideti gura, astfel incat solutia sa iasa prin cealalta nara impreuna cu secretile nazale.
  - Lasati mucozitatile sa se scurga.
  - La bebelusi:
    - Daca nasul nu este bine curatat, repetati pasii pentru cealalta nara, culcand bebelusul pe cealalta parte si stergandu-i nasul cu un servetel de hartie de unica folosinta.
    - Daca nasul este suficient curatat dupa spalarea unei nari, nu este nevoie sa repetati spalarea celeilalte nari. In acest caz, incepeti cu cealalta nara la urmatoarea curatare.
  - In cazul copiilor mici: rugati-i sa sufle nasul si repetati pasii pentru cealalta nara.
- Precautii de utilizare: In cazul bebelusilor, administrati produsul cu presiune minima, pentru a evita orice risc de contaminare a urechii medii.

### **CUM SE PASTREAZA MARIMER CURATAREA NASULUI?**

Nu folositi dupa data de expirare indicata pe unidoza. A se feri de lumina. A NU SE LASA LA VEDEREA SI INDEMANA COPIILOR.

### **INFORMATII SUPLIMENTARE**

Mod de prezentare : Unidoze de 5 ml.

Compozitie: Apa de mare, apa purificata (echivalent a 9 g/l saruri).

### **Laboratoires Gilbert**

928, Avenue du Général de Gaulle - F-14200 Hérouville Saint-Clair