


INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE KCN100

APARAT AEROSOLI CU ULTRASUNETE

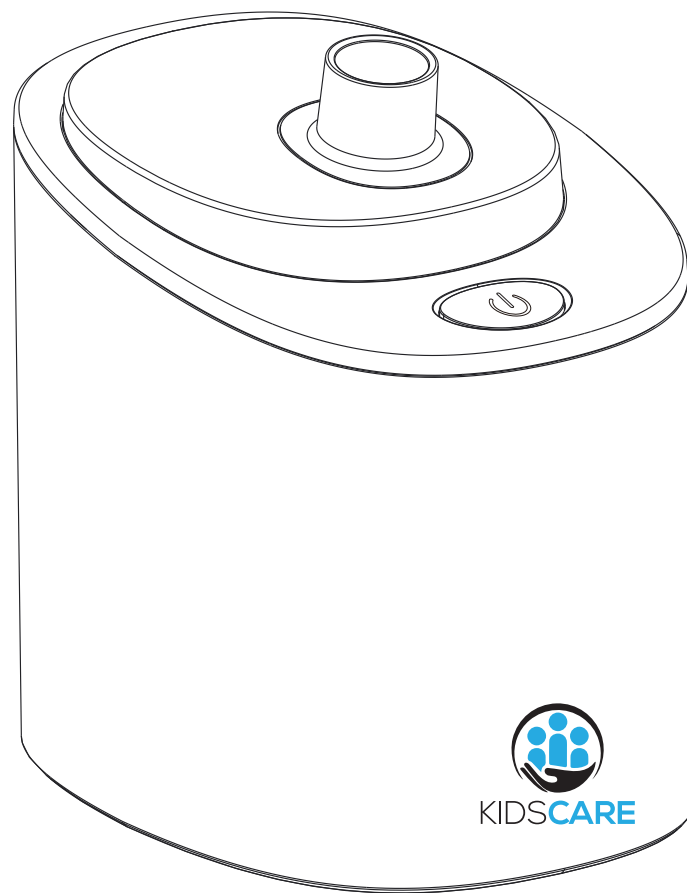


Procedura de utilizare

- 1) Inainte de fiecare utilizare, curatati si dezinfectati cu atentie rezervorul de apa, capacul, conectorii mastilor, tubul de aer, piesa bucala si mastile conform paragrafului „Intretinere si dezinfectare” .
- 2) Asezati dispozitivul pe o suprafata plana.

- 3) Scoateti capacul. Umpleti cu apa de la robinet pana la indicatorul rosu de nivel. Aceasta apa este folosita ca lichid care conduce la medicament unde se ultrasonice si nu este niciodata nebulizata.


Nu pune rezervorul direct sub robinet pentru a-l umple cu apa. Este strict interzisa utilizarea solutiei de sare si apa cu orice element chimic.

Nu puneti medicamentele direct in rezervor.

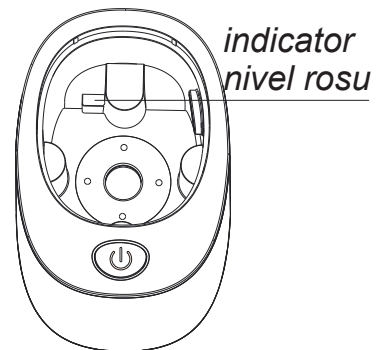

- 4) Umpleti capsula cu medicament, apoi puneti-l in rezervorul de apa. Se toarna medicamentul avand grija sa nu depaseasca capacitatea maxima (35 ml). Urmati instructiunile de utilizare si dozarea medicamentului pe care il utilizati.

- 5) Inchideti rezervorul cu capacul corespunzator.

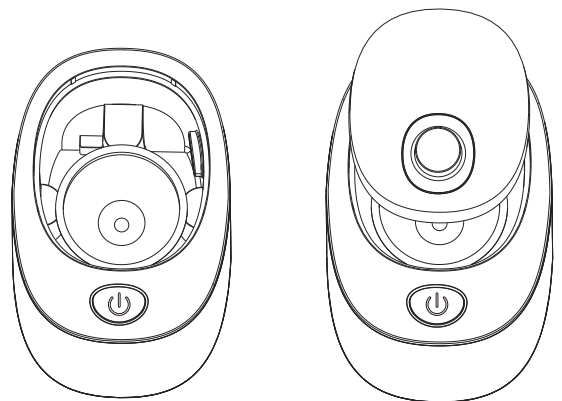

- 6) Acum introduceti furtunul si piesa bucala sau conectorul si masca pentru adulti/copii in husa.

In caz de inhalare prin piesa bucala:

In cazul problemelor la nivelul cailor respiratorii joase, de exemplu tuse sau infectii bronsice, utilizati piesa bucala.

- Stai drept
- Conectati tubul de conectare a aerului in capac si la celalalt capat introduceti piesa bucala.
- Strangeti bine piesa bucala cu buzele.
- Inspirati incet si profund pe gura si expirati pe nas. Pentru a creste eficacitatea terapiei, tineti-va respiratia un timp dupa ce ati inhalat. In timpul tratamentului, ramaneti linistiti si relaxati. Respirati regulat si nu prea repede. Daca doriti sa intrerupeti scurt inhalarea, scoateti piesa bucala din gura si apoi reintroduceti-o.

In caz de inhalare cu masca:

Masca pentru inhalare este potrivita pentru tratamentul zonei nazale si faringiene.

- Stai drept.
- Conectati tubul de conectare a aerului in capac si la celalalt capat introduceti fittingul si masca.
- Tineti masca usor apasata pe nas; masca trebuie sa acopere gura si nasul fara a le strivi.
- Inspirati si expirati incet si profund pe nas. Pentru a creste eficacitatea terapiei, tineti-va respiratia un timp dupa ce ati inhalat. In timpul tratamentului, ramaneti linistiti si relaxati. Respirati regulat si nu prea repede. Daca doriti sa intrerupeti inhalarea in scurt timp, indepartati masca pentru un timp si apoi puneti-o din nou pe nas si gura.




piesa bucala



masa

- 7) Conectati transformatorul la dispozitiv si apoi la stecherul de alimentare, acordand atentie ca tensiunea este corecta.

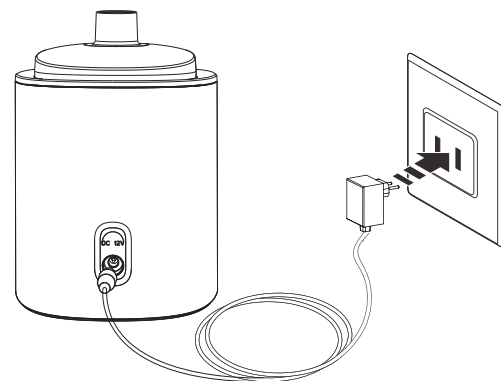

- 8) Porniti dispozitivul apasand tasta " ⏻ ". Asigurati-va ca lampa de avertizare se aprinde (culoare albastra).
In timpul inhalarii, dispozitivul trebuie sa ramana in mod obligatoriu in pozitie verticala: aceasta asigura functionarea sa corecta, precum si eficacitatea maxima a terapiei. Intrerupeti imediat tratamentul daca va simtiti nelinistit in timpul terapiei cu aerosoli.
- 9) Aparatul are o functie de oprire automata, care dezactiveaza dispozitivul atunci cand medicamentul este aproape epuizat sau dupa 13 minute de inhalare. Dispozitivul poate fi oprit in orice moment prin apasarea comutatorului " ⏻ "
- IMPORTANT:** Ca si in cazul majoritatii echipamentelor pentru aerosoliterapie, la sfarsitul tratamentului de inhalare, o anumita cantitate de medicament va ramane in capsula de nebulizare: acest lucru este perfect normal. Aceasta
- 10) Lasati dispozitivul sa se raceasca cateva minute, intoarcati dispozitivul cu susul in jos sau utilizati o carpa absorbanta pentru a indeparta lichidul rezidual si efectuati procedurile de curatare conform paragrafului „Intretinere si dezinfectie” .
- 11) Asteptati cel putin 15 minute de la o utilizare la alta.

Intretinere si dezinfectie

- Atentie! Suprafata fierbinte! Inainte de a curata aparatul, lasati-l sa se raceasca, deoarece traductorul se incalzeste in timpul utilizarii.
- Dupa indepartarea dopului, scoateti capacul si goliti orice reziduuri din rezervor.
- Dupa fiecare utilizare, curatati camera de pulverizare si traductorul cu o carpa inmuata in alcool etilic. Curatati capacul superior al aparatului cu o carpa inmuata in apa sau otet, astfel incat sa nu ramana reziduuri. Cand curatati capacul, manipulati cu atentie transportorul de flux.
- Curatati exteriorul aparatului folosind o carpa moale umezita cu apa si sapun delicat (nu curatati unitatea principala punandu-l sub jet de apa si impiedicati sa patrunda lichid in aparat).
- In cazul utilizarii zilnice, este indicat sa dezinfectati sau sa sterilizati accesoriile in fiecare zi pentru a limita riscul de infectii. In acest caz, utilizati un dezinfectant medical pe baza de alcool, disponibil in comert, respectand dozele si limitarile furnizate de producatorul dezinfectantului. Scufundati toate accesoriile in solutia dezinfectanta pentru perioada specificata. Indepartati complet reziduurile dezinfectantului clatind bine accesoriile sub jet de apa si lasati-le sa se usuce la aer.

Nu utilizati sterilizatoare cu autoclave, sterilizatoare cu gaz EO (oxid de etilena)

- sau sterilizatoare cu plasma la temperatura joasa.

Pentru dezinfectarea aparatului este posibil sa folositi alcool 70% (sau un spray

- dezinfectant pe baza de alcool). Verificati sa nu ramana reziduuri de dezinfectant in aparat.

Aparatul, rezervorul si toate accesoriile trebuie sa fie perfect uscate inainte de

- utilizare.

Depozitati aparatul intr-un loc racoros si uscat.

- Este recomandabil sa verificati performanta aparatului la fiecare 2 ani sau dupa o reparatie. Contactati serviciul de asistenta (activitate exclusa din garantie).