

Atenționări:

- Aplicatorul vaginal (canula) este de unică folosință; nu îl reutilizați. Aruncați canula după fiecare utilizare.
- Fiecare canulă trebuie folosită numai împreună cu Refeel® Crema.
- Nu utilizați produsul pentru aplicații diferite de cele menționate în prospect.
- Produsul se administrează doar vaginal și/sau pe pielea vulvară.

- Pentru uz topic. A nu se înghiți.
- Nu utilizați în caz de leziuni.
- Nu utilizați în caz de hipersensibilitate cunoscută sau suspectată la oricare dintre componentele produsului.
- Întrerupeți tratamentul în cazul apariției unor reacții cutanate anormale.
- Nu utilizați produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
- Data de expirare este valabilă pentru

produsul depozitat corespunzător, în ambalajul original, nedesfăcut.

- În cazul apariției unor reacții adverse, adresați-vă medicului.
- Evitați contactul cu ochii.
- Orice incident grav cauzat de dispozitiv trebuie raportat Producătorului și Autorității Naționale Competente.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. UZ VAGINAL. A nu se înghiți.

Refeel® Crema

Althea
LIFE SCIENCE

Tub de 30 ml
și 6 canule vaginale de unică folosință

**Doze și mod de administrare:**

Pentru uscăciunea vaginală: 1 aplicare vaginală (cu ajutorul canulei) pe zi, de preferință seara, timp de 12 zile consecutive sau conform recomandării medicului. Ulterior, 1 aplicare vaginală (cu canulă), preferabil seara, o dată la două zile, sau conform indicației medicului.

Pentru uscăciunea vulvară: 1 aplicare vulvară (fără utilizarea canulei) pe zi, de preferință seara, timp de 12 zile consecutive sau conform

recomandării medicului. Tratamentul poate fi prelungit atâta timp cât persistă disconfortul vulvo-vaginal sau conform indicației medicului.

Produsul a fost testat și este compatibil cu prezervativele din latex.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pentru a deschide tubul, perforați sigiliul folosind vârful capacului.
2. Înșurubați aplicatorul vaginal (canula).
3. Strângeți tubul de la bază până la umplerea

completă a aplicatorului.

4. Deșurubați aplicatorul de pe tub, introduceți-l cu grijă în vagin și apăsați pistonul aplicatorului până la capătul cursei acestuia.
5. Retrageți aplicatorul.
6. Aplicatoarele sunt de unică folosință și se aruncă după utilizare.
7. Asigurați-vă că tubul este închis corect, cu capacul bine înfiletat după fiecare utilizare, pentru a evita alterarea produsului.

Refeel® Crema

Dispozitiv medical utilizat pentru tratamentul emolient și hidratant al mucoasei vaginale, indicat în uscăciunea și atrofia vaginală asociate cu scăderea nivelului estrogenic.

Indicații pentru utilizare

Refeel® Crema este un dispozitiv medical care conține substanțe protectoare, lubrifiante, lenitive, trofice și non-hormonale, formulat ca tratament adjuvant pentru:

- restabilirea condițiilor normale ale mucoasei vaginale;
- combaterea simptomelor asociate uscăciunii și atrofiei vaginale, determinate de scăderea nivelului de estrogen;
- protejerea epitelului urogenital.

Compoziție:

Colostru; Vîsnadină; Extract din conuri de Hamei (*Humulus lupulus*); Hialuronat de sodiu (0.05% w/w); Polycarbophil; Acetat de vitamina E; Carbomer (acid poliacrilic); Glicerol; Palmitat de vitamina A; Poligliceril-3 din tărâțe de

orez; Izononanoat de ceteare; Trigliceride caprilice/caprice; BHT/butilhidroxitoluen; Imidazolidinil uree; Dehidroacetat de sodiu; EDTA/acid etilendiaminotetraacetic; Parfum; Hidroxid de sodiu; Apă.

Conținutul ambalajului:

1 tub de 30 ml

6 canule vaginale de unică folosință, ambalate individual.

Condiții de păstrare:

A se păstra la temperatura camerei (sub 25 °C), într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumină, umiditate și surse de căldură.

A nu se arunca produsul în mediul înconjurător după utilizare.

Producător: IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l.

Via Goffredo Mameli, 12 – 95020 Aci Bonaccorsi (CT) – Italia.

Distribuitor: Althea Life Science S.R.L.

Str. Prahova, Nr. 7 Parter, Sector 1, București, România.

e-mail: office@althealifescience.ro



8 051122930487

Consultați prospectul pentru instrucțiuni privind eliminarea ambalajelor

Althea
LIFE SCIENCE

Refeel® Crema



Tub de 30 ml

și 6 canule vaginale de unică folosință