

# Refeel<sup>®</sup> crema

Menopauza conduce la epuizarea funcției ovariene și la o reducere treptată a nivelului de estrogen, fiind asociată cu modificări care pot afecta toate organele și aparatele feminine. Tractul urogenital este deosebit de vulnerabil la declinul estrogenic, iar multe femei prezintă simptome legate de uscăciunea vaginală și atrofia urogenitală, care influențează calitatea vieții și funcția sexuală.

Scăderea nivelului de estrogen, asociată tranziției menopauzale, este strâns corelată cu: reducerea florei vaginale lactobacilare, creșterea pH-ului, alterări ale morfologiei epiteliale, reducerea fluxului sanguin și a secreției de lichid vaginal. Simptomatologia, reprezentată prin dispareunie (disconfort în timpul actului sexual), prurit, senzație de arsură și erupții, indică o stare compromisă a sănătății vaginale.

## Indicații pentru utilizare:

Refeel<sup>®</sup> Crema este un dispozitiv medical care conține substanțe protectoare, lubrifiante, lenitive, trofice și non-hormonale, formulat ca tratament adjuvant pentru:

- restabilirea condițiilor normale ale mucoasei vaginale;
- combaterea simptomelor asociate uscăciunii și atrofiei vaginale, determinate de scăderea nivelului de estrogen;
- protejarea epitelului urogenital.

Refeel<sup>®</sup> Crema este indicat femeilor aflate la menopauză.

## Instrucțiuni de utilizare:

1. Pentru a deschide tubul, perforați sigiliul folosind vârful capacului.
2. Înșurubați aplicatorul vaginal (canula).
3. Strângeți tubul de la bază până la umplerea completă a aplicatorului.
4. Deșurubați aplicatorul de pe tub,

introduceți-l cu grijă în vagin și apăsați pistonul aplicatorului până la capătul cursei acestuia.

5. Retrageți aplicatorul.

6. Aplicatoarele sunt de unică folosință și se aruncă după utilizare.

7. Asigurați-vă că tubul este închis corect, cu capacul bine înfiletat după fiecare utilizare, pentru a evita alterarea produsului.

## Doze și mod de administrare:

### Pentru uscăciunea vaginală:

1 aplicare vaginală (cu ajutorul canulei) pe zi, de preferință seara, timp de 12 zile consecutive sau conform recomandării medicului. Ulterior, 1 aplicare vaginală (cu canula), preferabil seara, o dată la două zile, sau conform indicației medicului.

### Pentru uscăciunea vulvară:

1 aplicare vulvară (fără utilizarea canulei) pe zi, de preferință seara, timp de 12 zile consecutive sau conform recomandării medicului. Tratamentul poate fi prelungit atâta timp cât persistă disconfortul vulvo-vaginal sau conform indicației medicului. Produsul a fost testat și este compatibil cu prezervativele din latex.

## Atenționări:

- Aplicatorul vaginal (canula) este de unică folosință; nu îl reutilizați. Aruncați canula după fiecare utilizare.
- Fiecare canulă trebuie folosită numai împreună cu Refeel<sup>®</sup> Crema.
- Nu utilizați produsul pentru aplicații diferite de cele menționate în prospect.
- Produsul se administrează doar vaginal și/sau pe pielea vulvară.
- Pentru uz topic. A nu se înghiți.
- Nu utilizați în caz de leziuni.

- Nu utilizați în caz de hipersensibilitate cunoscută sau suspectată la oricare dintre componentele produsului.
- Întrerupeți tratamentul în cazul apariției unor reacții cutanate anormale.
- Nu utilizați produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
- Data de expirare este valabilă pentru produsul depozitat corespunzător, în ambalajul original, nedesfăcut.
- În cazul apariției unor reacții adverse, adresați-vă medicului.
- Evitați contactul cu ochii.
- Orice incident grav cauzat de dispozitiv trebuie raportat producătorului și Autorității Naționale Competente.

## Precauții:

În cazul apariției unor reacții nedorite, întrerupeți aplicarea produsului și consultați medicul.

În cazul utilizării concomitente a unor tratamente medicamentoase, consultați medicul înainte de folosirea produsului. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat.

Până în prezent nu sunt cunoscute efecte nedorite, însă este recomandat să consultați medicul dacă apar manifestări precum iritații, alergii sau alte reacții neobișnuite. Utilizarea produsului pe perioade prelungite trebuie făcută sub supraveghere medicală.

## Contraindicații:

Hipersensibilitate individuală la oricare dintre componentele produsului.

Utilizarea produselor topice, în special pe perioade îndelungate, ar putea provoca fenomene de sensibilizare; în astfel de cazuri, întrerupeți tratamentul și adresați-vă medicului.

## Condiții de păstrare:

A se păstra la temperatura camerei (sub 25 °C), într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumină, umiditate și surse de căldură.

## Conținutul ambalajului:

1 tub de 30 ml  
6 canule vaginale de unică folosință, ambalate individual.

## Compoziție:

Colostru; Visnadină; Extract din conuri de Hamei (*Humulus lupulus*); Hialuronat de sodiu (0.05% w/w); Polycarbophil; Acetat de vitamina E; Carbomer (acid poli(acrilic)); Glicerol; Palmitat de vitamina A; Poligliceril-3 din tărâțe de orez; Izononanoat de ceteareil; Trigliceride caprilice/caprice; BHT/ butilhidroxitoluen; Imidazolidinil uree; Dehidroacetat de sodiu; EDTA/acid etilendiaminetetraacetic; Parfum; Hidroxid de sodiu; Apă.

A nu se arunca produsul în mediul înconjurător după utilizare.

## Producător:

**IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l.**  
Via Goffredo Mameli, 12  
95020 Aci Bonaccorsi (CT) - Italia.

## Distribuitor:

**Althea Life Science S.R.L.**  
Str. Prahova, Nr. 7 Parter, Sector 1,  
București, România.  
e-mail: office@althealifescience.ro



| Cod PAP 21<br>Ambalaj<br>CARTON | Cod PAP 22<br>Prospect<br>HĂRTIE | Cod ALU 41<br>Tub<br>ALUMINIU | Cod PP 5<br>Capac<br>PLASTIC | Cod PP 5<br>Plic unică folosință<br>PLASTIC | Cod LDPE 4<br>Canulă<br>PLASTIC | Cod HDPE 2<br>Piston<br>PLASTIC |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| COLECTARE<br>SEPARATĂ           | COLECTARE<br>SEPARATĂ            | COLECTARE<br>NEDIFERENȚIATĂ   | COLECTARE<br>NEDIFERENȚIATĂ  | COLECTARE<br>NEDIFERENȚIATĂ                 | COLECTARE<br>NEDIFERENȚIATĂ     | COLECTARE<br>NEDIFERENȚIATĂ     |

