

125 mm

65 mm



hyllan

test de sarcină  
simplu, sigur și rapid în orice moment al zilei

hyllan test de sarcină

15 mm

hyllan

test de sarcină

hyllan test de sarcină

**1** Introduceți testul în urină. Scoateți-l după 15 secunde și așezați-l pe o suprafață dreaptă.


**2** Citiți rezultatele după 5 minute, dar nu mai târziu de 10 minute.


Nu scufundați peste linia MAX!

maxim test  
linie de control

MAX    MAX    MAX    MAX

insărcinată  
neinsărcinată  
test invalid



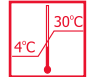

A se păstra la temperaturi între 4°C și 30°C.  
A nu se folosi după data expirării.  
A se folosi doar pentru diagnosticare in vitro.

 Shanghai Chemtron BioTech Ltd.  
West HeLi Road - 201317 Shanghai, China

reprezentant: Shanghai International Holding Corp. GmbH  
autorizat UE: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

hyllan  
importat de:  
**HYLLAN PHARMA**  
București, str. Turturelelor 11A  
tel. 021-425.5566 • www.hyllan.ro

LOT  




    0123  test de sarcină