

125 mm

65 mm

15 mm



hyllan

test de sarcină
casetă

simplic, sigur și rapid în orice moment al zilei

test de sarcină
casetă

hyllan

hyllan

test de sarcină
casetă

hyllan

test de sarcină
casetă

1

Colectați urina într-un recipient curat și uscat. Folosiți pipeta pentru a lua urina din recipient și a pune 3 picături în zona marcată cu **S** de pe casetă.

2

Citiți rezultatele după 5 minute, dar nu mai târziu de 10 minute.

2 linii, **C** și **T**: **însărcinată** 1 linie la **C**: **neînsărcinată** **test invalid**

A se păstra la temperaturi între 4°C - 30°C.
A nu se folosi după data expirării.
A se folosi doar pentru diagnosticare in vitro.

Shanghai Chemtron BioTech Ltd.
West HeLi Road - 201317 Shanghai, China

reprezentant: **Shanghai International Holding Corp. GmbH**
autorizat UE: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

hyllan

importat de:
HYLLAN PHARMA
București, str. Turturelelor 11A
tel. 021-425.5566 • www.hyllan.ro

LOT



5 949013 400238



0123



test de sarcină
casetă