

test de sarcină stilou

simplic, sigur și rapid în orice moment al zilei

hyllan
test de sarcină stilou



test de sarcină stilou

1

- Aduceți testul la temperatura camerei (10-30°C). Nu deschideți plicul pînă cînd nu sunteți pregătită pentru testare;
- Scoateți testul din folia de ambalaj chiar înainte de efectuarea testării;
- Îndepărtați capacul de pe vârful absorbant;
- Introduceți virful absorbant direct în jetul de urină cel puțin 15 secunde, pînă se umezește complet, ținându-l de mâner. **Atenție!** Nu urinați pe zona de control a testului! Dacă preferați, urinați într-un recipient perfect curat și uscat, apoi introduceți vârful absorbant în urină cel puțin 15 secunde;
- După ce scoateți virful absorbant din urină puneți imediat capacul la loc. Așezați testul pe o suprafață plană, cu zona de control în sus. Începeți să cronometrați. Pe măsură ce testul începe să lucreze puteți observa o bandă roșu deschis mișcându-se pe fereastra marcată cu **C** și **T**.

2


Citiți rezultatele după 5 minute, dar nu mai tîrziu de 10 minute.



2 linii, **C** și **T**:
însărcinată



1 linie la **C**:
neînsărcinată

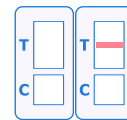

test
invalidat



A se păstra la temperaturi între 4°C - 30°C.
A nu se folosi după data expirării.
A se folosi doar pentru diagnosticare in vitro.

hyllan
test de sarcină stilou



Shanghai Chemtron BioTech Ltd
West HeLi Road - 201317 Shanghai, China

reprezentant: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
autorizat UE: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany



importat de:
HYLLAN PHARMA srl
București, Romania ■ tel. 021-425.5566, fax 021-425.5531 ■ www.hyllan.eu



test de sarcină stilou