

# RHEUMASTOPLAST®

dispozitiv medical

hyllan

4 plasturi 10 x 7 cm

Pentru ușurință în mișcare

# RHEUMASTOPLAST

- luxații și tensiuni musculare
- dureri musculare
- lumbago
- dureri de spate
- spondiloză cervicală
- reumatism

# RHEUMASTOPLAST®

# RHEUMASTOPLAST®

## Beneficii

- Încălzește și deblochează articulațiile;
- Revigorează circulația sângelui, contribuie la reducerea proceselor inflamatorii;
- Are un efect benefic în reducerea durerilor articulare și musculare. Acționează prin efectul combinat al radiațiilor infraroșii de joasă frecvență și al undelor magnetice, contribuind la reducerea durerii și a inflamației.

## Aplicații

Plasturii au un efect favorabil în îndepărtarea durerilor cauzate de procesele reumatice, răceală, spondiloză cervicale, dureri musculare în zonele lombară și cervicală, osteoartrite, dureri de umăr, de coate, de genunchi și ale articulațiilor intervertebrale.

## Inovație

Undele infraroșii, cu lungimi de undă cuprinse între 4 - 16 micrometri, sunt absorbite de organism unde revigorează circulația sanguină și îndepărtează răceala și efectele reumatismului, contribuind la diminuarea durerilor. Câmpul magnetic generat de pudră are o intensitate de 100 mT. Efectul său este manifestat asupra punctelor de acupunctură (centrii principali de pe traseele meridianelor energetice).

## Efect

Plasturele determină încălzirea locală a regiunii tegumentare pe care este aplicat. Volumul circulației sanguine sporește, celulele și țesuturile sunt activate și funcțiile metabolice sunt stimulate.

Aplicarea este simplă și sigură, iar plasturele nu pătează hainele.

## Ingrediente

- Suport textil impregnat cu pulbere ceramică din aluminiu și siliciu, ce emite unde infraroșii de joasă frecvență;
- Pastilă cu efect magnetic permanent din neodim, fier și bor;
- Adeziv medicinal cu aromă de camfor.

## Mod de utilizare

- Spălați pielea cu apă și săpun și aplicați plasturele pe pielea perfect uscată. Îndepărtați folia de protecție și aplicați pe zona dureroasă, prin presare uniformă. Utilizați plasturele zilnic timp de 3 - 4 ore.

## Mod de prezentare

Doouă picuri a câte doi plasturi fiecare.

## Atenționări

Numai pentru uz extern. În timpul folosirii plasturilor a se evita consumul țigărilor, alcoolului și a mâncărurilor picante. Feriți contactul cu ochii sau cu rănilile deschise. A nu se folosi la copii, femei însărcinate sau persoane care poartă stimulator cardiac. Persoanele cu pielea rănită sau sensibilă nu ar trebui să utilizeze acest produs. Dacă se observă înroșirea pielii, iritații sau arsuri se întrerupe utilizarea imediat și se consultă medicul specialist. Nu aplicați plasturele mai mult de 12 ore. A se păstra la loc răcoros și uscat. A se utiliza înainte de data de expirare înscrisă pe ambalaj.



Wuhan Huawei Technology Co. Ltd., China  
B-F11-3, Huazhong International Industrial Park, Yangluo Port,  
430415, Wuhan, Hubei, China 430415



Humiss International B.V.

Joop Geesinkweg 701, 1114 AB Amsterdam - Duivendrecht,  
The Netherlands (Țările de Jos)

importat de:

Hyllan Pharma

București, sector 3, str. Turturelelor 11A  
tel. 021-425.5566 • www.hyllanpharma.ro



(01) 06945296011528

(11) 250831

(17) 270830

(10) H045



5 119 49 013 14 008 4 9



PhC: x