

PhC:2

3 teste  
bandă

# Teste de ovulație PROFECUND

Pentru un bebe în curând!



hyllan

dispozitiv medical



hyllan

3 teste  
bandă

## PROFECUND

Teste de ovulație

ABC  
IMPEN  
Tel: 0266-216217

hyllan

PROFECUND  
Teste de ovulație

1



Introduceți testul în urină.  
Scoateți-l după 15 secunde  
și așezați-l pe o suprafață  
dreaptă

Nu scufundați  
peste linia MAX!



2

Citiți rezultatele după 5  
minute, dar nu mai târziu  
de 10 minute

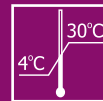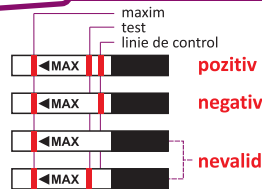

Consultați cu atenție instrucțiunile  
din interior înainte de utilizare

A se păstra la temperaturi între  
4°C și 30°C.

A nu se folosi după data expirării.  
Nu deschideți pachetul cu folie  
până nu sunteți pregătită  
să efectuați testul.



Shanghai Chemtron BioTech Ltd.  
518 Qingdai Rd, 201318 Shanghai, China

reprezentant Shanghai International Holding Corp. GmbH  
autorizat UE: Eifferstrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

importat de: HYLLAN PHARMA

București, str. Turturelelor 11A, et. 2  
tel. 021-425.5566 • www.hyllan.ro



5 1949013 1401303



0123



## PROFECUND

Teste de ovulație