

BORAMID®

Soluție auriculară
Dispozitiv medical

Acțiune:

BORAMID soluție auriculară curăță și întreține integritatea conductului auditiv extern, și ajută la regenerarea și cicatrizarea tegumentului acestuia. Se utilizează ca badijonaj auricular și ca adjuvant în eliminarea corpilor străini de la nivelul urechii externe, în cazul tegumentelor uscate și resturilor de cerumen la nivelul peretelui conductului auditiv extern. Este benefic în cazul traumatismelor cu corpi străini duri, în cazul eczemelor urechii externe, otitei externe difuze, iritațiilor la nivelul urechii cu sau fără suprainfecție. Datorită conținutului de glicerol, Boramid este emolient și antiseptic la nivelul tegumentului conductului auditiv extern.

Ingrediente:

10 ml Boramid soluție auriculară conțin: acid boric 23,72 mg, extract uscat de coajă de salcie 118,6 mg. Alte ingrediente sunt: glicerol, apă purificată.

Instrucțiuni de utilizare:

Se administrează:

- 3-4 picături de 3 ori pe zi în cazuri de curățare și întreținere a conductului auditiv extern,
- 5-6 picături în cazul corpilor străini în cavitatea auriculară,
- badijonaj auricular în cazul tegumentelor uscate ale conductului auditiv extern și în urme de cerumen pe peretele conductului.

Precauții

Nu utilizați dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui produs. Întrerupeți utilizarea dacă apare vreun disconfort. Nu se utilizează în cazul bolilor

urechii sau perforațiilor membranelor timpanice.

Atenționări

Nu lăsați la îndemâna și vederea copiilor mici. A nu se înghiți. Nu utilizați după data de expirare. Pentru utilizarea dispozitivului medical în timpul sarcinii și alăptării trebuie să consultați un medic.

Condiții de păstrare:

Păstrați Boramid soluție auriculară într-un loc uscat și departe de căldură directă sau surse de lumină. Deschideți flaconul doar înainte de utilizarea produsului. A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este deteriorat. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.


Mod de prezentare:

Cutie cu un flacon a 10 ml soluție, prevăzut cu aplicator.

Mod de eliminare

Produsul expirat sau consumat trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare în privința eliminării deșeurilor. Nu aruncați în niciun caz produsul sau ambalajul acestuia în mediul înconjurător.

Producător/Distribuitor:

 Biofarm S.A.
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, București,
România
Tel: 021.30.10.600.

Ultima revizie a informațiilor: iulie 2022



Experiința acumulată de-a-lungul anilor ne-a învățat o mulțime de lucruri: responsabilitate, performanță, inovație, grijă și, mai presus de orice, faptul că aceste valori au sens doar dacă sunt puse în slujba oamenilor. De aceea, noi, Biofarm®, lucrăm zi de zi, oră de oră, pentru oameni, pentru sănătatea și starea ta de bine. Ne certificăm și recertificăm periodic la cel mai înalt standard internațional toate sistemele, liniile de producție și orice alt aspect care ține de promisiunea noastră - să oferim produse sigure și de cea mai bună calitate.

 **BIOFARM®**