



LOT

BORAMID

SOLUȚIE AURICULARĂ



DISPOZITIV MEDICAL

BORAMID

SOLUȚIE AURICULARĂ
DISPOZITIV MEDICAL

Ațiune:
BORAMID soluție auriculară curată și întreține integritatea conductului auditiv extern, și ajută la regenerarea și cicatrizarea tegumentului acestuia. Se utilizează ca badijonaj auricular și ca adjuvant în eliminarea corpiilor străini de la nivelul urechii externe, în cazul tegumentelor uscate și resturilor de cerumen la nivelul peretelui conductului auditiv extern. Este benefic în cazul traumatismelor cu corpi străini duri, în cazul eczemelor urechii externe, otitei externe difuze, iritațiilor la nivelul urechii cu sau fără suprainfecție. Datorită conținutului de glicerol, Boramid este emolent și antiseptic la nivelul tegumentului conductului auditiv extern.

Instrucțiuni de utilizare:

- Se administrează:
- 3-4 picături de 3 ori pe zi în cazuri de curățare și întreținere a conductului auditiv extern,
 - 5-6 picături în cazul corpiilor străini în cavitatea auriculară,
 - badijonaj auricular în cazul tegumentelor uscate ale conductului auditiv extern și în urme de cerumen pe peretele conductului.

BORAMID

SOLUȚIE AURICULARĂ
DISPOZITIV MEDICAL

Ingrediente:
10 ml Boramid conține: acid boric 23,72 mg, extract uscat de coajă de salcie 118,6 mg. Celelalte componente sunt: glicerol, apă purificată.

Precauții:

Nu utilizați dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui produs. Întrerupeți utilizarea dacă apare vreun disconfort.
Nu se utilizează în cazul bolilor urechii sau perforațiilor membranelor timpanice.

Producător/Distribuitor:

Biofarm S.A.
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3,
București, România
Tel: 021.30.10.600.

Certificat de înregistrare nr.: RO/I-107-262-01/2009



BIOFARM

BORAMID

SOLUȚIE AURICULARĂ
DISPOZITIV MEDICAL

Atenționări
Citiți prospectul înainte de utilizare. Nu lăsați la îndemână și vederea copiilor mici. A nu se înghiți. Nu utilizați după data de expirare. Pentru utilizarea dispozitivului medical în timpul sarcinii și alăptării trebuie să consultați un medic.

Condiții de păstrare:

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Mod de prezentare:

Cutie cu un flacon a 10 ml soluție, prevăzută cu aplicator.



CE 10 ml

BORAMID



5 944704 015173