

HYALO4 SKIN cremă

*Acid hialuronic sare de sodiu 0,2%
pentru uz cutanat*

Descrierea produsului

HYALO4 SKIN Cremă este un preparat topic ce conține acid hialuronic ca principală componentă. Acidul hialuronic este un polizaharid natural (glucozaminoglican) prezent în matricea extracelulară a majorității țesuturilor. Datorită proprietăților sale hidrofile, formează un spațiu hidratat în jurul celulelor și între acestea, ceea ce facilitează migrarea celulelor.

Compoziție

Componenta principală: acid hialuronic sare de sodiu 0,2%

Alte componente: polietilenglicol 400 monostearat, decil ester al acidului oleic, ceară emulsificatoare, glicerol, sorbitol soluție 70%, dehidroacetat de sodiu, metil p-hidroxibenzoat, propil p-hidroxibenzoat, parfum, acid lactic, apă purificată.

Indicații

HYALO4 SKIN Cremă este indicat pentru tratamentul iritațiilor și al leziunilor cutanate. În mod special, se folosește pentru acoperirea suprafețelor plăgilor acute (situs donator, incizii post-chirurgicale, arsuri de gradul 1 și 2) și plăgilor cronice (ulcere vasculare și metabolice și escare).

Doze și mod de administrare

Plăgile sau ulcerile trebuie curățate și dezinfectate înainte de aplicarea tratamentului. Se aplică un strat subțire de cremă pe suprafața plăgii, de două sau de mai multe ori pe zi timp de cel mult 30 de zile consecutive. Suprafața tratată trebuie acoperită cu un pansament și o fașă sterile.

Contraindicații

A nu se utiliza la pacienții cu hipersensibilitate individuală demonstrată la componentele produsului.

Atenționări și precauții speciale privind utilizarea

Numai pentru uz extern.

A nu se utiliza în cazul deteriorării ambalajului.

A nu se utiliza produsul după data expirării înscrisă pe ambalaj.

Data expirării se aplică produselor depozitate în ambalajul original la o temperatură care să nu depășească 30 °C.

După deschiderea tubului, produsul poate fi utilizat timp de 12 luni.

A se evita contactul direct între recipient și plagă.

Fiecare tub de HYALO4 SKIN Cremă trebuie utilizat de către un singur pacient pentru a se reduce riscul transmiterii infecției.

În cazul sarcinii, alăptării sau a utilizării la copii, consultați medicul înainte de utilizarea produsului, deoarece siguranța și eficacitatea HYALO4 SKIN nu a fost evaluată în aceste cazuri.

După utilizare, aruncați produsul în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.

A nu se lăsa la îndemâna sau vederea copiilor.

Reacții adverse

Următoarele reacții adverse locale pot apărea ocazional: eritem la locul aplicării, senzație de mâncărime, senzație de arsură, iritație a pielii, uscăciune, eritem, dermatită, decolorarea pielii.

Un efect tranzitoriu de gust metalic (disgeuzie) poate apărea cu incidență foarte mică și poate fi în legătură cu afecțiuni preexistente ale pacientului.

Manifestările sunt de obicei tranzitorii, ușoare ca severitate și rareori necesită întreruperea tratamentului.

Interacțiuni

A nu se utiliza concomitent cu dezinfectante pe bază de săruri cuaternare de amoniu deoarece acidul hialuronic precipită în prezența acestora. Utilizarea concomitentă în tratamentul topic al plăgilor a antibioticelor sau a altor agenți topici cu HYALO4 SKIN Cremă nu a determinat interacțiuni sau incompatibilități.

Depozitare

A se depozita la temperaturi care să nu depășească 30 °C.

Ambalare

Cutie de carton ce conține un tub de 25 g

Producător

FIDIA Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A 35031 Abano Terme (Padova) Italia

Data ultimei revizui a prospectului:

Noiembrie 2020

CE 0123