

Adultii și copiii: Se aplică o cantitate mică de gel (1 - 2 picături) pe zona afectată a cavității bucale. Gelul poate fi aplicat cu ajutorul unui tampon sau cu degetul curat. Repetați aplicarea de 3 - 4 ori pe zi. Pentru o permită dispozitivului să creeze o peliculă de protecție pe suprafața mucoasei, evitați atingerea zonei pe care a fost aplicat gelul. Nu se consumă alimente sau băuturi timp cel puțin o oră de la aplicarea gelului.

INGREDIENTE: Propilenglicol, apă, panteol, hidroxifenilic- lozid, sorbat de potasiu, zahărul sodic, acid citric, clorură de benzoilamină, acid gliceric.

Dispozitivul medical **AftiBLOCK** creează o peliculă de protecție în suprafața mucoasei orale incluzând leziuni provocate de aparate dentare și proteze dentare fixe de protecție dentare și proteze dentare fixe de protecție dentare. Acest dispozitiv medical este recomandat în ulcer bucal, stomatită aftoasă, candidoză bucală sau afte orofaringiene.

LOT

Ameliorează durerea prin crearea unei pelicule de protecție

- afte
- candidoze bucale
- microleziuni

AftiBLOCK[®]

AftiBLOCK[®]

Dispozitiv medical

Gel pentru administrare orală

A

Atenționări și precauții de utilizare: A nu se utiliza de către persoanele alergice la oricare dintre ingredientele produsului. A se evita contactul cu ochii.

Locul și condițiile de depozitare: A nu se lăsa la vedere și la îndemâna copiilor. A se păstra în ambalajul original, la temperaturi între 8°C - 25°C. Produsul nu se va utiliza după expirarea termenului de valabilitate.

Producător: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31, 01-918 Varsovia, Polonia

Distribuitor: ZDROVIT România S.R.L. Str. Sevastopol,
nr. 13-17, București, România, Tel: 021.310.65.15



8g