

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare întrucât conțin informații importante pentru pacient cu privire la modul corect de utilizare al produsului.

Dispozitivul medical **Acustivum**[®] se eliberează fără prescripție medicală.

Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru a le putea reciti la nevoie.

Pentru orice întrebări, vă rugăm să contactați medicul sau farmacistul.

Înainte de prima utilizare apăsați repetat dozatorul (aproximativ 10 repetări) până se creează efectul de vacuum și soluția este pulverizată. Presiunea aplicată repetat dozatorului, la prima utilizare, reprezintă o dovadă a calității și siguranței produsului Acustivum[®], în sensul neutilizării anterioare a acestuia de către o altă persoană.

Acustivum[®]

Dispozitiv medical

Spray auricular
20 ml

1. Ce este dispozitivul medical Acustivum[®] și pentru ce se utilizează?

ACȚIUNE:

Ingredientele dispozitivului medical **Acustivum**[®] dizolvă cu blândețe ceara de urechi formată în canalul auditiv extern și umezește ușor canalul auditiv, facilitând eliminarea cerumenului și îndepărtarea blocajelor de ceară.

Dispozitivul medical asigură menținerea igienei corespunzătoare a urechii și protejează împotriva infecțiilor, hrănește pielea canalului auditiv extern.

Utilizat profilactic, preparatul previne formarea blocajelor de ceară prin sprijinirea procesului natural de autocurățare a canalului auditiv.

Prin acoperirea pielii canalului auditiv cu un strat delicat, produsul creează o barieră de protecție împotriva lichidelor care pot intra în interiorul urechii și reținerea apei în urechi în timpul băii sau sporturilor de apă.

Uleiul de floarea soarelui, de migdale dulci, de măsline și de jojoba, conținute de **Acustivum**[®], hrănesc pielea uscată sau iritată a canalului auditiv extern.

INDICAȚII:

Utilizarea dispozitivului medical **Acustivum**[®] este destinată persoanelor care:

- au producție excesivă de ceară;
- prezintă dopuri de ceară;
- au canalul extern auditiv deformat sau îngust, cu tendință de uscare a cerumenului;

- utilizează căști audio introduse în canalul auditiv extern (de exemplu, persoane cu deficiențe de auz cu aparate auditive, căști pentru telefon sau alte dispozitive electronice);

- care practică sporturi nautice (de exemplu, înot, scufundări);

- după intervenții chirurgicale – doar în urma unui consult, cu acordul medicului.

Dispozitivul medical Acustivum[®] este recomandat pentru copiii în vârstă de peste 6 luni și adulți.

INGREDIENTE: Ulei de floarea soarelui, ulei de migdale dulci, parafină lichidă, ulei de măsline, ulei de jojoba, polisorbit 80, PPG-8, tocoferol (vitamina E), palmitat de ascorbil (vitamina C), acid ascorbic (vitamina C), acid citric, alcool benzilic, fenoxietanol, etilhexil glicerină.

Nu conține apă.

2. Informații importante înainte de utilizarea dispozitivului medical Acustivum[®]

EFECTE NEDORITE:

Nu au fost raportate.

CONTRAINDICAȚII:

Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

Nu utilizați în cazul bolilor urechii, perforațiilor membranelor timpanice sau existenței de corp străin în ureche.

Nu utilizați în ochi, nas sau cavitatea bucală.

Nu utilizați la copii cu vârsta sub 6 luni.

PRECAUȚII:

Nu utilizați produsul la sugarii cu vârsta sub 6 luni; dacă este utilizat la copii cu vârsta sub 1 an, se recomandă consultarea medicului.

La sugari și copii mici dispozitivul medical trebuie utilizat cu precauție extremă de către un adult.

Nu introduceți aplicatorul prea adânc în ureche ca să nu deteriorați sistemul auditiv.

În cazul dizolvării dopurilor de ceară, dacă problemele auditive nu se îmbunătățesc după 5 zile, contactați medicul.

3. Cum se utilizează dispozitivul medical Acustivum®?

Țineți cont de aceste sfaturi pentru utilizarea corectă a dispozitivului medical **Acustivum®**.

Din motive de igienă, produsul trebuie utilizat de o singură persoană.

Datorită modalității de aplicare, produsul este distribuit uniform în canalul auditiv, astfel încât nu este necesară introducerea profundă a aplicatorului în ureche.

Utilizare:

Copii și sugari de la 6 luni:

o pulverizare în canalul auditiv extern.

Adulți:

1-2 pulverizări în canalul extern.

◆ Dizolvarea dopurilor de ceară:

• utilizați de 2-3 ori pe zi, până la dizolvarea rezidurilor de ceară.

◆ Utilizare profilactică și igiena urechii:

• utilizați 1-2 ori pe săptămână pentru prevenirea apariției blocajelor datorate dopurilor de urechi;

• utilizați înainte de baie, pentru a preveni reținerea apei în ureche.

Nu este nevoie să clătiți canalul auditiv după ce ați utilizat produsul.

După utilizare, vârful aplicatorului trebuie spălat sub jet de apă și uscat delicat.

4. Utilizarea unei doze mai mari de Acustivum® decât cea recomandată

Nu utilizați doze mai mari decât cele recomandate.

Nu au existat cazuri de supradozaj cu dispozitivul medical **Acustivum®**.

5. Cum se depozitează dispozitivul medical Acustivum®?

A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor mici.

A se păstra la temperaturi între +15°C și +25°C.

Fiți atenți la condițiile de păstrare corespunzătoare ale produsului.

Nu utilizați dispozitivul medical **Acustivum®** după expirarea datei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.

6. Informații suplimentare

Cum arată dispozitivul medical **Acustivum®** și care este conținutul pachetului?

Acustivum® este un lichid limpede, uleios, galben și inodor.

Ambalaj: flacon din polietilen tereftalat (PET) de 20 ml, închis cu pompă dozatoare, într-o cutie de carton.

Flaconul conține 20 ml soluție.



Producător:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Varșovia, Polonia

Distribuitor:

ZDROVIT România S.R.L.
Str. Sevastopol nr.13-17
București
Tel.: 021.310.65.15

Dispozitiv medical 

Data ultimei actualizări a instrucțiunilor de utilizare: 06/2018

Semnificația simbolurilor de pe ambalaj:



temperatura de păstrare
(15°C - 25°C)



vezi instrucțiunile de utilizare



termen de valabilitate



număr de serie



producător

