

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție prospectul întrucât conține informații importante legate de modul de utilizare.

Dispozitivul medical ClinSin® spray se eliberează fără prescripție medicală. Pentru efecte optime, respectați instrucțiunile de utilizare.

Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru a le putea reciti la nevoie. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați medicul sau farmacistul.

ClinSin® spray

Spray nazal
30 ml
Dispozitiv medical

1. Ce este dispozitivul medical ClinSin® spray și pentru ce se utilizează

ACȚIUNE:

Dispozitivul medical ClinSin® spray este un spray nazal conceput pentru a sprijini tratamentul și curățarea nasului în timpul infecțiilor bacteriene și fungice ale nasului și a sinusurilor. Spray-ul ajută la curățarea nasului și sinusurilor de secrețiile reziduale, inhibă dezvoltarea bacteriană. Regenerează și hidratează mucoasa nazală.

Preparatul are eficacitate ridicată datorită combinației inovatoare de argint și cupru. Ajută la combaterea rapidă și multidirecțională a infecțiilor.

Datorită proprietăților argintului, produsul asigură curățarea, protecția antibacteriană și îngrijirea membranelor mucoase. Acesta inhibă înmulțirea agenților patogeni nocivi care se acumulează pe mucoase. Cuprul susține tratamentul leziunilor fungice din nas și sinusuri.

Pantenolul regenerează, întărește și hidratează mucoasele, îmbunătățind starea generală.

Uleiul de eucalipt și clorura de sodiu

curăță tractul respirator superior, reduc secrețiile nazale și facilitează respirația.

Dispozitivul medical ClinSin® spray este recomandat în special în cazul infecțiilor tractului respirator superior.

INDICAȚII:

Susține tratamentul infecțiilor bacteriene și fungice ale nasului și sinusurilor.

Dispozitivul medical este destinat doar adulților.

INGREDIENTE:

Apă, polisorbit 20, glicerină, pantenol, clorură de sodiu, ulei de eucalipt, sorbat de potasiu, hidroxipropilceluloză, nanoparticule de argint, nanoparticule de cupru, acid citric.

UTILIZARE:

ClinSin® spray este o combinație unică de argint și cupru.

Dispozitivul medical ClinSin® spray:

- susține tratamentul infecțiilor nazale și sinusale
- oferă protecție antibacteriană pentru nas și sinusuri
- oferă protecție antifungică pentru mucoase
- curăță membranele mucoase
- regenerează mucoasele
- facilitează respirația
- hidratează mucoasa nazală

2. Informații importante înainte de utilizarea dispozitivului medical ClinSin® spray

CONTRAINDICAȚII:

Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului. Evitați contactul cu ochii. Nu utilizați la copii.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII:

În cazul oricărei reclamații, utilizarea produsului ar trebui întreruptă. Nu utilizați după expirarea datei de valabilitate.

Utilizați produsul în 4 săptămâni de la prima deschidere.

UTILIZARE ÎN TIMPUL SARCINII ȘI ALĂPTĂRII:

Nu există date privind siguranța utilizării produsului în timpul sarcinii și alăptării. Înainte de a utiliza preparatul în timpul sarcinii și alăptării, consultați un medic sau farmacist.

EFECTE SECUNDARE ȘI INTERACȚIUNI:

Nu există date despre apariția efectelor secundare asociate cu utilizarea produsului. Nu a fost depistată nicio interacțiune.

INCIDENTE MEDICALE:

Nu au fost observate atunci când se utilizează în mod corect produsul.

3. Cum se utilizează dispozitivul medical ClinSin® spray

Țineți cont de aceste sfaturi pentru utilizarea corectă a dispozitivului medical ClinSin® spray.

Utilizare:

Adulți: se aplică de câteva ori pe zi câte 2-3 pufuri în fiecare nară. Agitați tubul înainte de utilizare. Din motive de igienă, se recomandă utilizarea produsului de o singură persoană.

Dispozitivul medical este destinat doar adulților.

Nu utilizați produsul la copii, decât cu recomandarea medicului.

Nu utilizați doze mai mari decât cele recomandate.

Durata de utilizare a dispozitivului medical ClinSin® spray depinde de durata afecțiunii, totuși nu trebuie să depășească 7 zile.

4. Cum se depozitează dispozitivul medical ClinSin® spray

A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor.

A se depozita la temperatura camerei, preferabil între 15°C și 25°C. Protejați de lumină și umiditate, în ambalajul original.

Nu utilizați dispozitivul medical după expirarea datei de valabilitate menționată pe ambalaj. Data de valabilitate se referă la ultima zi din luna menționată.

Utilizați produsul în 4 săptămâni de la prima deschidere.

5. Informații suplimentare

Cum arată dispozitivul medical ClinSin® spray și care este conținutul pachetului

ClinSin® spray este un lichid limpede, incolor, ușor opalescent și cu parfum perceptibil de ulei de eucalipt.

Ambalaj:

Spray de 30 ml cu capac, într-o cutie de carton cu instrucțiuni de utilizare incluse.



Producător:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31,
01-918 Varșovia, Polonia

Distribuitor:

ZDROVIT România S.R.L.
Str. Sevastopol nr. 13-17
București
Tel.: 021.310.65.15

Dispozitiv medical 

Data ultimei actualizări a instrucțiunilor de utilizare: 09.2019

Semnificația simbolurilor de pe ambalaj:



număr de serie



termen de valabilitate



Producător



vezi instrucțiunile de utilizare



temperatura de păstrare 15° - 25°C

