



UV GLOSS VARNISH

UNVARNISHED

Atenționări:

Dacă în decurs de 7 zile nu se observă nicio ameliorare sau simptomele se agravează, întrerupeți utilizarea produsului și consultați un medic.

Din motive de igienă și pentru a evita răspândirea unei infecții, se recomandă ca produsul să fie utilizat de o singură persoană. Nu utilizați produsul după expirarea datei de valabilitate menționată pe ambalaj sau dacă ambalajul este deteriorat.

Contraindicații:

Nu utilizați în caz de hipersensibilitate (alergie) la oricare dintre ingredientele produsului. Nu introduceți gelul în ochi sau în urechi.

Producător:
Gofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Górników 21/26
30-819 Cracovia
Polonia

Distribuitor:
Zdrovit România S.R.L.
Str. Sevastopol nr. 13-17
București
Tel.: 021.310.65.15

REF CH27
15°C
-25°C



LOT

Compoziție:

Ingrediente principale: hialuronat de sodiu cu masă moleculară mare, suc din frunze de aloe vera, xilitol.

Ingrediente secundare: apă purificată, glicerină, hidroxietilceluloză, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, clorură de cetilpiridiniu, aromă de zmeură, acid lactic.

Are o aromă plăcută de zmeură.
Produsul este destinat pentru sugari de la vârsta de 2 luni.

Gingicalm® gel este un dispozitiv medical sub formă de gel, utilizat topic pentru a crea o peliculă protectoare pe suprafața gingiilor.

Gingicalm® gel ameliorează simptomele cauzate de erupția dentară, inclusiv:

- durere
- gingii inflamate
- roșeață și salivație

Dispozitiv medical
Gingi calm gel

Dispozitiv medical

Gingicalm®

Gel gingival pentru uz topic



Ameliorează simptomele locale ale erupției dentare

+2 luni

15 ml

Utilizare:

Gingicalm® gel trebuie utilizat conform instrucțiunilor de utilizare. Dacă aveți întrebări, consultați medicul. Preparat pentru uz topic pe gingii. Spălați bine mâinile înainte de utilizare. Utilizați produsul de 3 până la 6 ori pe zi, de preferință după masă și înainte de culcare. Aplicați o cantitate mică de gel (1-2 picături) pe degetul curat, pe o periuță de silicon sau pe o compresă sterilă, umedă. Masați delicat gingiile timp de 2-3 minute. Pentru a prelungi efectul gelului, evitați consumul de apă și mâncare după aplicarea acestuia.

Dispozitivul medical **Gingicalm® gel** trebuie folosit până la dispariția simptomelor, dar nu mai mult de 7 zile.