

BlephaCura® Mască cu gel pentru ochi

Cald / Rece

Se poate încălzi în: **Cuptor cu microunde** | Baie de apă

Se poate răci în: **Frigider**

Fără ftalați. Cu bandă de fixare flexibilă.

Instrucțiuni de utilizare

Încălzire în cuptorul cu microunde:

Înfășurați masca într-o cârpă umedă și încălziți-o în cuptorul cu microunde conform tabelului. Asigurați-vă că gelul este distribuit uniform. Înainte de utilizare, verificați temperatura pe partea interioară a încheieturii mâinii. Dacă este necesar, continuați încălzirea la intervale de 5 secunde până când se atinge temperatura dorită.

Încălzire în baie de apă:

Introduceți masca într-un recipient cu apă caldă, la aproximativ 45°C, timp de câteva minute. **Nu folosiți apă clocotită.**

Sfaturi de utilizare

1. Se recomandă utilizarea măștii de 1–2 ori pe zi, de preferat dimineața și seara. Îndepărtați lentilele de contact înainte de utilizare.
2. Încălziți masca într-un recipient cu apă caldă (~45°C) sau în cuptorul cu microunde. Consultați instrucțiunile de utilizare menționate mai sus.
3. Pentru a evita contactul direct cu pielea, aplicați între pielea feței/pleoape și mască o compresă umedă sau un disc de bumbac.
4. Aplicați masca încălzită pe pleoapele închise timp de aproximativ 4–10 minute și fixați-o cu banda de fixare flexibilă și detașabilă.
5. După îndepărtarea măștii, masați ușor marginile pleoapelor.
6. Curățați pleoapele cu un disc de bumbac fără scame, de preferat îmbibat cu soluția **BlephaCura® Med Lidcare**
7. În funcție de frecvența utilizării, metoda de încălzire și uzura măștii, aceasta poate necesita înlocuirea după o anumită perioadă de timp.

Puterea cuptorului cu microunde	Timp maxim de încălzire
700 W	15 secunde
1000 W	12 secunde
1250 W	10 secunde

Răcire:

Răciți masca în frigider timp de cel puțin 2 ore. Contactul maxim recomandat cu pielea: 20 de minute.

Trei pași pentru îngrijirea optimă a pleoapelor

1 **Încălziți pleoapele**, prin aplicarea **BlephaCura® Mască pentru ochi** timp de 4–10 minute, pentru a lichefia și a dizolva secrețiile vâscoase și îngroșate ale glandelor Meibomius și de pe marginile pleoapelor.

2 **Masați pleoapele** pentru a îndepărta ușor secrețiile lichefiate. Cu ochii închiși, masați ușor cu degetul, prin mișcări repetate, pleoapa superioară de sus în jos, pleoapa inferioară de jos în sus, în fiecare caz spre fanta palpebrală, apoi dinspre colțul exterior spre cel interior al pleoapei.

3 **Curățarea pleoapelor** pentru îndepărtarea secrețiilor, depunerilor și germenilor. Cu ochii închiși, folosind un disc de bumbac (ex. BlephaCura® Pads) îmbibat cu soluție de curățare (ex. BlephaCura® Med Lidcare), curățați pleoapele conform indicațiilor de mai sus.

Avertismente

Citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de utilizare de pe ambalaj. Îndepărtați lentilele de contact înainte de utilizare. În caz de sensibilitate la cald/rece, întrerupeți utilizarea și solicitați sfatul medicului, dacă este necesar. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat (gelul roșu se scurge), aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere. Nu aplicați masca simultan cu picături, geluri sau unguente oftalmice, așteptați cel puțin 15 minute între utilizări. Dacă pielea sau ochii au intrat în contact cu conținutul măștii, clătiți bine zonele afectate cu apă curată. După fiecare utilizare, curățați masca cu apă și săpun. Produsul nu este destinat consumului! Nu supraîncălziți masca. Nu o congelați. Evitați contactul direct cu pielea pentru a preveni arsurile sau degerăturile. Nu perforați masca și nu așezați obiecte grele pe ea. A se păstra la loc răcoros. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se utiliza de către copiii sub 3 ani. Pentru copiii peste 3 ani, a se utiliza doar sub supraveghere și după recomandare medicală.

Compoziție: PVC, 70% apă, 25% glicerină, 5% CMC-Na (carboximetilceluloză sodică), pigment roșu alimentar (sigur pentru utilizare externă). Banda de fixare: Conține latex.

Lot: A se vedea Ch.B. pe ambalaj

Distribuitor România: Inocare Pharm SRL

Str. Barbu Mumuleanu, Nr.30, Sector 2, RO-Bucuresti

Distribuitor Germania: Optima Pharmazeutiche GmbH

Am Soldnermoos 17, DE-85399 Hallbergmoos, Germania

Persoana responsabilă pentru introducerea pe piață :

ERAC GmbH, DE-86415 Mering, Germania

Adresă de contact: service@erac.de

Cod articol: 92850