

## Test de ovulație digital Clearblue, 1 dispozitiv și 10 benzi de testare

**Clearblue**

**Maximizați-vă șansele de a rămâne însărcinată**

Fără creștere a nivelului de LH    Creștere a nivelului de LH

Acesta este un dispozitiv medical.  
Citiți cu atenție prospectul.

### Detalii despre produs

- Identificați-vă cele mai fertile două zile: un test de urină de făcut acasă care vă indică cele mai fertile două zile, pentru a vă maximiza șansele de a rămâne însărcinată

**Identifică** cu acuratețe  
cele mai fertile **2 zile ale dvs.**




Telefonul nu este inclus.

Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

- Precizie de peste 99% în detectarea creșterii nivelului hormonului luteinizant (LH). Hormonii sunt un indicator mai precis al ovulației decât temperatura bazală a corpului (BBT), care crește doar după ovulație

## Urmărește cu precizie hormonul-cheie al fertilității (LH)

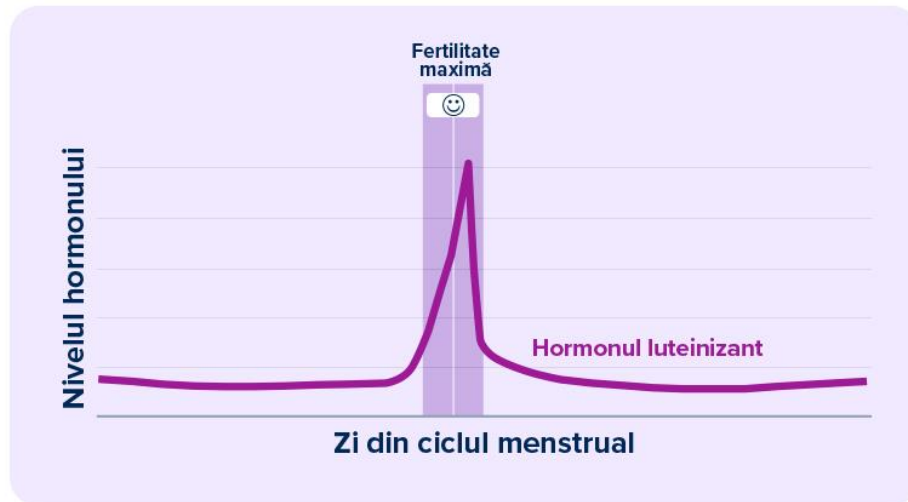

Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

- Ușor de citit: singura marcă care afișează o „față zâmbitoare” digitală atunci când detectează creșterea nivelului de LH în urină, înainte de ovulație
- Odată ce creșterea nivelului de LH este detectată, întrețineți relații sexuale în orice moment în următoarele 48 de ore pentru a vă maximiza șansele de a rămâne însărcinată
- 1 suport digital și 10 benzi de testare digitală a ovulației Clearblue incluse
- Încercați aplicația noastră GRATUITĂ de monitorizare a ciclului menstrual: vedeți în ce fază a ciclului menstrual vă aflați și observați cum variază probabilitatea de fertilitate maximă la femeile cu aceeași durată a ciclului ca a dvs. Folosiți testele de ovulație Clearblue pentru a identifica cele mai fertile zile.

Încercați să rămâneți însărcinată? Monitorizați-vă ciclurile menstruale în aplicația noastră GRATUITĂ, concepută pentru a fi utilizată împreună cu testele de ovulație digitale Clearblue. S-a demonstrat că utilizarea kitul de testare a ovulației Clearblue

digital vă ajută să rămâneți însărcinată (1), identificând cu precizie cele mai fertile două zile pentru concepție din fiecare ciclu menstrual.



## DORIȚI SĂ URMĂRIȚI CICLURILE DVS.?

Descărcați aplicația  
Clearblue® Period & Cycle  
Tracker ACUM!

Previzionați  
menstruațiile dvs.

Urmăriți ciclurile dvs.

Încercați să  
aveți un copil

Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

Testul de ovulație afișează o față zâmbitoare clară pe ecranul digital atunci când a fost detectată o creștere a nivelului de LH (hormon luteinizant), astfel încât să știți că ziua testării și următoarea sunt cele mai bune 2 zile pentru a rămâne însărcinată. Când încercați să rămâneți însărcinată, administrarea de acid folic sau de vitamine prenatale este un sfat bun, dar este foarte important să aveți relații sexuale la momentul potrivit din ciclul dvs.

Zilele de dinainte de ovulație și inclusiv ziua ovulației sunt singurele zile din fiecare ciclu menstrual în care o femeie poate rămâne însărcinată. Spre deosebire de graficele temperaturii bazale a corpului, kiturile de identificare a ovulației detectează creșterea hormonului luteinizant (testul LH) — un hormon cheie al fertilității care crește înainte de ovulație — pentru a detecta cu precizie zilele DINAINTE, și nu DUPĂ ovulație. Testul digital de ovulație Clearblue are o precizie de peste 99% în detectarea creșterii LH și a fost validat prin ecografie (2).

(1) Date despre produs în arhivă.

(2) Un studiu realizat pe 40 de femei a constatat concordanța cu ovulația observată prin ecografie.

## **Mod de utilizare**


Nu este destinat utilizării interne. Nu reutilizați benzile de testare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperaturi cuprinse între 2° și 30°C. Dacă produsul a fost păstrat la frigider, lăsați-l să ajungă la temperatura camerei timp de 30 de minute înainte de efectuarea testului. Nu utilizați produsul dacă ambalajul din folie este deteriorat. Nu utilizați produsul după data de expirare. Odată ce folia benzii de testare a fost deschisă, utilizați-l imediat. Acest produs conține baterii. Conține piese mici. Nu înghițiți niciun component al acestui dispozitiv. În caz de înghițire accidentală, solicitați asistență medicală. Raportați orice vătămare cauzată de utilizarea acestui produs către Clearblue și autoritatea competentă a statului membru. Utilizați benzile de testare pentru Testul digital de ovulație Clearblue numai împreună cu suportul. Nu este destinat utilizării contraceptive. Rezultatele trebuie citite pe afișaj și nu pe baza liniilor pe care le-ați putea vedea pe stick-ul de testare.

Eliminarea benzii de testare: după ce ați terminat de utilizat suportul, separați jumătatea superioară de cea inferioară, începând de la capătul cel mai apropiat de afișaj. Scoateți bateriile de sub capacul metalic central și eliminați-le conform schemei de reciclare corespunzătoare. Atenție: Nu dezasamblați, nu reîncărcați și nu aruncați bateriile în foc. Nu înghițiți. A se ține la distanță de copii. Eliminați restul suportului conform schemei de reciclare corespunzătoare pentru echipamente electrice. Nu aruncați echipamentele electrice în foc.

## **Riscuri și precauții**

Citratul de clomifen nu afectează testele, dar poate influența durata ciclului menstrual și, prin urmare, momentul în care ar trebui să efectuați testul. Este posibil să fie necesar să continuați testarea cu o nouă cutie. Este posibil să obțineți rezultate eronate dacă sunteți însărcinată, ați fost recent însărcinată, ați ajuns la menopauză, aveți funcția hepatică sau renală afectată sau suferiți de sindromul ovarului polichistic (SOP). Citiți întotdeauna instrucțiunile producătorului pentru orice medicament pe care îl luați înainte de efectuarea testului. Este posibil să obțineți rezultate eronate dacă luați medicamente pentru fertilitate care conțin hormon luteinizant (LH) sau gonadotropină corionică umană sau dacă luați antibiotice care conțin tetraciline. Citratul de clomifen nu afectează testele. Dacă ați încetat recent să utilizați contraceptive hormonale, ciclurile dvs. pot fi neregulate, așa că ar fi bine să așteptați până când ați avut 2 cicluri înainte de a efectua testul. Deoarece îngrijirea prenatală este foarte importantă pentru sănătatea

bebelușului, vă recomandăm să consultați medicul înainte de a încerca să concepeți. Consultați medicul dacă luați orice medicament sau aveți orice afecțiune medicală înainte de a planifica o sarcină. Dacă aveți o problemă de fertilitate diagnosticată medical, întrebați-vă medicul dacă acest test este potrivit pentru dumneavoastră și, dacă obțineți rezultate neașteptate, discutați-le cu medicul dumneavoastră. Dacă aveți sub 35 de ani și nu ați rămas însărcinată, vă recomandăm să consultați medicul după 12 luni. Dacă aveți peste 35 de ani, consultați medicul dacă nu ați rămas însărcinată după 6 luni și imediat dacă aveți ovulație.

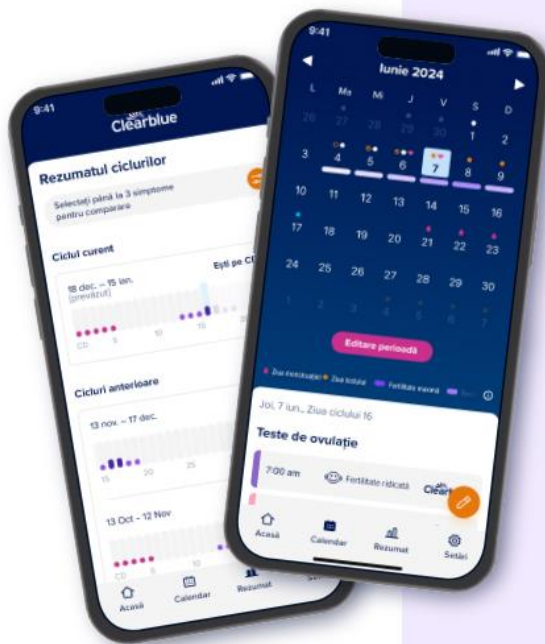

[www.clearblue.com/cycle-app](http://www.clearblue.com/cycle-app)

- **Înregistrați** rezultatele testelor de ovulație
- **Urmăriți** ciclurile și simptomele dvs.
- **Vedeți** predicțiile pentru zilele de fertilitate maximă și data în care este așteptată menstruația, în funcție de durata ciclului dvs. menstrual

Imaginile din aplicație au doar scop ilustrativ. Telefonul nu este inclus. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.