

180\*125mm 正面

Tradus din limba engleză

### Clinic Termometru cu lichid în sticlă

Fabricat în China

CE 0197

### Denumirea produsului

Termometru cu lichid în sticlă fără mercur

### Specificații

**Interval:** 35,0 °C până la 42,0 °C

**Rezoluție:** 0,1 °C

**Precizie:** +0,1 °C / -0,15 °C

**Condiții de funcționare:** Temperatură:  
-10 °C până la 42 °C

(Se pot măsura doar temperaturi mai mari decât temperatura ambiantă!)

**Condiții de depozitare:** Temperatură:  
-10 °C până la 42 °C

**Descriere:** Fabricarea și testarea termometrelor se efectuează în conformitate cu standardele

### Garanție de calitate:

\*Regulamentul 2017/745 privind dispozitivele medicale

\*EN12470-1:2000+A1:2009

Termometre clinice, Partea 1

Termometre metalice cu lichid în sticlă cu dispozitiv maxim.

**Termen de valabilitate:** 5 ani.

### Utilizare prevăzută

Termometru fără mercur, cu lichid în sticlă, pentru măsurarea temperaturii corpului.

Termometru analogic de tip maxim, cu lichid indicator.

### Materiale furnizate

#### Nr.crt. Materiale Cantitate

- 1 Termometru fără mercur, cu lichid în 1 sticlă
- 2 Carcasă din plastic 1


#### Principiul procedurii

Metal lichid - un nou lichid de măsurare netoxic - ecologic.

Termometrul fără mercur a fost dezvoltat de Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd. și

conține un aliaj lichid brevetat, format din galiu, indiu și staniu.

Metalul lichid este complet netoxic și prietenos cu mediul.

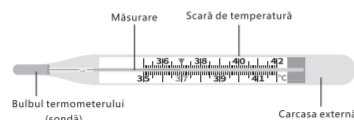

### Procedură

a. Termometrul trebuie folosit de o singură persoană și trebuie dezinfectat înainte și după utilizare pentru a preveni infecțiile încrucișate. Înainte și după măsurarea temperaturii, termometrul poate fi șters repetat cu o tabletă de alcool 75% de cel puțin 5 ori.

b. Înainte de a măsura temperatura pacientului, verificați că coloana de lichid se află sub 36°C.

c. Poziționați termometrul pe subraț conform metodei de măsurare ce va fi utilizată. Ștergeți subrațul cu un prosop uscat, plasați vârful termometrelui în subraț și țineți brațul pacientului ferm împotriva corpului acestuia.

d. După aproximativ 4 minute, termometrul va atinge temperatura corpului, iar lichidul din capilarul de măsurare al termometrelui va indica temperatura corpului pe scala de temperatură. Temperatura normală a corpului este în general 36,7°C.

e. Temperatura poate fi citită prin rotirea ușoară a termometrelui înainte și înapoi. f. După măsurare, lichidul trebuie adus la fundul scalei. Pentru a face acest lucru, apucați termometrul aproape de capătul superior și agitați-l cu mișcări rapide ale încheieturii de 15-20 de ori.

反面

Tradus din limba engleză

### Precauții

- Nu lăsați termometrul să cadă sau să fie supus la lovituri bruște.
- Nu îndoiiți și nu mușcați vârful termometrelui.
- Păstrați termometrul la distanță de copii.
- Nu utilizați termometrele dacă au carcasa exterioră deteriorată, deoarece există risc de rănire.
- ATENȚIE: Copiii trebuie să fie supravegheați de un adult pe tot parcursul procesului de înregistrare a temperaturii.
- Lichidul de măsurare, Metalul Lichid nu trebuie să intre în contact cu metale prețioase sau ușoare, deoarece reacționează cu aceste metale.
- La măsurare, vă rugăm să aveți grijă să evitați orice pericol sau rănire.
- Dacă termometrul se sparge, orice lichid vărsat poate fi îndepărtat folosind o perie, un șervețel sau o cârpă umezită în apă săpunată. Piesele sparte pot fi aruncate ca deșeuri menajere.

### Garanție

Sub rezerva utilizării normale, producătorul oferă o garanție nelimitată pentru funcționalitatea și precizia acestui termometru (cu excepția cazului de spargere a sticlei). Daunele aduse termometrelui prin manipulare necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

### Tabel simboluri

	Data expirării
	Data fabricației
	Cod de lot
	Atenție
	Identificator unic al dispozitivului
	Limită de temperatură
	Fragil, manipulați cu grijă
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Producător
	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
	Limită de stivuire
	A se păstra uscat
	Marcaj CE
	Dispozitiv medical

### Raport de incident

Raportați orice evenimente care implică vătămări sau defecțiuni către serviciul clienți al Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd. către reprezentantul dvs. de vânzări sau către autoritatea competentă.

VERSIUNE ȘI DATĂ DE MODIFICARE A INSTRUCȚIUNILOR  
Aprobat la 2 iulie 2025. Versiune: A / 4

### Perfect Medical®

Importator și distribuitor:  
sc. PERFECT MEDICAL s.r.l.  
loc. Sântion nr. 684 jud. Bihor  
România  
Tel./Fax: 0040 359 461 311  
E-mail: perfectmedical@yahoo.com  
www.perfectmedical.ro

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.  
No. 43, Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town,  
Wuxi City, 214194 Jiangsu  
P.R. China  
Email: wuximedical1968@gmail.com  
SRN: CN-MF-00002277

Lotus NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10.1e Verd,  
2595AA, The Hague,  
Netherlands.  
Tel: +31644168999  
Email: info@lotusnl.com  
SRN: NL-AR-00000121