

## MANUAL DE UTILIZARE

### Pisze 2 – Aspirator nazal cu aspiratie bucala pentru bebelusi si copii (0–6 ani)

**Detalii Produs:** Aspiratorul nazal Pisze este conceput pentru a ajuta la indepartarea secretiilor nazale din nasul bebelusilor si copiilor mici. Dispozitivul permite curatarea rapida, eficienta si sigura a mucusului prin aspiratie bucala controlata.

Este usor de utilizat, **silentios**, compact si simplu de curatat, fiind ideal pentru utilizarea acasa sau in deplasare.

#### Beneficii

- Curata rapid mucusul din nasul copilului
- Aspiratie controlata manual
- Functionare **fara zgomot**
- Usor de curatat si sterilizat
- Fabricat din materiale **fara BPA, biocompatibile**
- Dimensiune compacta, usor de transportat

#### Mod de utilizare

Asezati bebelusul pe spate si ridicati usor capul.

Introduceti piesa bucala in gura dumneavoastra.

Introduceti aplicatorul nazal in una dintre narile copilului.

Aspirati usor prin piesa bucala si cresteti gradual aspiratia.

Secretiile se vor colecta in rezervor.

Pentru eficienta maxima, astupati cu degetul cealalta nara in timpul aspiratiei.

Repetati procedura pentru ambele nari, daca este necesar.

**Recomandare:** Daca secretiile sunt uscate, utilizati ser fiziologic inainte de aspirare.

#### Curatare si intretinere

Partile din plastic si tubul din silicon sunt termorezistente

Sterilizati aspiratorul in apa fierbinte inainte si dupa fiecare utilizare

Lasati componentele sa se usuce complet si depozitati-le intr-un loc curat

**Nu utilizati in cuptorul cu microunde.**

**Atentionari:** Utilizarea trebuie facuta **cu atentie**, mai ales daca exista rani sau tendinte de sangerare la nivelul nasului. Produsul trebuie folosit **sub supravegherea unui adult**.

#### Continut pachet

1 x Aspirator nazal Pisze

3 x Filtre din burete

Aspiratorul nazal Pisze este un instrument indispensabil pentru îngrijirea sănătății bebelușului, asigurând o respirație mai ușoară și confortabilă.