

MANUAL DE UTILIZARE

ASPIRATOR NAZAL PISZE CU VARF DE SILICON CU CONECTARE LA ASPIRATORUL CASNIC

Detalii Produs:

Utilizare 0 luni +

Aspiratorul nazal Pische este un dispozitiv eficient destinat îndepărtării secrețiilor nazale, facilitând astfel respirația și prevenind complicațiile, începând cu prima zi de viață. Este ușor de utilizat, având un sistem de conectare la aspiratorul casnic, ceea ce îl face un instrument convenabil pentru părinți.

Asamblare:

1. **Îmbinarea Componentelor:** Capul de aspirație marcat cu "A" se introduce în tubul de colectare marcat cu "B".
2. **Formarea Vacuumului:** Partea marcată cu "C", în formă de clopot, se conectează la tubul flexibil al aspiratorului.
3. **Utilizare:** Porniți aspiratorul casnic și reglați puterea de aspirație cu ajutorul regulatorului de vacuum. Așezați partea colectoare în orificiul nazal și efectuați extragerea secreției. Aspirația trebuie să fie realizată cu întreruperi de câteva secunde până când secrețiile sunt complet eliminate.

Atenționări:

- Utilizarea aspiratorului necesită mare atenție la tendințele de sângerare, la rănilor orificiului nazal sau la sângerările cronice. Se recomandă utilizarea sub supraveghere.

Sterilizare:

- Se recomandă desprinderea tubului de colectare "B" de pe capul de aspirație "A". Acestea, împreună cu tubul de silicon, se curăță cu soluție dezinfectantă.
- **Interzis:** Utilizarea în cuptorul cu microunde. După uscare, păstrați în loc curat. Înainte de utilizarea ulterioară, sterilizați din nou și uscați, montând cu mâinile curate.

Aspiratorul nazal Pische este un instrument indispensabil pentru îngrijirea sănătății bebelușului, asigurând o respirație mai ușoară și confortabilă.

