

TRATAMENT PENTRU CICATRICI FORMULĂ CU SILICON DOVEDITĂ CLINIC

KELO-COTE® UV este un gel siliconic brevetat, ușor și cu uscare rapidă, destinat tratamentului cicatricilor. După aplicare, **KELO-COTE® UV** se usucă rapid, formând o peliculă flexibilă și impermeabilă, care acționează ca barieră de protecție împotriva invaziei chimice, fizice și microbiene la nivelul cicatricii, în timp ce menține hidratarea zonei afectate. Această barieră creează un mediu favorabil maturării cicatricii, prin normalizarea sintezei de colagen și contribuie la îmbunătățirea aspectului fiziologic și estetic al acesteia. În plus, **KELO-COTE® UV** ajută la protejarea cicatricilor împotriva efectelor noxive ale soarelui, prevenind înroșirea și hiperpigmentarea cauzate de expunerea solară, contribuind totodată la îmbunătățirea aspectului general al cicatricii.



Se recomandă ca, în timpul expunerii la soare, cicatricile să fie protejate suplimentar, prin aplicarea unei creme cu protecție solară la fiecare 2 ore. Bebeluși și copii mici trebuie feriți de lumina directă a soarelui. **KELO-COTE® UV** s-a dovedit eficient în aplatizarea, înmuierea și netezirea cicatricilor, precum și în ameliorarea mâncărimei, disconfortului și durerii asociate acestora. De asemenea, reduce decolorarea pielii în zona cicatricii. Gelurile pe bază de silicon s-au dovedit eficiente în tratamentul cicatricilor anormale, precum cicatricile hipertrofice și cheloide. Recomandările clinice internaționale din 2014, privind gestionarea cicatricilor susțin utilizarea siliconilor ca terapie de primă linie pentru tratamentul cicatricilor, hipertrofice liniare, al cheloidelor minore și pentru prevenirea cicatricilor hipertrofice.*

Utilizare preconizată:

KELO-COTE® UV este destinat tratamentului și prevenirii cicatricilor hipertrofice și cheloide, apărute în urma arsurilor, intervențiilor chirurgicale sau rănilor traumatice. **KELO-COTE® UV** este potrivit pentru utilizare atât pe față, cât și pe corp. **KELO-COTE® UV** poate fi aplicat pe articulații, în zone de flexiune, zone cu păr și pe cicatrici extinse, cum sunt cele provocate de arsuri sau traumatisme majore. **KELO-COTE® UV** poate fi folosit și la copii cu vârsta de peste 3 luni.

Instrucțiuni de utilizare:

Asigurați-vă că zona afectată este curată și uscată. Tăiați vârful aplicatorului cu o foarfecă curată înainte de prima utilizare. Aplicați un strat subțire și uniform, de două ori pe zi, folosind un deget curat. **KELO-COTE® UV** trebuie aplicat cu 30 de minute înainte de prima expunere la soare, în fiecare zi.

Pentru protecție suplimentară, se recomandă reaplicarea cremei cu protecție solară la fiecare 2 ore. Pentru eficiență maximă, **KELO-COTE® UV** trebuie să rămână în contact cu pielea 24 de ore pe zi. După uscare, se poate aplica o cremă cu protecție solară peste produs și se pot folosi produse cosmetice peste **KELO-COTE® UV**. Puneți capacul la loc după utilizare. Dacă **KELO-COTE® UV** nu s-a uscat în 4-5 minute, este posibil să fi aplicat o cantitate prea mare. Îndepărtați ușor excesul și lăsați produsul să se usuce complet. Durata minimă recomandată a tratamentului este de 60 - 90 de zile. Pentru cicatricile mai vechi sau de dimensiuni mai mari, poate fi necesară o utilizare mai îndelungată. Se recomandă continuarea aplicării atât timp cât se observă îmbunătățiri după primele 90 de zile.

Atenționări: Doar pentru uz extern. Nu utilizați dacă aveți hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele din **KELO-COTE® UV**.

Evitați contactul direct cu ochii, mucoasele, arsurile de gradul trei și rănilor deschise. **KELO-COTE® UV** nu trebuie utilizat pe piele a cărei integritate a fost afectată de afecțiuni dermatologice. În caz de iritație, opriți utilizarea și consultați medicul. **KELO-COTE® UV** poate păta hainele dacă nu este complet uscat. Țineți departe de surse de aprindere și nu fumați în timpul aplicării sau uscării produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperaturi sub 25°C. Nu utilizați după data de expirare (EXP) înscrisă pe tub. **Ingrediente:** dimeticonă, ciclopietasiloxan, octodien, miristat de izopropil, metoxicinamat de etilhexil, benzofenonă-3, salicilat de etilhexil, silice, copolimer de dimeticonă. **Continut:** 15g. Numărul lotului și data expirării sunt înscrisionate pe baza ambalajului. *Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831. Raportări orice problemă de siguranță la **DISTRIBUȚOR AMD NOBEL PHARMACEUTICAL SRL**, Str. Poet Barbu Mureanu nr. 8, 020543-București Tel.: 031 104 00 16 E-mail: clienti@amdnoobel.ro