

RINODEP®

Spray nazal

Dispozitiv medical sub formă de spray pentru mucoasa nazală

Prospectul conține informații importante pentru consumator: a se citi cu atenție, înainte de folosire. Produsul este un dispozitiv medical și se eliberează fără prescripție medicală. Pentru a obține o eficiență maximă, produsul trebuie utilizat conform indicațiilor. Păstrați prospectul pentru consultări viitoare, în caz de nevoie. Pentru mai multe informații sau sfaturi, adresați-vă medicului și/sau farmacistului.

COMPOZIȚIE

Apă demineralizată; apă de mare concentrată; macerat glicerinic din: boboc de arin negru, muguri de coacăze negre, lăstari tineri de măceș, extract de flori de Calendula; extract uscat de semințe de Perilla; gluconat de mangan; glicerol; carboximetil celuloză; aromatizant; acid malic; sorbat de potasiu; benzoat de sodiu. **NU CONȚINE GLUTEN SAU LACTOZĂ.**

CE FEL DE PRODUS ESTE

RINODEP® spray nazal este un dispozitiv medical util în caz de rinită alergică, rinosinuzită și sinuzită, pentru ameliorarea rapidă a simptomelor și pentru o protecție eficientă împotriva atacurilor ulterioare ale substanțelor responsabile de reacții alergice (alergenii, praf, poluare); eliberează nasul înfundat îmbunătățind respirația, ajută la scurgerea secrețiilor și, datorită efectului fluidifiant asupra mucusului, este indicat pentru curățarea cavității nazale.

INDICAȚII

Spray-ul nazal RINODEP® este o soluție hipertonică hidrosalină, care curăță cavitățile nazale și subțiază mucusul, îndepărtând excesele și eliminând mecanic alergenii din cavitățile nazale. Datorită unui efect de barieră, produsul protejează și calmează mucoasa nazală iritată, formând un film care o protejează și limitează contactul cu agenții externi (polen, acarieni, păr de animal, praf), limitând hiperreactivitatea și contracarând manifestările alergice. Păstrează mucoasa hidratată.

DOZE ȘI SCHEMĂ DE ADMINISTRARE

Se recomandă utilizarea:

- Adulți și copii cu vârsta de peste 6 ani: 1-2 pulverizări în fiecare nară, de 3 ori pe zi
- Copii cu vârsta de peste 2 ani: 1 pulverizare în fiecare nară, de 1-2 ori pe zi sau conform indicațiilor medicului. Poate fi folosit în orice moment al zilei. Durata de utilizare depinde de modul de evoluție a simptomelor; dacă este necesar, produsul poate fi folosit pentru o perioadă mai îndelungată. Durata tratamentului nu trebuie să depășească 30 de zile. Agitați înainte de folosire. După deschidere, folosiți produsul în maxim 2 luni.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

La prima utilizare, apăsați de câteva ori clapetele pulverizatorului pentru a obține o pulverizare regulată. Poate fi necesară repetarea acestei operațiuni dacă spray-ul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Se recomandă utilizarea personală a dispozitivului medical. Spălați-vă pe mâini înainte de a folosi dispozitivul medical.

DISPOZITIV MEDICAL  1370



erbozeta
ENERGIA VERDE



Erbozeta S.p.A. Strada delle Sierole, 41/43 - 47894 Chiesanuova (RSM)
www.erbozeta.com | info@erbozeta.com



Erbozeta Austria GmbH Graben 12, 1010 Vienna (AUSTRIA)

Companie certificată UNI CEI EN ISO 13485



Distribuitor/Importator în România

Dr. Phyto SRL
Str. Nađeș nr. 40D, Sector 1, București,
România tel: +4031 425 5546
www.drphyto.ro | info@drphyto.ro

1. Agitați produsul.
2. Înlăturați dopul pulverizatorului.
3. Pentru administrarea la adulți, înclinați ușor capul înapoi și introduceți vârful pulverizatorului în nară, blocând cu un deget nara opusă. Pentru administrarea la copii, apropiați cu grijă pulverizatorul de nară, apoi pulverizați.
4. Apăsați cele două clapete cu o mișcare rapidă și fermă, pentru a pulveriza doza în nară, inhalați profund și cu gura închisă, pentru a asigura o distribuție a produsului pe întreaga mucoasă nazală și pentru a favoriza menținerea lichidului în nară.
5. Ridicați capul și ștergeți orice exces de lichid. Repetați pașii pentru cealaltă nară.
6. După utilizare, acoperiți pulverizatorul cu capacul special.



ATENȚIONĂRI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu folosiți dispozitivul după data de expirare sau dacă ambalajul este deteriorat sau incomplet în momentul deschiderii. Utilizarea îndelungată a produselor pentru uz local poate da naștere fenomenelor de sensibilitate: dacă aceste fenomene apar, vă recomandăm să opriți tratamentul și să consultați un medic. În timpul sarcinii, alăptării și pentru copiii cu vârsta sub 2 ani, administrați produsul după consultarea unui medic. Aruncați recipientul utilizat doar în spațiile special amenajate.

INTERACȚIUNI

Nu se cunoaște până în prezent nicio interacțiune după administrarea spray-ului nazal Rinodep®.

CONTRAINDICAȚII

Nu folosiți produsul în caz de hipersensibilitate sau incompatibilitate cu unul sau mai multe elemente ale formulei. Nu au fost efectuate studii pe timpul sarcinii și alăptării. Cereți sfatul medicului dumneavoastră înainte de a lua produsul.

EFFECTE SECUNDARE

Până în prezent, nu s-au raportat efecte secundare referitoare la o utilizare corectă a produsului. În caz de probleme în timpul utilizării, întrerupeți tratamentul și consultați un medic.



25°C

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se păstra în loc uscat, ferit de surse de căldură și de expunerea directă la soare, la o temperatură mai mică de 25°C. Data de expirare este valabilă pentru un produs păstrat în ambalaj corespunzător și conservat în mod corect.

AMBALAJ: flacon de 30 ml cu pulverizator nazal

VALABILITATE: 36 de luni

Data Ultimei Revizuirii: Ianuarie 2025