

eva  
intima



**Dezvoltăm** produse care oferă soluții ușoare și eficiente pentru fiecare femeie, indiferent de nevoile sale. **Explicăm, învățăm,** deschidem dialoguri, dăm asigurări. **Ascultăm și învățăm** de la femei în fiecare zi. **Dorim** ca femeile să-și înțeleagă corpul și să poată face alegerile corecte pentru ele, să fie sănătoase și să-și trăiască viața la maximum. **Credem** despre corpul uman că este un sistem uimitor. De aceea, formulele noastre se bazează pe **ingrediente de origine naturală**, toate selectate pentru **eficacitatea și siguranța** lor în îngrijirea intimă a femeilor.

DESCOPERĂ GAMA EVA INTIMA

CONFORT ZILNIC	DISCONFORT MINOR	AFECTIUNI
MENSTRUAȚIE	ÎNGRIJIRE URINARĂ	VIATĂ SEXUALĂ
CONTROLUL MENOPAUZEI	DEPILARE	CONSTIPAȚIE

DISCONFORT MINOR



Îngrijire echilibrantă și hidratantă a zonei intime pentru ameliorarea primelor semne de disconfort.

Compania farmaceutică **InterMed** concepe, produce și oferă produse de înaltă calitate. Utilizarea materiilor prime de calitate farmaceutică, producția în condițiile stricte stabilite de industria farmaceutică modernă (GMP) și controalele intensive de calitate sunt semnele distinctive ale fiabilității noastre ridicate.

MOIST LONG ACTING pH 3.0

DISCONFORT MINOR

Gel vaginal pentru hidratare de lungă durată și ameliorarea simptomelor de uscăciune

**EVA INTIMA® MOIST LONG ACTING** cu acid hialuronic și carbomer reface imediat și menține pe termen lung umiditatea vaginală, ameliorând simptomele de uscăciune ale femeilor adulte și, în special, ale femeilor la menopauză. De asemenea, îmbunătățește capacitatea de regenerare și vindecare a mucoasei vaginale în cazurile de leziuni atrofice.

MOD DE UTILIZARE

O aplicare la fiecare 2 sau 3 zile, seara, înainte de culcare.

APLICARE

Țineți aplicatorul de la capătul larg. Îndreptați capătul îngust al aplicatorului spre sol și agitați pentru deplasarea conținutului spre duză. Continuați să țineți aplicatorul cu duza îndreptată spre sol, răsușiți și trageți capacul de siguranță de pe duză pentru a deschide aplicatorul așa cum se arată în **figura 1**.

Introduceți duza adânc în vagin așa cum se arată în **figura 2**, de preferință în timp ce stați întinsă și apăsați pe capătul gros al aplicatorului, pentru a depune întreaga cantitate în vagin. Continuați să apăsați pe aplicator și scoateți-l din vagin. Cantitatea care poate ieși din vagin după aplicare poate fi îndepărtată cu ușurință, ștergând cu un șervețel de hârtie uscat.

Cu 12,5 mg acid hialuronic / doză

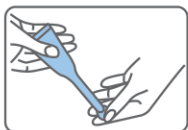


Figura 1

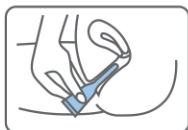


Figura 2

PRECAUȚII ȘI AVERTISMENTE

După aplicarea **EVA INTIMA® MOIST LONG ACTING** poate apărea o senzație temporară de arsură a vaginului, datorită restabilirii pH-ului la valoarea sa acidă. Aceasta nu este o contraindicație pentru continuarea tratamentului. Senzația de arsură dispare de obicei în următoarele aplicări. În caz de disconfort sau iritație persistentă, se recomandă să întrerupeți utilizarea produsului și să consultați medicul. A se păstra într-un loc uscat și răcoros (15-25 grade C), departe de accesul copiilor.

În cazul în care aveți cunoștință de orice incident grav referitor la acest dispozitiv medical, vă rugăm să informați producătorul sau ANMDM la datele de contact de mai jos: Str. Av. Sănătescu, nr. 48, sector 1, 011478 București, Tel: +40-21.317.11.02 / 317.11.15/Fax: +0-21.316.34.97 / 031.805.74.54/Email: mdevice@anm.ro



IOULIA AND IRENE TSETI  
PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A.  
Titlu distinctiv: INTERMED S.A.  
Adresa: Str. Kalyftaki 27, GR 145 64 Kifissia, Atena - Grecia,  
Tel.: +30 210 6253905, www.intermed.com.gr

5205152012467  
www.eva-intima.com

Ediție prospect: 1  
Data ultimei revizuirii: 28.05.2019