

CURĂȚARE RAPIDĂ, SUPERIOARĂ A PROTEZEI DENTARE



[View larger](#)

Ce sunt tabletele efervescente pentru curățarea protezei dentare COREGA DUBLĂ PUTERE?


Tabletele efervescente Corega Dublă Putere eliberează de 2 ori mai multă putere de curățare față de Corega Bio Formula.

Formula cu dublă putere oferă curățare rapidă, superioară* a protezei tale dentare.
*vs. Corega Bio Formula


Formula elimină eficient și mai rapid** petele dificile, în timp ce distruge 99,99% dintre bacteriile care determină respirația urât mirositoare astfel încât proteza ta să îți confere o senzație de curățare și prospețime.
**vs. Corega Bio Formula

Deși este eficientă împotriva bacteriilor, petelor și a plăcii bacteriene, aceasta este dificilă cu proteza ta.

*conform testelor de laborator

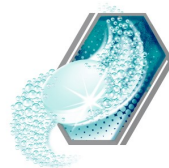


De ce să alegi tabletele efervescente pentru curățarea protezei dentare COREGA DUBLĂ PUTERE?

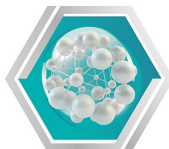

Cele mai puternice tablete efervescente pentru curățarea protezei dentare Corega



Curățare rapidă, superioară

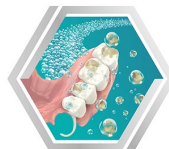


Îndepărtare mai rapidă a petelor*
*vs. Corega Bio Formula

De ce să folosești tabletele efervescente pentru curățarea protezei dentare COREGA DUBLĂ PUTERE?



Tabletele efervescente pentru curățarea protezei dentare Corega Dublă Putere eliberează de 2x mai multă putere de curățare pentru o curățare rapidă și superioară*

*vs. Corega Bio Formula în testele de laborator

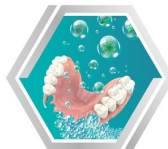

Formula îmbunătățită a acestora distruge 99,99% dintre bacteriile care determină respirația urât mirositoare*

*conform testelor de laborator



Tabletele efervescente pentru curățarea protezei ce sunt delicate cu proteza ta dar eficiente cu bacteriile și îți conferă o senzație de curățenie și prospețime la purtarea protezei



Pasul 1

Introducereți o tabletă efervescentă COREGA într-un pahar cu apă foarte caldă (nu fierbinte), suficientă pentru acoperirea completă a protezei dentare parțiale sau totale.



Pasul 2

Lăsați proteza dentară scufundată timp de 5 minute în paharul cu soluția obținută, apoi curățați proteza dentară cu o periuță de dinți cu peri moi și cu soluția de curățat obținută anterior.



Pasul 3

Clătiți apoi foarte bine proteza dentară sub un jet de apă. Aruncați soluția rămasă imediat după folosire.



Explorează gama Corega pentru îngrijirea protezei dentare totale sau parțiale



Tabletele efervescente pentru curățarea protezei dentare COREGA DUBLĂ PUTERE

- Cele mai puternice tablete efervescente pentru curățarea protezei dentare Corega
- Tabletele pot fi folosite zilnic pentru a te asigura că proteza ta rămâne curată și îți păstrează prospețimea.
- Formula ultra-rapidă eliberează de 2x mai multă putere de curățare pentru a elimina petele dificile mai rapid decât Corega Bio Formula.



Tabletele efervescente COREGA Bio Formula

- Distrug 99,99% dintre bacteriile care determină respirația urât mirositoare* și curăță în profunzime, pentru a ajuta la reducerea călburii inițiale a protezei.
- Utilizate conform instrucțiunilor, ajută la reducerea plăcii bacteriene și la îndepărtarea petelor persistente anind o acțiune blândă asupra materialului din care este fabricată proteza dentară.

*conform testelor de laborator



Crema adezivă pentru proteze dentare COREGA Max Sigilare

- Corega Max Sigilare este concepută pentru a ajuta în realizarea unei fixări etanșe și pentru a oferi protecție împotriva particulelor alimentare supărătoare, oferind, în același timp, o fixare solidă și de durată.
- Aplicatorul pentru precizie, cu vârf mai subțire, face posibilă aplicarea cantității potrivite de produs de-a lungul marginii protezei dentare, formând un sigiliu de jur împrejur.



Dacă proteza ta ar putea vorbi, ar cere Corega!

