

Prostatita cronică, atât bacteriană, cât și non-bacteriană, este o afecțiune multifactorială care poate apărea ca și consecință a prostatitei acute anterioare sau poate fi cauzată de microorganismele bacteriene, traume, factori psihofiziici, activitate sexuală dezordonată, stil de viață incorect. Prostatita cronică poate fi consecința bolilor proctologice (fistule, fisuri, hemoroizi), precum poate fi ea însăși cauza. Prostatita cronică este adesea asociată cu o componentă dureroasă, care se caracterizează prin spasm muscular perineal prelungit, cu compresia și inflamația consecutivă a nervilor pudendali. Această afecțiune determină stabilirea unor presiuni ridicate în ampula rectală, favorizând trecerea bacteriilor din ampula rectală spre prostată prin sistemul limfatic sau transparietal. Reducerea trecerii noxelor patogene de la rect la prostată, reprezintă primul pas pentru restabilirea condițiilor fiziologice normale în prostată. Mai mult, în zona rectului, o acțiune hidratantă, emolientă și calmantă contribuie la reducerea tulburărilor tipice de inflamație cauzate de boli proctologice (fistule, fisuri, hemoroizi) crescând tonusul și elasticitatea mucoaselor. Supozitoarele Deprox<sup>®</sup> conțin Graminex<sup>®</sup> NAX<sup>™</sup>, și acid hialuronic.

Structura filmogenă pe care o formează datorită acțiunii acidului hialuronic împreună cu Graminex<sup>®</sup> NAX<sup>™</sup>, garantează un eficient efect de barieră. Componentele lipofile ale Graminex<sup>®</sup> NAX<sup>™</sup> și acidul hialuronic ajută, de asemenea, la menținerea hidratării și a elasticității mucoaselor.

Supozitoarele Deprox<sup>®</sup> sunt dispozitive medicale de uz local cu acțiune dublă:

- favorizează formarea filmului pe mucoasele rectale, fiind o barieră în aderarea microorganismelor de mucoasă și limitând penetrarea lor;
- contribuie la refacerea condițiilor fiziologice normale ale mucoasei rectale, datorită acțiunii sale emoliente și calmante.

#### Indicații/Utilizare:

Supozitoarele Deprox<sup>®</sup> sunt un dispozitiv medical indicat ca adjuvant pentru tratamentul simptomelor locale (arsură, durere) ale canalului anorectal în prezența fenomenelor congestive asociate cu prostatita acută și cronică. Deprox<sup>®</sup> este indicat la bărbați adulți cu vârsta de 18 ani și peste.

#### Instrucțiuni de utilizare:

1. Spălați-vă în prealabil pe mâini;
2. Îndoțiți blisterul de-a lungul liniei punctate și trageți;
3. Îndepărtați ambalajul, așa cum este indicat pe alveolă, separând cele două clapete și extrageți supozitorul;
4. Introduceți supozitorul în rect și contractați fesele pentru câteva secunde;
5. Spălați-vă mâinile după introducerea supozitorului.

#### Doze și mod de administrare:

1 supozitor zilnic, de preferință seara, înainte de culcare, timp de cel puțin 10 zile consecutive sau conform sfatului medicului. Durata tratamentului depinde de evoluția simptomelor.

#### Atenționări și precauții:

- Nu utilizați produsul pentru indicații diferite de cele indicate în prospect.
- Produsul trebuie administrat numai pe cale rectală.
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
- Nu utilizați produsul după data de expirare tipărită pe ambalaj.
- Data de expirare se referă la produsul depozitat corespunzător într-un pachet nedeschis.
- A se păstra departe de sursele de căldură, la temperaturi sub 25 °C.
- Nu aruncați ambalajul în mediul înconjurător după utilizare.
- Nu utilizați produsul dacă ambalajul nu este intact.
- Utilizare rectală - A nu se înghiți.
- A nu se utiliza în caz de leziuni sau vătămări grave.
- A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
- Întrerupeți tratamentul în caz de reacție locală anomală.
- Raportați producătorului și Autorității Naționale Competente orice accident grav cauzat de utilizarea acestui dispozitiv.

#### Precauții:

Întrerupeți utilizarea produsului în caz de reacții nedorite și consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul. În cazul utilizării concomitente a altor medicamente, consultați medicul înainte de a utiliza produsul. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat.

#### Contraindicații:

Hipersensibilitate individuală la oricare dintre componentele produsului. Utilizarea produsului pe perioade prelungite trebuie făcută sub supraveghere medicală. Dacă apar reacții de sensibilizare, întrerupeți tratamentul și consultați medicul.

#### Condiții de păstrare:

A se păstra departe de sursele de căldură, la temperaturi sub 25 °C.

#### Conținutul ambalajului:

2 blistere cu 5 supozitoare (1,65 g).

#### Compoziție:

GRAMINEX<sup>®</sup> NAX<sup>™</sup> (extract de polen de flori, pastă 7%; 24,7 mg/supozitor), hialuronat de sodiu (3,3 mg/supozitor), extract liposolubil de Malva sylvestris L., extract liposolubil de Calendula officinalis L., extract liposolubil de Aloe barbadensis M., Gliceride semisintetice, Gliceride C10-18 / gliceride C12-18, ulei esențial de Eugenia caryophyllus, Vitamina E acetat, Vitamina A palmitat, siliciu coloidal.

#### Producător: IDI Integratori Dietetici Italiani S.R.L.

Via Goffredo Mameli, 12 - 95020 Aci Bonaccorsi (CT), Italia.

#### Distribuit în România de Althea Life Science S.R.L.,

România, București, Sector 1, Str. Prahova nr. 7 Parter  
email: office@althealifescience.ro

#### DISPOZITIV MEDICAL Clasa IIb

Cod PAP 21 Ambalaj CARTON	Cod PAP 22 Prospect HARTIE	7-Alte ambalaje Folii PLASTIC
COLECTARE SEPARATĂ	COLECTARE SEPARATĂ	COLECTARE SEPARATĂ

