

Presto

ultra early pregnancy test

7 DAYS
AFTER SEX

PROSPECT CU INSTRUCȚIUNI

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE!

Fiecare cutie de Presto conține: 2 punguțe din de folie, fiecare conținând un test de sarcină Presto, o pipetă și un desicant (pliculeț pentru absorbția umidității – a nu se deschide! a nu se înghiți!), instrucțiuni de utilizare.

Blue Cross Bio-Medical Ltd., Zona industrială Beijing KNR 102209.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania. A nu se lăsa la îndemâna copiilor; a se păstra la o temperatură cuprinsă între 4°C și 30°C. Test de unică folosință pentru testare personală. Nu este pentru uz intern.

Sensibilitatea testului: 10 mIU/ml.

CE 0123



+40 371 119 624

Telefonul consumatorului
9:00 – 18:00 (Luni - Vineri)

Deținător notificare și distribuitor:


Sidaya Pharma România S.R.L., Str. Turturelelor nr. 50,
et. 4, ap. 8, sector 3, București, România,
+40 371 119 624.

Testul de sarcină Presto este special conceput pentru a detectarea timpurie a sarcinii.

Testul constă în două casete. Este ușor de utilizat, nefiind nevoie de o pregătire specială sau anterioară pentru efectuarea testului.

Prima casetă - se utilizează la șapte zile după contactul sexual.

A doua casetă - se utilizează în prima zi de întârziere a ciclului, pentru a confirma rezultatul obținut la primul test.

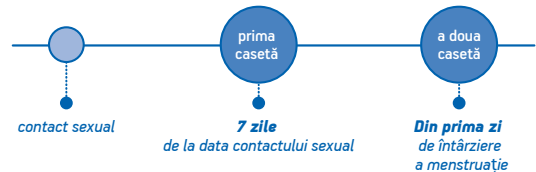

Înainte de a face testul:

- Citiți cu atenție instrucțiunile.
- Asigurați-vă că aveți la îndemână un ceas sau un alt instrument de măsurare a timpului.
- Verificați data de expirare de pe cutie și nu utilizați testul dacă acesta a expirat.
- Nu utilizați testul în cazul în care ambalajul din folie este compromis.

Presto este de unică folosință!

Mod de utilizare:

- Scoateți testul din ambalajul de folie imediat înainte de utilizare.
- Cu ajutorul pipetei, picurați 3 - 4 picături de urină în fereastră.
- Citiți rezultatul după 5 minute, dar nu mai târziu de 10 minute.
- Modul de utilizare este identic pentru ambele casete



Rezultate



PRIMA CASETĂ	A DOUA CASETĂ
<ul style="list-style-type: none">▶ Doar o linie colorată în zona de control (C): este posibil să nu fiți însărcinată▶ Linii colorate clare în zonele (C) și (T): cel mai probabil sunteți însărcinată <p><i>Pentru a confirma rezultatul, utilizați a doua casetă în prima zi de întârziere a ciclului menstrual</i></p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Doar o linie colorată în zona de control (C): nu sunteți însărcinată.▶ Linii clare colorate în zonele (C) și (T): sunteți însărcinată.

În cazul unui rezultat pozitiv, nu luați măsuri fără a consulta un medic! Linia de testare (T) poate fi mai palidă decât linia de control (C). Acest lucru înseamnă, de asemenea, că sunteți însărcinată.

Dacă nu apare nicio linie în zona de control (C) după 5 minute, testul este considerat invalid. Vă rugăm să refaceți testarea, folosind un nou test de sarcină, nedeschis.

Testul este considerat nevalid dacă se scoate din folie cu mai mult de 15 minute înainte de utilizare.

Ignorați eventualele modificări vizibile ale rezultatului apărute la 30 de minute după efectuarea testului.

Întrebări frecvente

1. Cum funcționează Presto?

Testul de sarcină Presto detectează prezența hCG (gonadotropina corionică umană), un hormon care începe să fie excretat în urină la scurt timp după concepție.

2. La câte zile după contactul sexual pot face testul?

Prima casetă a testului de sarcină Presto trebuie utilizată la 7 zile după actul sexual. Dacă în zonele (C) și (T) apar linii colorate clare, este posibil să fiți însărcinată. Dacă în zona de control (C) apare doar o singură linie colorată, probabil că nu sunteți însărcinată. În ambele cazuri, trebuie să repetați testul folosind cea de-a doua casetă în prima zi de întârziere a ciclului, pentru a confirma rezultatul, deoarece creșterea concentrației hormonale are loc într-un ritm diferit de la persoană, la persoană.

3. Consider că rezultatul este incorect – ce trebuie să fac?

Dacă credeți că rezultatul nu este valid sau că linia de testare din zona (T) este prea slabă, vă rugăm să faceți un alt test după 48 de ore.

4. Există factori care pot afecta rezultatul testului?

- Administrarea anumitor medicamente care conțin hormonul hCG poate afecta rezultatul.
- Utilizarea Presto în termen de 8 săptămâni de la nașterea sau avort spontan poate raporta un rezultat pozitiv înșelător din cauza prezenței hormonului hCG în organism. Vă rugăm să contactați un medic pentru interpretarea rezultatului.
- Consumul unor cantități mari de lichide poate reduce concentrația hormonului hCG în organism și, astfel, poate afecta rezultatul.

Utilizarea pilulelor contraceptive, a antibioticelor, a analgezicelor și a alcoolului nu afectează rezultatul.

Data ultimei actualizări: 20.10.2022