

RO COMPEED® PLASTURI PENTRU BĂȘICILE PROVOCATE DE PANTOFII CU TOC – 5 Plasturi

Plasture ultra discret, ce îndepărtează instantaneu durerea și oferă protecție bășicii, mulțumită profilului avansat al plasturelui COMPEED®. Forma permite fixarea sub tendonul lui Ahile, acest plasture oferind amortizare și confort, indiferent de mărimea tocului. Plasturele rămâne fixat, în medie, până la 24 de ore.

Experiența individuală poate varia. A se depozita la temperatura camerei.

COMPEED – Fii de neoprit!

INSTRUCȚIUNI

1. Curățați și uscați pielea înainte de utilizare, asigurându-vă că zona bășicii nu are reziduuri de cremă și uleiuri.
2. Îndepărtați hârtia de deasupra, apoi pe cea de dedesubt, evitând atingerea părții adezive.
3. Aplicați plasturele ferm, peste bășică, asigurându-vă că marginile sunt netezite bine.
4. Lăsați plasturele fixat până când acesta începe să se desprindă singur. (Notă: poate rămâne fixat pe durata mai multor zile.)
5. Pentru a îndepărta plasturele: nu trageți în sus, ci dați-l la o parte, delicat, de-a lungul pielii.

ATENȚIONĂRI

- Diabeticii trebuie să consulte medicul înainte de utilizare.
- Nu aplicați pe răni infectate.
- Nu reutilizați, pentru a evita infectarea.
- Dacă starea bășicii se înrăutățește sau aceasta nu se vindecă, încetați utilizarea și consultați un doctor.
- Nu tăiați niciodată un plasture COMPEED®.
- Reziduurile de adeziv de pe haine se îndepărtează cu alcool alb, ținând cont de atenționările specifice ale materialului.

A se folosi de preferință înainte de:
vezi pe ambalaj.

Distribuitor: Perrigo Romania SRL, Adresa: Str. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2, Et. 4, Unitatea 3, Sector 1, București, tel: 021,315,03,44