

RO COMPEED® PLASTURI SPORT PENTRU BĂȘICILE DE PE TALPĂ - 5 Plasturi

COMPEED® - tehnologia hidrocoloidală - este un gel activ cu particule care absorb umezeala. Special concepuți pentru a se potrivi pe talpa piciorului, plasturii COMPEED® acționează ca un al doilea strat de piele, susținând echilibrul de hidratare natural, pentru:

- A îndepărta instant durerea cauzată de bășică.
- A proteja și amortiza împotriva frecării, datorită zonei mai groase de amortizare.
- A facilita vindecarea rapidă a răni.

Plasturele rămâne fixat pe durata mai multor zile. Experiența individuală poate varia.

COMPEED - Fii de neoprit!

INSTRUCȚIUNI

1. Curățați și uscați pielea înainte de utilizare, asigurându-vă că zona bășicii nu are reziduuri de cremă și uleiuri.
2. Îndepărtați hârtia din partea inferioară a produsului, evitând atingerea părții adezive.
3. Aplicați plasturele ferm, peste bășică, asigurându-vă că marginile sunt netezite bine.
4. Lăsați plasturele fixat până când acesta începe să se desprindă singur. (Notă: poate rămâne fixat pe durata mai multor zile.)
5. Pentru a îndepărta plasturele: nu trageți în sus, ci dați-l la o parte, delicat, de-a lungul pielii.

Distribuitor: Perrigo Romania SRL, Adresa: Str. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2, Et. 4, Unitatea 3, Sector 1, București, tel: 021.315.03.44

8560000570_RO

ATENȚIONĂRI

- Diabeticii trebuie să consulte medicul înainte de utilizare.
- Nu aplicați pe răni infectate.
- Nu reutilizați, pentru a evita infectarea.
- Dacă starea bășicii se înrăutățește sau aceasta nu se vindecă, încetați utilizarea și consultați un doctor.
- Nu tăiați niciodată un plasture COMPEED®.
- Reziduurile de adeziv de pe haine se îndepărtează cu alcool alb, ținând cont de atenționările specifice ale materialului.

A se folosi de preferință înainte de:
vezi pe ambalaj.