

# AltaLAX MICROCLISME

AltaLax Microclisme Adulți 9 g

AltaLax Microclisme Copii 3 g

AltaLax este un dispozitiv medical de unică folosință, sub formă de microclisme, pe bază de glicerol, mușețel și nalbă, indicat pentru a facilita activitatea de evacuare în caz de constipație. Este indicat și pentru copii.

## MECANISM DE ACTIUNE

Datorită acțiunii de evacuare a glicerolului, AltaLax înmoaie și lubrificază scaunul, facilitând eliminarea acestuia și obținerea un efect emolient local.

## INDICATII

Tratamentul simptomatic al constipației

## COMPOZITIE

Substanțe funcționale glicerol, mușețel, nalbă.

## DOZAJ

Adulți: 1 microclismă a 9 g la nevoie

Copii: 1 microclismă a 3 g la nevoie

## INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Lubrificați canula cu o picătură din soluție, introduceți aplicatorul în rect și apăsați burduful. Scoateți în timp ce țineți burduful apăsat și aruncați.

## PRECAUTIUNI

A se evita utilizarea produsului în caz de hipersensibilitate sau intoleranță cunoscută la unul sau mai multe dintre ingredientele. În cazul constipației persistente, este important să vă adresați medicului dumneavoastră pentru a exclude alte patologii. Microclisma este de unică folosință, prin urmare nu poate fi reutilizată.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Laxativele trebuie utilizate cât mai rar posibil și nu mai mult de șapte zile. Utilizarea pe perioade mai lungi de timp necesită prescripție medicală după o evaluare adecvată a cazului individual. În episoadele de constipație este indicat în primul rând corectarea obiceiurilor alimentare prin integrarea alimentației zilnice cu un aport adecvat de fibre și apă. În timpul sarcinii și alăptării, cereți sfatul medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a utiliza acest produs. Nu există studii privind utilizarea produsului în timpul sarcinii și alăptării.

## METODE DE CONSERVARE

Depozitați într-un loc răcoros, uscat, ferit de surse de căldură și lumina directă. Data de expirare indicată se referă la produsul depozitat corect, în ambalaj intact.

## DATA EXPIRĂRII

Vezi data expirării tipărită pe ambalaj

A nu se utiliza după data de expirare indicată

## Conținut:

AltaLax Adulți 6 microclisme de unică folosință a câte 9 g fiecare

AltaLax Copii 6 microclisme de unică folosință a câte 3 g fiecare



New.Fa.Dem s.r.l. - Viale Ferrovie dello Stato,1 - Zona ASI 80014 Giugliano in Campania (NA), Italy.  
Fabricat pentru: Althea Life Science SRL - România, București, Sector 1, Str Prahova nr 7, Parter office@althealifescience.ro

## SIMBOLURI



Numărul  
lotului



Data  
expirării



Consultați  
instrucțiunile  
de folosire



Utilizare  
unică



Dispozitiv  
medical



A se păstra  
între 4°C și 30°C



Aruncați la  
coș după  
utilizare



Producător